



Owlet Smart Sock Kullanım Talimatları

TR

## Bu kullanım kılavuzunu hangi ürün içindir?

Smart Sock 3

Smart Sock Plus

## Paket İçeriği

1, 2 ve 3 beden çoraplar; sağ ve sol ayak için birer çorap

Smart Sock sensörü

Baz istasyonu


Ana kablo

Güç adaptörü

Başlangıç Kılavuzu

\* 3 beden çoraplar yalnızca Smart Sock Plus çorap paketine dahildir.

## Owlet Smart Sock nasıl çalışır?

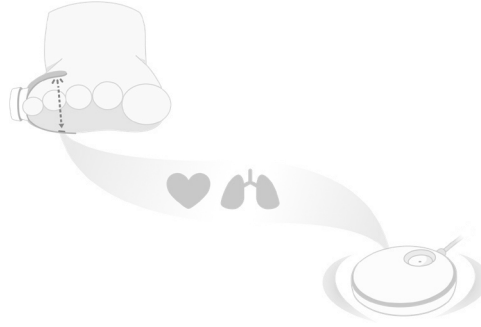

Smart Sock sensörü, uyuyan bebeğinizin ayağından veri almak için nabız oksimetresini kullanır. Çorap ışığı ciltte parlar ve kan akışı ve oksijen seviyeleri sensörün algıladığı ışık miktarına göre tahmin edilir.

Smart Sock sensörü verileri toplar ve baz istasyonuna gönderir. Bu verilere dayanarak, gerekli durumlarda baz istasyonu size bildirim gönderecektir. Baz istasyonu, kırmızı bir alarm durumunda sizi zamanında bilgilendirme görevine sahiptir, bu nedenle her zaman duyabileceğiniz şekilde yerleştimenizi öneririz.


## Uygulama nasıl çalışır?

### Smart Sock bir Wi-Fi ağına bağlıysa:

Baz istasyonu, Wi-Fi ağı aracılığıyla Owlet bulutuna bilgi gönderir. Owlet Bulutu, bu bilgileri Owlet uygulamasında görüntülemenizi sağlar. Bu, nerede olursanız olun tüm verilerinizi gerçek zamanlı olarak görüntülemenize ve uygulamadan bildirimler almanıza olanak tanır.

### LAN modu:

LAN modunu kullanmak için telefonun baz istasyonu ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Uygulama, Owlet bulutuyla ilk bağlantıyı kurmak için Wi-Fi ağını kullanır ve siz uygulamayı kapatana ve uygulamanın Wi-Fi ağı veya baz istasyonu değişene kadar veri alır.

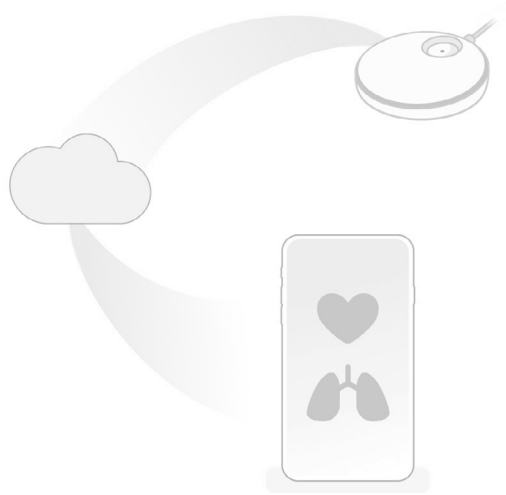

# Owlet Smart Sock nasıl kurulur ve kullanılır?

## Gereksinimler

Owlet Smart Sock, Owlet Care uygulamasının yüklü olduđu bir iOS veya Android cihazına erişim gerektirir. Minimum işletim sistemi sürümleri için uygulama mağazasına bakın.

Smart Sock Plus akıllı çorap, maksimum ağırlığı 24,9 kg (55 lbs) olan çocuklar için uygundur.

Gerçek zamanlı okumalar, uzaktan uygulama erişimi ve bazı uygulama özellikleri 2,4 GHz kablosuz ağ bağlantısı gerektirir. Wi-Fi Hotspot ve 5GHz ağı desteklenmez.

## Owlet Smart Sock kurmak için:

① Owlet uygulamasını indirin.

Uygulama hem iOS hem de Android cihazlar için kullanılabilir.



<

İyi günler! Senin için bir hesap oluşturalım.

E-mail

Şifre (en az 6 karakter)

Şifreyi tekrar girin

② Bir hesap oluşturun

Bir hesap oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin.



Sen kimsin?

Ad

Soyad

Telefon numarası

Doğum tarihi

Posta kodu



Az önce size bir onay kodu  
içeren e-mail gönderildi.

Tekrar e-mail gönder.



Hesabınız onaylandı.Owlet  
ailesine hoş geldiniz.

Ev



Bebek veya cihaz profili ekleyin

Başlıyoruz



Owlet Smart Sock hakkında daha fazla bilgi >



Kurmak istediğiniz bir Owlet cihazınız var mı?

Smart Sock 3

Hayır >

Evet >

Hangi cihazları kurmak istiyorsunuz?



Smart Sock 3



Smart Sock 2



Kamera




### ③ Cihazı kurun

NOT: Zaten bir Owlet hesabınız varsa ve daha fazla Owlet cihazı ekliyorsanız, yeni bir cihaz eklemek için uygulamadaki talimatları izleyin.




④ Baz istasyonunu güç kaynağına ve Smart Sock akıllı çorabı baz istasyonuna bağlayın.

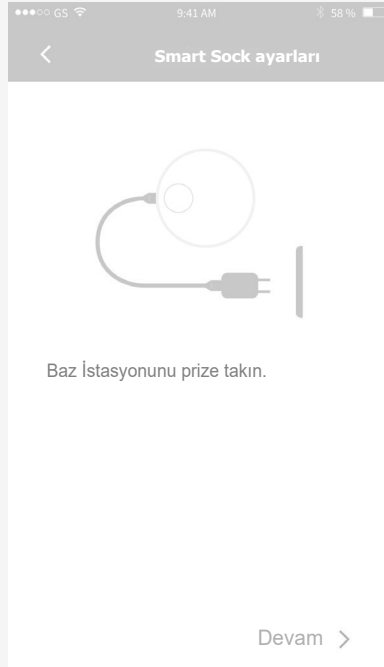


Telefonunuzdaki verileri görebilmeniz için baz istasyonunuzu bir Wi-Fi ağına bağlayalım.

1. Telefonunuzdaki Wi-Fi ağı ayarlarına gidin ve "Owlet" ağını seçin.

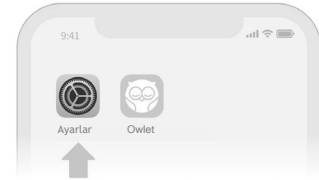

2. Owlet uygulamasına dönün.

*Yönlendirildiyse veya "Yönlendirme başarısız" mesajını görüyorsanız, sorun değil! Sadece Owlet uygulamasına dönün.*

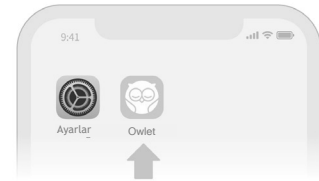

(Bu ekran yalnızca iOS cihazlar için geçerlidir.)



Hesabınız onaylandı. Owlet ailesine hoş geldiniz!

Ev >

(Bu ekran yalnızca Android cihazlar için geçerlidir.)

Smart Sock akıllı çorabı Wi-Fi ağına bağlamak için uygulamanın talimatlarını izleyin, çorabı kaydedin ve eşleştirin, gerekirse çorabı güncelleyin.

### Wi-Fi ağ ayarları

Kurmak istediğiniz Owlet cihazını seçin.

☰ Owlet - 383G9f65

(Bu ekran yalnızca Android cihazlar için geçerlidir.)



Bir Wi-Fi yönlendirici seçin.

(Henüz 5.0GHz ağlarıyla uyumlu değil.)

📶 Macit Wi-Fi ağı

📶 Komşunuzun garip bir isimli bir Wi-Fi ağı

📶 Burçin evi

📶 Albayraklar



Wi-Fi ağı ayarları

Macit Wi-Fi şifresini girin.

Şifre

Bağlan

Wi-Fi ağı ayarları



Bekleyin, Wi-Fi'ye  
bağlanılıyor...

Wi-Fi ağı ayarları



Wi-Fi ağı bağlı ve hazır!

Cihazınız kaydediliyor.

Devam >

## Wi-Fi ağı ayarları

### Hızlı kontrol

Baz istasyonunun arkasına bakın ve Wi-Fi ağının durumunu kontrol edin.

Wi-Fi ışığı yanmıyor. >

Wi-Fi ışığı yanıyor. >

## Baz istasyonu kaydı



Baz istasyonundaki düğmeyi basılı tutun (iki bip sesi duyana kadar).

Kayıt, düğmeye bastıktan sonra 10 saniye kadar sürebilir.





## Smart Sock ile eşleştirme



Kayıt işlemi başarıyla tamamlandı!

Smart Sock akıllı çorabı baz istasyonuna bağlayın.

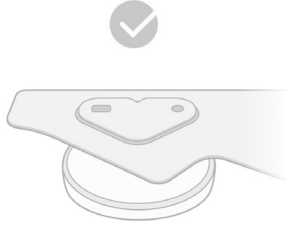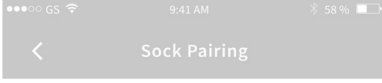

## Smart Sock başarıyla eşleştirildi!


Baz istasyonu beyaz renkte yanıp sönmelidir, bu durum, Smart Sock akıllı çorabın şarj olduğu anlamına gelir.

Ayrıca cihazınızın güncel olduğundan emin olacağız.



## Smart Sock 3 güncellemesi

Güncelleme sırasında baz istasyonunu güç kaynağından ayırmayın.

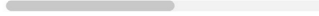

Tamamlanıyor...



## Önemli güvenlik talimatları

Smart Sock akıllı çorabın doğru kullanımı Bebeğinizin güvenliği bizim ve sizin için her şeyden önce gelir.

Yanlış giydirilen çorapların bebeğiniz için rahatsız edici olabileceğini ve ayağında kırmızı lekeler, morluklar veya su toplamaları oluşabileceğini lütfen unutmayın. Bebeğinizin ayağını kuru tutun, doğru boyda çorap kullanın ve doğru kullanım için talimatlarımızı uyun.



### Smart Sock akıllı çorabın bakımı

Smart Sock akıllı çorabınızı ve sensörü haftada en az bir kez hafif bir deterjanla yıkayın. Tekrar kullanmadan önce çorabın tamamen kurumasını bekleyin.

### Güvenli uyku prensipleri

Her zaman güvenli uyku prensiplerine uymayı ve tehlikeli uyku alanlarından (salıncak, araba koltukları ve ortak yatakta uyuma dahil) kaçınmayı unutmayın.

Owlet Smart Sock akıllı çorap, güvenli uyku ve ebeveyn bakımının yerini almaz. Güvenli uyku prensiplerine uydüğunuzdan emin olun ve Owlet Smart Sock akıllı çorabı, bebeğinizin aldığı tüm bakım, güvenlik ve sevgiye ek olarak, bebeğinizin nasıl olduğunu öğrenmenize yardımcı olacak bir araç olarak kullanın.

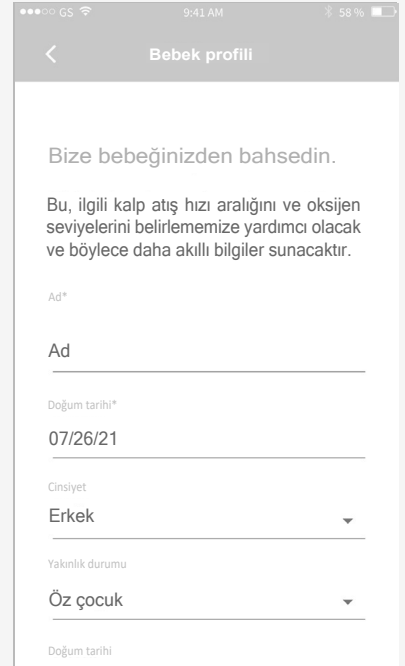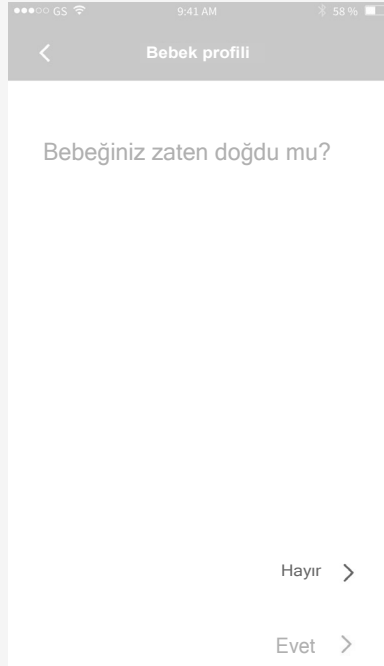

⑤ Bebeđinizin bir profilini oluřturun. Uygulama, bebeđinizin bir profilini oluřturmanıza ve bunu Owlet cihazına atamanıza yardımcı olacaktır.

< **Bebek profili**



Fotoğraf ekleyin.

Veya isterseniz daha sonra  
ana ekrandan yapabilirsiniz.


## Smart Sock akıllı çorabın doğru boyutu ve kullanımı

Smart Sock akıllı çorabın iki bedeni mevcuttur ve her beden için bir sağ ve sol ayak çorabı mevcuttur:

Beden 1 çoraplar, 5,4 kg'a kadar olan bebekler için uygundur.

Beden 2 çoraplar, 5,4 ila 13,5 kg'a kadar olan bebekler için uygundur.

Beden 3\* çoraplar, 13,5 ila 24,9 kg'a kadar olan bebekler için uygundur.

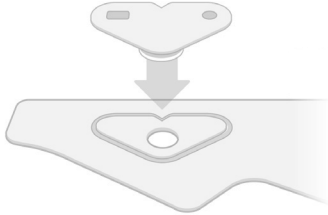

\* Beden 3 çoraplar yalnızca Smart Sock Plus çorap paketine dahildir.



### Sensörü kumaş çoraba takın

Sensörün dış hatlarını kumaş üzerindeki çizgiyle hizalayın, takmak için sensörü çorabın üzerine bastırın ve yerine oturtun.

### İPUCU:

En uygun bedenden emin değilseniz, daha küçük bir çorapla başlayın.



### Çorabı giydirin

Sensör küçük parmağın arkasında olacak şekilde çorabı ayağa giydirin.

Kayıışı ayak parmaklarının altına sabitleyin, ardından ayak bileği kayışını ayak bileğinin arkasına



sarın ve ayak bileğine sabitleyin.

Doğru yerleştirildiğinde, ayağın üst kısmındaki kayış, başparmağa dönük olmalı ve sensör, cihazın başı ayak parmaklarına bakacak şekilde bebeğin ayağının parmak ucunda olmalıdır.



## SMART SOCK 3 AKILLI ÇORAPLARI YENİ DOĞMUŞ ÇOCUKLARDA VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA KULLANMA İPUÇLARI:

Yeni yürümeye başlayan çocuklar ve okul öncesi çocuklar, bebeklerden çok daha hareketli ve aktiftir, bu nedenle sizinle bazı yararlı ipuçlarını paylaşmak istiyoruz:

1. Bebeğiniz yatağında mümkün olduğunca az hareket edeceği için yatırana kadar Smart Sock akıllı çorabı giydirmeyin. Çorapla yürümek sensöre zarar verebilir.
2. Baz istasyonunu açmadan önce çocuğun uykuya dalmasını bekleyin. Bu, sizi bebeğinizin uykuya dalması konusunda gereksiz yere uyaracak olan sarı alarmları önleyecektir. Baz istasyonunu uygulama üzerinden veya doğrudan ünite üzerinden açabilirsiniz.
3. Çocuğunuz daha önce hiç Smart Sock akıllı çorap giymemişse size soru sormaktan çekinebilir. Cihazı takmadan önce incelemesine ve alışmasına izin verin.

## Veri toplama ve bildirim

Çocuğunuz uyumadan önce Smart Sock Akıllı Çorabı baz istasyonundan çıkarın ve giydirin.

Baz istasyonunun ışıkları yeşil renkte yanıp sönerken cihazın değerleri okumaya çalıştığını gösterir. Baz veriyi almaya başlar başlamaz yeşil renkte yanıp sönecektir.

### Sarı alarm

Sarı alarm sırasında, baz istasyonu sarı renkte yanıp sönecek, bir ninni çalacak ve uygulama size bir anlık bildirim gönderecektir. Sarı renk, çorabın yanlış giydirildiğini veya çocuğun ayağından çıktığını ve cihazın en az 60 saniye boyunca iyi veri alamadığını gösterir.

### Mavi alarm

Mavi alarm sırasında, baz istasyonu mavi renkte yanıp sönecek, bir ninni çalacak ve uygulama size bir anlık bildirim gönderecektir. Mavi, çorabın en az 60 saniye boyunca baz istasyonu menziline dışında olduğunu, düşük pil veya sinyal boğunu belirtir.

İnsan vücudu, baz istasyonu ve çorap arasındaki sinyale müdahale edebilir. Çocukla ilgilenirken, gereksiz bildirimlerden kaçınmak için baz istasyonuna sırtınızı dönmeyin. Mavi alarm tekrar tekrar tetiklenirse, tekrarlanan bildirimleri önlemek için çorabı ve baz istasyonunu birbirine yaklaştırın.

### Kırmızı alarm

Kırmızı, en yüksek öncelikli bildirimini gösterir. Baz istasyonunda, kırmızı renkte yanıp sönen ve yüksek bir ses çıkaran üç tür kırmızı bildirim bulunur.

**Düşük oksijen seviyesi:** Bebeğinizin oksijen seviyesi %80'in altına düştüğünde sizi uyaracaktır.

**Düşük kalp atış hızı:** Çocuğunuzun nabızı dakikada 60 atışın altına düştüğünde ve oksijen seviyesi %85'in altına düştüğünde sizi uyaracaktır.

**Yüksek kalp atış hızı:** Çocuğunuzun kalp atış hızı dakikada 220'yi aşarsa sizi uyarır.

### İPUCU:

Bebek yemek yerken çorap giyerse, oksijen içeriği doğal olarak azaldığından ve nabızı arttığından kırmızı alarmı tetikleyebilir.



## ***Bildirim sesini duraklat***

Herhangi bir aktif alarmin sesini, baz düğmesine kısaca basarak veya uygulama üzerinden 60 saniye boyunca duraklatabilirsiniz.

Duraklatma, baz istasyonu ve uygulama sesini duraklatır - ışık halkası baz istasyonunda kalır ve ayrıntılar uygulamada mevcuttur. Alarm, durum çözülene kadar aktif kalır.

Duraklama sırasında tetik (düşük oksijen, düşük veya yüksek kalp hızı) durursa alarm durur.

Bir duraklama sırasında aynı veya daha yüksek önceliğe sahip yeni bir alarm tetiklenirse, duraklamadan bağımsız olarak bu alarm tetiklenir.

## **Baz istasyonu**

Smart Sock akıllı çorabın baz istasyonu, çeşitli çalışma durumlarını aşağıdaki renkli ışıklarla bildirir:

**Yavaşça yanıp sönen yeşil ışık:** Veri toplama

**Yanıp sönen yeşil ışık:** Değerler normaldir.

**Yanıp sönen mavi ışık:** Smart Sock akıllı çorap, baz istasyonu menzili dışında, pil bitmiş veya bir şey sinyali engelliyor.

**Yanıp sönen sarı ışık:** Smart Sock akıllı çorap doğru giyilmemiş veya ayağından çıkmış.

**Yanıp sönen kırmızı ışık:** Kalp atış hızı veya oksijen seviyeleri aralık dışında.

**Yanıp sönen beyaz ışık:** Smart Sock şarj oluyor.

**Beyaz ışık:** Smart Sock tamamen şarj oldu.

**Yavaşça yanıp sönen beyaz ışık:** Smart Sock eşleştirilmemiş.

## ***Takibi ve baz istasyonunu nasıl açarım?***

Sensör şarj oluyorsa, şarj portundan çıkarın veya baz istasyonuna bastırın ve bırakın. Baz istasyonuna bastığınızda bir bip sesi duyarsınız ve baz yeşile döner.

## ***Baz istasyonunu ve takibi nasıl kapatabilirim?***

Yeşil ışık sönene ve bir bip sesi duyana kadar baz istasyonunu basılı tutun.

## Smart Sock şarj edilmesi

Smart Sock Akıllı Çorabı, bazın üst kısmında bulunan şarj bağlantı noktasına yerleştirin ve baz ışığının beyaz olduğundan emin olun.


## Smart Sock akıllı çorabın şarj seviyesi

Smart Sock akıllı çorabın pil seviyesini uygulamadan kontrol edebilirsiniz.


Baz istasyonunun ışığı beyaz yanıp sönüyorsa, çorap şarj oluyordur. Işık beyazsa, çorap tamamen şarj olmuştur.

## Smart Sock düşük pil uyarısı

Uygulama, Smart Sock Akıllı Çorabın şarjının bir saatten daha kısa sürede biteceğini tespit ederse, sizi mavi bir alarla bilgilendirecektir. Ancak bu durumda, ana birim herhangi bir ses çıkarmaz veya yanıp sönmez.

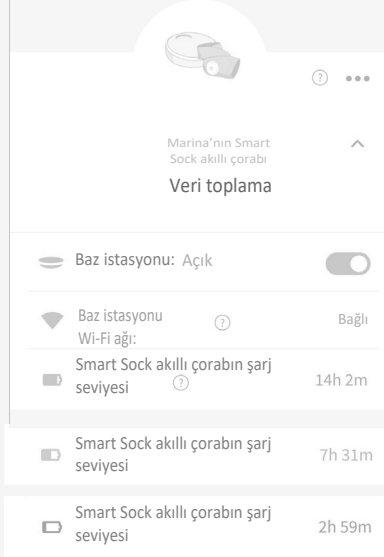


Ayrıca pil durumunu istediğiniz zaman cihaz durumu ekranında görüntüleyebilirsiniz.

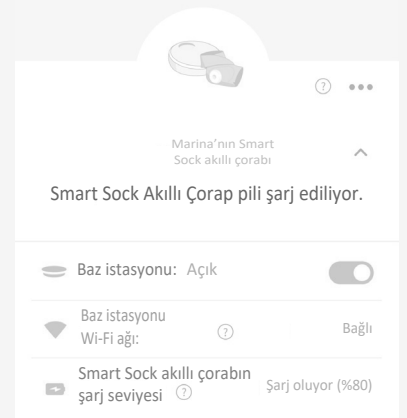


## Geçmiş

Uygulamadaki Geçmiş sekmesi en son uyku oturumlarını, verileri ve alarmları görüntüler. Baz istasyonu ve uygulamalar, görüntülenmek için bir Wi-Fi bağlantı geçmişi gerektirir.

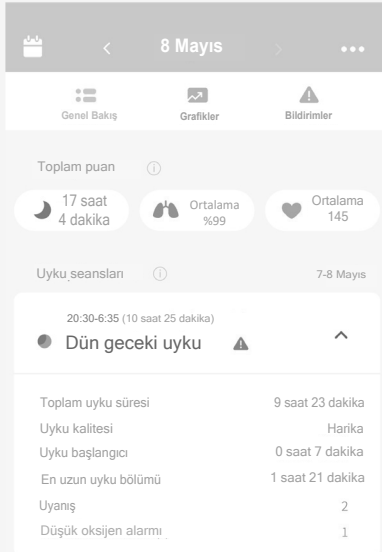

Grafikler son 10 dakika için ortalama kalp atış hızı, oksijen ve uyku değerlerini gösterir ve her uyku periyodunda her 10 dakikada bir güncellenir.

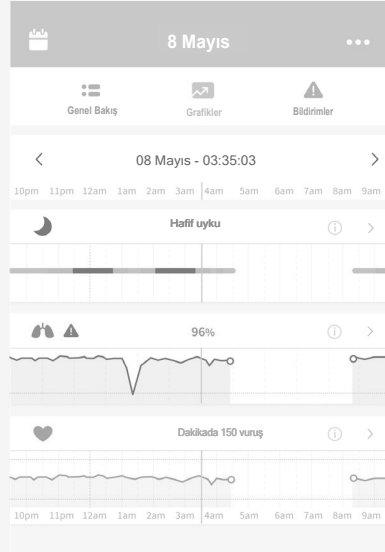

Verileri geri yüklemek için grafikleri aşağı sürükleyin veya uygulamayı kapatıp yeniden açın. Geçmiş, son 30 uyku seansıyla ilgili verileri saklar.



## Uyandıktan sonra

Smart Sock Akıllı Çorabı çocuğunuzun ayağından çıkardıktan sonra, şarj olabilmesi için baz istasyonuna geri koyun.

### Smart Sock Akıllı Çorabın bakımı ve saklanması

Kullanmakta olduğunuz her iki Smart Sock akıllı çorabı, her iki ayakta da düzenli olarak değişimli kullanabilmeniz için kolay erişilebilir bir yerde saklayın. İkinci bedeni ileride kullanmak üzere saklayın.

Owlet, kirli çorap ve sensörün neden olduğu cilt tahrişini önlemek için çorabı ve sensörü en az iki haftada bir yıkamanızı önerir. Çorabı ve sensörü yumuşak deterjan ve soğuk suyla elde yıkayın. Tekrar kullanmadan önce çorabın tamamen kurummasını bekleyin.

### Smart Sock akıllı çorap sensörü nasıl kapatılır

Sensörü baz istasyonundan çıkarın. Güç kablosunu baz istasyonundan çıkarın. Güç kablosunu prize takarken baz istasyonu düğmesine basılı tutun. Baz ışığı turuncuya dönene ve dört bip sesi duyana kadar baz düğmesine basılı tutun. Düğmeye basın. Çorap ışığı sönecektir. Çorabı tekrar açmak için sensörü baz istasyonunun şarj portuna takın.

# İpuçları ve Püf noktaları

## **Çorabın Giyilmesi**

Yanlış giydirilen çorapların bebeğiniz için rahatsız edici olabileceğini ve ayağında kırmızı lekeler, morluklar veya su toplamaları oluşturabileceğini lütfen unutmayın. Bebeğin doğru bedende çorap giydiğinden emin olun: Çorabın iyi oturması, ayak parmaklarını veya ayak bileklerini sıkı tutmaması önemlidir. Sağ ve sol çorabı düzenli olarak değiştirmenizi öneririz.

Ayak derisinde kızarıklık görülürse, bu ayakta çorabı kullanmayı bırakın ve kızarıklık tamamen yok olana kadar diğer ayakta uygulayın.

## **Baz istasyonunu nereye yerleştirmeliyim?**

Mavi alarmın gereksiz yere tetiklenmesini önlemek için baz istasyonu, kullanılan Smart Sock Akıllı Çorabın menzili içinde olmalıdır. Bluetooth menzili 30 m'ye kadardır. Baz istasyonu, kırmızı bir alarm durumunda sizi zamanında

bilgilendirme görevine sahiptir, bu nedenle her zaman duyabileceğiniz şekilde yerleştirmenizi öneririz.

## **Alarmlar nasıl test edilir**

### **Kırmızı alarm**

Sensörü baz istasyonundan çıkarın ve takibi açık bırakın. Üç bip sesi duyana kadar baz istasyonu butonuna basılı tutun ve ardından bırakın. Sesi duraklatmak için baz istasyonu butonuna tekrar basın veya uygulamada duraklatın. Cihazı sıfırlamak için, baz ışığı sönene ve bir bip sesi duyana kadar baz istasyonu butonuna basılı tutun. Ardından baz istasyonunu tekrar açmak için basın.

### **Mavi alarm**

Sensörü baz istasyonundan çıkarın ve takibi açık bırakın. Sensörü tutun ve baz istasyonundan uzaklaşın.

### **Sarı alarm**

Sensörü baz istasyonundan çıkarın ve takibi açık bırakın. Smart Sock Akıllı Çorabı, cihaz okuyana kadar

bir çocuğun ayağına veya bir yetişkinin parmağına yerleştirin. Ardından çorabı çıkarın ve bir süre bekleyin. Bu 60 saniye kadar sürebilir.

## **Wi-Fi ağından baz aracılığıyla bağlantı nasıl kesilir?**

Sensörü baz istasyonundan çıkarın. Güç kablosunu baz istasyonuna takarken baz istasyonu düğmesine basılı tutun. Baz ışığı turuncuya dönene ve dört bip sesi duyana kadar baz düğmesine basılı tutun. Ardından baz düğmesine üç kez basın. İstasyonunun altındaki Wi-Fi ışığının kapalı olduğundan emin olun.

## **Evde huzursuzluk mu yaşıyorsunuz?**

Çocuğunuza her durumda bakmaya çalışıyoruz ama bazen o kadar sallanıyor ki sensör gerekli verileri alamıyor. Bu durumda uygulamada sallanan ayaklar belirir. Hareket, elde edilen verilerin kalitesini etkiler, bu nedenle gereksiz uyarılar yerine, kalite değerleri tekrar bulunana kadar tarama ve uyarılar bir süre duraklatılır.




## **Smart Sock Akıllı Çorap çocuk kıyafetlerinin altında çalışır mı?**

Smart Sock Akıllı Çorap, pijama, sargı ve çorapların altına rahatça sığacak şekilde tasarlanmıştır ve bebeğin rahatsız edilmeden uyumasını sağlar.

## **Uygulama erişim paylaşımı**

Owlet, uygulamaya erişimi paylaşmak için birden fazla hesap ekleme yeteneği üzerinde çalışmaktadır. Şimdilik, uygulamayı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak istiyorsanız, onlara hesap giriş bilgilerinizi vermeniz yeterlidir.

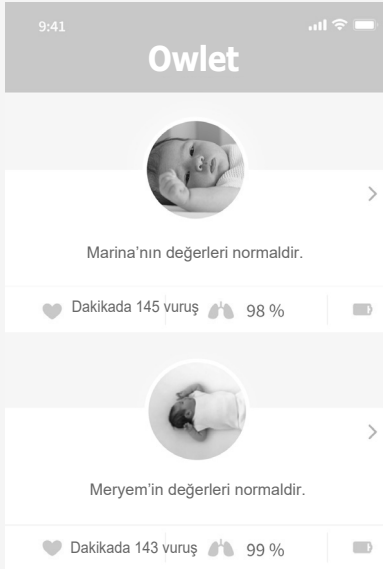

### ***Daha fazla çocuk mu? Sorun yok!***

Owlet, birkaç alt profilin oluşturulmasını destekler ve her bir çocuğa herhangi bir cihaz atar. Alarm durumunda herhangi bir karışıklık olmaması için her çocuğun kendi Smart Sock Akıllı Çorabı ve baz istasyonu olduğundan emin olun.

### ***Baz istasyonu parlaklığı***

Baz İstasyonu, bir ortam ışığı sensörü ile donatılmıştır ve odadaki ışığa göre ışığının parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

### ***Yardım ve Destek Merkezi***

Uygulamada, Hesap> Yardım ve Destek'e gidin ve uygulama içi sohbet, e-posta, telefon ve [www.owletcare.com.tr](http://www.owletcare.com.tr) aracılığıyla müşteri hizmetleri ekibimize iletişime geçin.

### ***Smart Sock Akıllı Çorap saklama***

Smart Sock Akıllı Çorap sensörü, uzun süre dayanacak bir pil içerir. Pil tamamen biterse sensör zarar görür.

*Smart Sock Akıllı Çorap sensörünü kaydetmek için 6 adım:*

- 1. Sensörü tamamen şarj edin.**
- 2. Sensörü baz istasyonundan çıkarın.**
- 3. Çorabı kapatmak için sayfa 20'deki talimatları izleyin. Baz**
- 4. istasyonunu güç kaynağından ayırın.**
- 5. Sensörü, baz istasyonunu, kabloları, fişi ve Smart Sock Akıllı Çorabı serin ve kuru bir yerde saklayın.**
- 6. Sensörü her 6 ayda bir yeniden şarj edin ve ardından 1-5 arasındaki adımları tekrarlayın.**

# Smart Sock / Akıllı Çorap Tanıtımı

Owlet Smart Sock™ 3, bebeğinizin yaşamsal belirtilerini takip etmek için iki sensör kullanır.




Beden 1

Beden 2



## Çorap Sensörleri

Sensör, bebeğinizin kalp atış hızını ve oksijen seviyesini algılar.

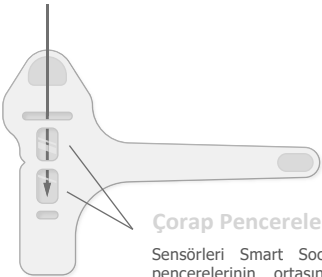

## Çorap Pencereleri

Sensörleri Smart Sock pencerelerinin ortasına hizalayın.



## Birbiri ile Değiştirilebilir Çorap

Owlet Smart Sock, sağ ve sol ayağa giyilebilir. Sensorün ayağın dış tarafına baktığından ve küçük parmağın arkasında olduğundan emin olun, ancak o zaman çorap doğru şekilde oturacak ve gerekli verileri elde edebilecektir.




## Sağ ayak

Akıllı çorap, ayağın üst kısmında şişkinlik gösterir.



## Sol ayak

Akıllı çorap, ayağın alt kısmında şişkinlik gösterir.

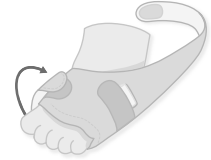

## Çorabın Giyilmesi

**Çorabı çok fazla sıkmayın.** Kayış bağlantı noktasını aşarsa, daha küçük bir çorap boyutu deneyin.



# Baz İstasyonu Tanıtımı

Baz İstasyonuna bir bakışta bebeğinizin durumunu görün

## Çorap Işığı

Yeşil ışık, çorabın Baz İstasyonuna bağlı olduğunu gösterir.

## Kayıt

Ürünü kurarken uygulamaya sizden bu düğmeye bir kez basmanız isteyecektir.

## Wi-Fi Işığı

Yeşil ışık, Baz İstasyonun bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunu gösterir.

## Açık / Kapalı


Baz İstasyonunu kapatmak için butona basıp bırakın. Baz İstasyonu bip sesi çıkarır ve ışık söner.

## Durum Işığı

Işık halkası bebeğinizin durumu hakkında sizi bilgilendirir. Ayrıntılar için uygulamaya bakın.

## Loş Işıklar

Butona basılı tutarak aydınlık gündüz modu ile loş gece ışığı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

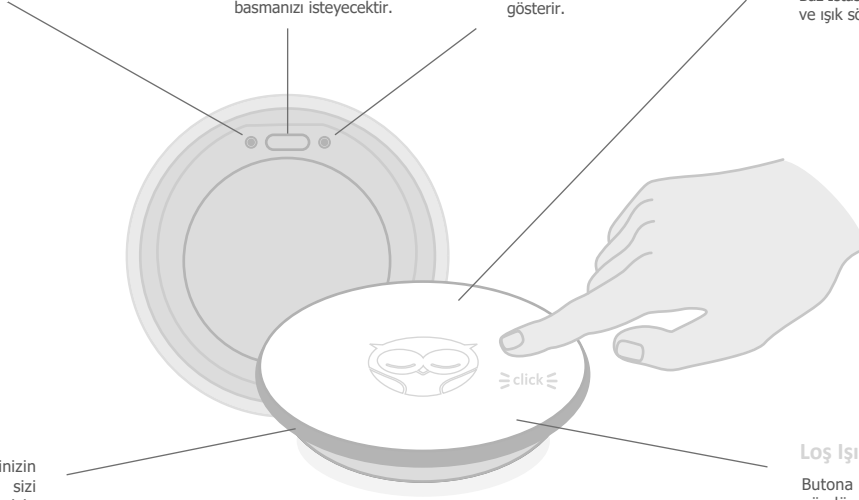

# Baz istasyonu ışıklarının renkleri

Baz istasyonu, farklı durumları belirtmek ve sesli uyarılar vermek için beş renkte yanabilir. Örnekleri dinlemek için uygulamaya gidin.


## Durum



**Yanıp sönen yeşil ışık**  
Kalp atış hızı ve oksijen seviyelerinin ilk ölçümü




**Yavaşça yanıp sönen yeşil ışık**  
Kalp atış hızı ve oksijen seviyeleri belirlenen aralıktadır.

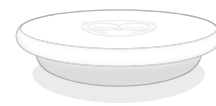


**Beyaz ışık**  
Smart Sock akıllı çorap bağlı ve şarj oluyor.

## Alarmlar




**Yanıp sönen kırmızı ışık**   
Kalp atış hızı veya oksijen seviyesi belirlenen aralık dışındadır.



**Yanıp sönen mavi ışık**   
Smart Sock akıllı çorabın, baz istasyonu ile bağlantısı kesildi.



**Yanıp sönen sarı ışık**   
Smart Sock akıllı çorap ayakta çıkmış, yanlış takılmış veya hareket ettirilmiştir.


# Başıyoruz

1

Mikro USB'yi kullanarak Smart Sock elektroniğini Baz İstasyonuna takın.

2

Baz İstasyonunu prize takın. Smart Sock şarj olmaya başlayacaktır.

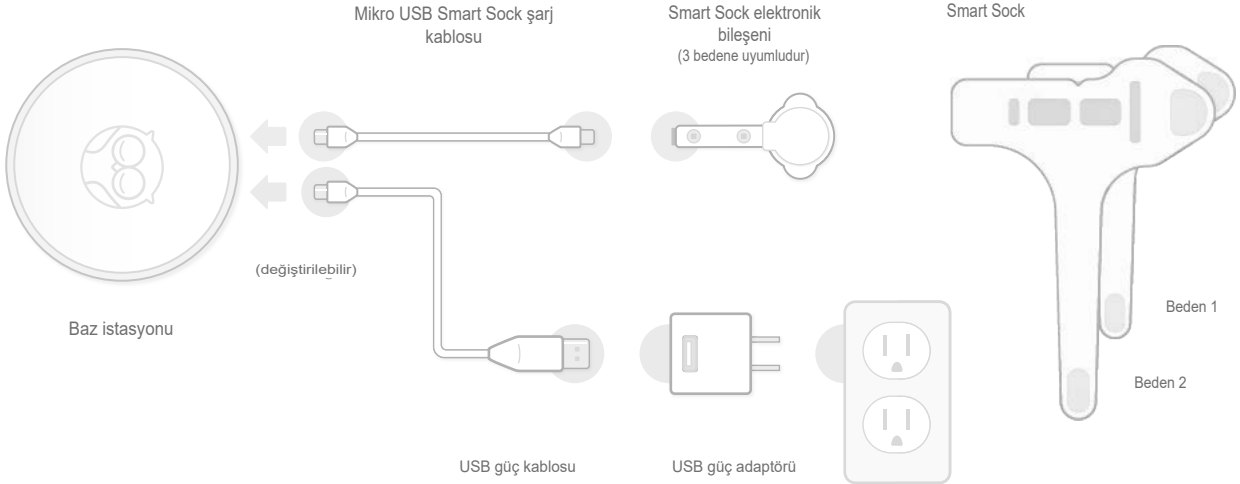


3

Owlet uygulamasını indirin ve Smart Sock™ akıllı çorabınızı ve baz istasyonunu kurun.

4

Owlet bebek monitörü sayesinde tekrar huzur içinde uyuyabilirsiniz. Baz istasyonunu birincil bildirim sistemi olarak, uygulamayı da ikincil olarak kullanın.

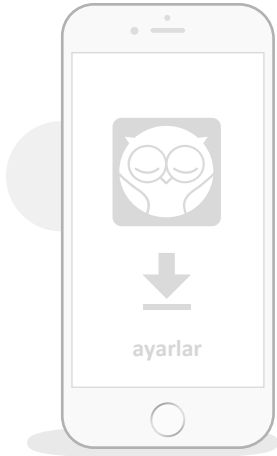

Owlet Uygulaması



Owlet Uygulaması

## **Memnuniyet garantisi**

Her Owlet ürünü 14 günlük huzurlu uyku garantisi kapsamındadır. Üründen %100 memnun kalmazsanız, satın aldığınız ürünü 14 gün içinde iade edebilirsiniz.

# Problem çözme

İlk kurulum | İletiler | Bağlantı

## İlk Kurulum

Problem	Sebepler	Çözümler
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kurulum sırasında Smart Sock 3 Wi-Fi ağını göremiyorum.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baz İstasyonu açık değil.</li><li>■ Zaten Smart Sock 3 Wi-Fi ağına bağlı.</li><li>■ Baz İstasyonu menzili dışında.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baz İstasyonunu prize takın.</li><li>■ Baz İstasyonunun altındaki Wi-Fi ışığının yandığından emin olun. Öyleyse, bu adımı atlayın ve uygulamada hesabınızı oluşturmaya devam edin.</li><li>■ Baz İstasyonunu Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Owlet uygulamasında ev Wi-Fi ağıımızı göremiyorum.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Yönlendiriciniz 5 GHz frekans bandını kullanır (Owlet yalnızca 2,4 GHz bandını destekler).</li><li>■ Gizli bir yönlendiriciye sahip olmuş olabilirsiniz.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ iOS cihazınızın bir 2,4 GHz ağına bağlı olduğundan emin olun (çoğu 5 GHz yönlendirici, 2,4 GHz ağı da destekler).</li><li>■ Gizli yönlendiricilerle ilgili talimatlar için <a href="http://www.owletcare.com.tr">www.owletcare.com.tr</a> adresine gidin.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baz İstasyonu ev Wi-Fi ağımıza bağlanamıyor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hatalı parola</li><li>■ Baz İstasyonu, Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı dışında.</li><li>■ Ev Wi-Fi ağıımız kapalı.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ağıımızın şifresini kontrol edin.</li><li>■ Kurulmadan önce baz İstasyonunu yönlendiriciye daha yakın bir yere yerleştirin ve bitliğinde çocuk odasına geri götürün.</li><li>■ Telefonunuzu yeniden başlatmayı ve Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin.</li><li>■ Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Smart Sock bağlantısı kesildiğinde Baz İstasyonu beyaz renkte yanar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Yazılım güncellemesi devam ediyor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Güncelleme tamamlanana kadar Smart Sock'u tekrar istasyona bağlayın.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baz İstasyonu, Owlet hesabımla eşleştiremiyorum.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baz İstasyonu ve iOS aygıtınız aynı Wi-Fi ağına bağlı değil.</li><li>■ Küçük Kayıt düğmesini basılı tutun</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baz İstasyonunun ve iOS cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu doğrulayın.</li><li>■ Baz İstasyonunun altındaki küçük Kayıt düğmesine basıp bırakın (basılı tutmayın) ve Owlet hesabınızı tekrar eşleştirmeye denemeden önce birkaç saniye bekleyin.</li><li>■ iOS cihazınızı, baz İstasyonunun bağlı olduğu aynı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın.</li></ul>

\* Teknik desteğe mi ihtiyacınız var?

Bize [owletcare.tr@certus-mercatus.com](http://owletcare.tr@certus-mercatus.com) adresinden veya 0216 504 15 44 numaralı telefonun Pazartesi - Cuma 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşın.

## Bildirimler

Problem	Sebepler	Çözümler
■ Baz İstasyonu mavi renkte yanıp sönüyor ve ses çıkıyor.	■ Baz İstasyonu, Smart Sock'un erişemeyeceği bir yerde. ■ Elbeveynin veya bebeğe bakan diğer kişinin vücudu, Smart Sock ile Baz İstasyonu arasındaki bağlantıyı engeller. Bu genellikle yedirdiren, bezini değiştiren, sarıma vb. sırasında olur. ■ Düşük veya bitmiş pil	■ Baz İstasyonunu Smart Sock'a daha yakın yerleştirin. ■ Bebeğin pozisyonunu değiştirin veya yedirdiren, bebek bezini değiştiren, sarırtken vb. durumlarda takip sistemini kapatmayı düşünün. ■ Smart Sock'u şarj edin.
■ Baz İstasyonu kırmızı renkte yanıp sönüyor ve ses çıkıyor.	■ Düşük veya yüksek kalp atış hızı ■ Düşük oksijen seviyesi ■ Smart Sock ayağa tam oturmuyor.	■ Bebeğin ayağının dış tarafındaki sensörün dış çizgisinin, küçük parmağın 1-2 mm arkasında olduğundan emin olun. ■ Smart Sock'un ayağa tam oturduğundan emin olun (oturmamışsa, akıllı çorap verileri almakta zorlanacaktır. Hatalı bildirimler olabilir.) ■ Sensörlerin kumaş çorap pencerelerinde hizalandığından emin olun. ■ Farklı boyutta bir çorap kullanmayı düşünün.
■ Baz İstasyonu sarı renkte yanıp sönüyor ve ses çıkıyor.	■ Veri alma sorunları ■ Smart Sock doğru giyinmemiş. ■ Odadaki ışık çok parlak.	■ Farklı boyutta bir çorap kullanmayı düşünün. ■ Smart Sock'un ayağa tam oturduğundan emin olun (oturmamışsa, akıllı çorap verileri almakta zorlanacak ve daha fazla hatalı bildirimler olacaktır.) ■ Sensörlerin kumaş çorap pencerelerinde hizalandığından emin olun. ■ Odadaki ışığı azaltın.

## Bağlantı

Problem	Sebepler	Çözümler
■ Baz İstasyonu internete bağlı değil.	■ Baz İstasyonu, Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı dışında. ■ Ev Wi-Fi ağı kapalı.	■ Baz İstasyonunu ve Wi-Fi yönlendiricisini birbirine daha yakın yerleştirin (Wi-Fi amplifikatörleri ve diğer yönlendiriciler sorunu çözmez). ■ Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın.
■ Smart Sock şarj olmuyor.	■ Smart Sock tam olarak bağlı değil. ■ Smart Sock sıfırlanmıştır.	■ Bip sesi duyana ve ışık yeşil renkte yanıp sönmeye başlayana kadar şarj edin. ■ Smart Sock'un elektronik bileşenini kapatıp tekrar açın.
■ Kalp atış hızı ve oksijen seviyeleri yerine çizgiler görünüyor.	■ Smart Sock, güvenilir veriler elde etmeye çalışıyor. ■ Bebek ayağını çok fazla hareket ettiriyor. ■ Kötü giyilmiş Smart Sock ■ Ayağa kötü oturan kumaş çorap	■ Sensörlerin kumaş çorap pencerelerinin ortasında hizalandığından emin olun. ■ Cihazın düzgün çalışmasını engelleyebileceği için çocuğunuzu sallanan beşiğe veya titreşimli yatağa yerleştirmeyin. ■ Smart Sock'un doğru şekilde takıldığından emin olun. ■ Uygun boyutta kumaş çorap kullandığınızdan emin olun.

# Sağlıklı bir uyku ortamı için ipuçları

Bebeğiniz için sağlıklı ve güvenli bir uykunun nasıl sağlanacağına dair birkaç ipucunu sizinle paylaşmak istiyoruz.

- Bebek beşikte yalnız ve sırt üstü yatmalıdır. Yan ya da yüzüstü uyumak bebekler için güvenli değildir.
- Bebeğiniz için geçerli güvenlik standartlarını karşılayan bir bebek karyolası alın. Ayrıca, beşiğe tam oturan sert bir yatak alın ve üzerini tam oturan bir çarşafıa örtün.
- Beşiğe yumuşak, gevşek veya kabarık nesnelere koymayın. Buna yastıklar, battaniyeler, beşik örtüleri, peluş hayvanlar, oyuncaklar ve diğer yumuşak eşyalar dahildir.
- Klasik battaniye yerine giysi olarak bağlanabilen bebek battaniyesi veya bebeğinizi sıcak ve güvende tutacak benzeri bir battaniye kullanın.
- Bebeğinizle aynı odayı paylaşın ama yatağı paylaşmayın. Bebeğinizin yatağının yanında ayrı bir yatakta yatmalıdır. Bu, beslemeyi daha güvenli ve daha kolay hale getirecektir. Bebek sizinle yatarsa Smart Sock düzgün çalışmayacaktır. Vücudunuz çorabın kablolu sinyali engelleyebilir.
- Bebeğinizle yatağınızda, kanepenizde veya koltuğunuzda yatmadığınızdan emin olun.
- Bebeğinizin yetişkin veya çocuk yatakları, kanepeler, koltuklar, su yatakları, yastıklar, minderler, battaniyeler, kürkler ve benzeri eşyalar gibi yumuşak yüzeylerde uyumasına asla izin vermeyin.
- Bebeği desteklemek, tutmak veya dönmelerini önlemek için yastıklar, konumlandırma takozları veya sabitleme pedleri kullanmayın.
- Bebeğin aşırı ısınmadığından emin olun. İnce pijamalar giydirin ve oda sıcaklığını yetişkinler için uygun halde tutun.
- Öğlen ve akşam uykusu sırasında bebeğe emzik vermeyi düşünün. Bebeklere ancak 3-4 haftalık olup, emmeye alıştıktan sonra emzik verin.
- Bebeğinizi önemseyen herkese bu güvenli uyku ilkelerini öğretin!



# Garanti Bilgileri

## OWLET SMART SOCK 3

Owlet, Owlet Smart Sock™ 3 ürününün, satın alma belgesinde belirtilen satın alma tarihinden itibaren bir (2) yıllık bir süre boyunca normal kullanım ve hizmet koşulları altında malzeme ve işçilik açısından sorunsuz olacağını garanti eder.

## Güvenlik Bilgisi

**Owlet Smart Sock ve Owlet uygulamaları çocuk bakımına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve sorumlu bir yetişkinin gözetimi olmadan değiştirilmesi veya kullanılması amaçlanmamıştır.**

Owlet Smart Sock 3, sağlıklı çocuklar için tasarlanmıştır bu nedenle Owlet Smart Sock 3'te alarm tetikleme eşikleri, tıbbi monitörlerdeki kadar katı değildir.

- Owlet Smart Sock 3'ü teşhis aracı olarak kullanmayın.
- Doktorunuz bir hastane nabız oksimetrosi kullanmanızı öneriyorsa, Owlet Smart Sock 3 ürünü kullanmayın.
- Doktorunuz size bir hastane solunum monitörü kullanmanızı öneriyorsa, Owlet Smart Sock 3 ürünü kullanmayın.
- Owlet Smart Sock 3'ü tehlikeli uyku alışkanlıklarına bahane olarak kullanmayın.

## BU KULLANIM TALİMATLARINI OKUYUN

Kullanım kılavuzunda, Owlet Smart Sock 3'tün doğru şekilde nasıl kullanılacağına ve bakımına ilişkin birçok yararlı ipucu bulacaksınız. Bazı sorunların çözümleri için Sorun Giderme bölümüne bakın. Önce sorun giderme ipuçlarını okursanız, yardım için bizimle iletişime geçmeniz gerekmez. Ürünü kurma ve kullanma hakkında tam bilgi için [www.owletcare.com.tr](http://www.owletcare.com.tr) adresine gidin.

## GÜVENLİK BİLGİLERİNİ OKUYUN

Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu kılavuzda ve Owlet Baby Care uygulamasında birçok önemli güvenlik talimatı bulacaksınız. Her zaman tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.



**Bu çalışma talimatlarındaki bu sembol, önemli güvenlik bilgilerini gösterir!**

Tüm güvenlik bilgilerini bir uyarı sembolü ve "TEHLİKE", "UYARI", "DİKKAT" veya "İKAZ" kelimeleri izleyecektir. Bu kelimeler şu anlama gelir:

TEHLİKE = Önlenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek ani tehlikeli durum.

UYARI = Önlenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durum.

DİKKAT = Önlenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek ani tehlikeli durum.

İKAZ = Maddi hasar gibi kişisel yaralanma dışında sonuçlara yol açabilecek tehlikeli durum.

## UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



**UYARILAR: Smart Sock 3 tıbbi bir cihaz değildir.** Owlet Smart Sock 3, çocuğunuzun kalp atış hızı veya oksijen seviyesi belirlenen aralık dışındaysa sizi uyaracaktır. Owlet Smart Sock 3 tıbbi bir cihaz değildir. Smart Sock 3:

- Herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı teşhis etmek, tedavi etmek, hafifletmek, izlemek veya önlemek için tasarlanmamıştır.
- Vücudun işlevini veya yapısını etkilemez.
- Kimyasalların etkisiyle birincil amaçlanan amaçlarına ulaşmaz.
- Ani bebek ölümlü sendromunu (SIDS) engellemez.

Bu kullanım talimatlarının birincil amacı şunlardır: Kullanıcıya Owlet Smart Sock 3'nin doğru kurulumu ve kullanımı için temel talimatlar ve öneriler sağlamak, Owlet Smart Sock 3'nin özelliklerini, çalışmasını, güvenlik önlemlerini, bakımını ve sorun gidermeyi açıklamaktır. Bu Smart Sock 3'yi kullanacak veya ayarlayacak herkesin, Owlet Smart Sock 3'yi doğru şekilde nasıl kullanacaklarını anlamak ve bu talimatları takip etmek için kullanım talimatlarını dikkatlice okuması önemlidir.

Bu talimatları anlamadıysanız, lütfen e-posta adresinden bizimle hemen iletişime geçin: owletcare.tr@certus-mercatus.com veya telefon numarası 0216 504 15 44, Pazartesi - Cuma 09:00 - 18:00.

## SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN



- **KABLO BOZULMA RİSKİNİ İÇERE BİLECEĞİNDEN, BAZ İSTASYONUNU DAİMA YATAKTAN EN AZ 1 METRE UZAK TUTUN.**
- **OWLET SMART SOCK 3 SADECE YARDIMCIDIR. Yetişkin Gözetimi Yerine Geçmez.**
- **ERKEN DOĞAN ÇOCUKLAR, OKSİJENLE DESTEKLENEN ÇOCUKLAR VEYA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN OWLET SMART SOCK 3 KULLANMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.**
- **HERHANGİ BİR BİLDİRİM SESİNDE HEMEN HAREKETE GEÇİN.**

## FCC UYGUNLUK BEYANI



Bu ekipmanda, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır. YALNIZCA verilen güç adaptörünü kullanın. Bunun yapılmaması, sınırlı garantimizi geçersiz kılabılır. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınıflarına uygun bulunmuştur.

Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanılır ve yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.



Bu cihaz, yenilik, bilim ve ekonomik kalkınma için istisnasız olarak lisanssız Kanada RSS talimatlarıyla uyumludur. Ekipmanın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olmaz (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek enterferanslar da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansa kabul eder.

**TR Uyarı / Önemli Güvenlik Talimatları, Olası Kullanım Hataları ve İnsan / Çevre Sağlığına Dair Uyarılar**

**UYARILAR: Owlet Smart Sock tıbbi bir cihaz değildir.** Tıbbi bir cihaz olarak kullanılması veya tıbbi bir cihazın yerini alması amaçlanmamıştır. Herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek veya anatomiyi veya herhangi bir fizyolojik süreci incelemek veya değiştirmek amaçlanmamıştır.

Owlet Smart Sock Akıllı Çorap, sağlıklı çocuklar için tasarlanmıştır ve Owlet Smart Sock Akıllı Çorap'taki bildirim eşikleri tıbbi monitörlerdeki kadar katı değildir.

*Şunu aklınızda bulundurun: Bu ürün yalnızca çocuğunuzun durumunu izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve çocuğunuzun bakımının yerini alması amaçlanmamıştır. Çocuğunuzun sağlığı ve esenliğinden ve güvenli uyku, sağlık ve bakım ilkelerine bağlı kalmasından siz sorumlusunuz.*

- Owlet Smart Sock akıllı çorabi teşhis aracı olarak kullanmayın.
- Doktorunuz size bir hastane nabız oksimetresi veya solunum durması monitörü kullanmanızı söylediği takdirde, Owlet Smart Sock ürününü kullanmayın.
- Owlet Smart Sock akıllı çorabi tehlikeli uyku alışkanlıklarına bahane olarak kullanmayın.
- Owlet Smart Sock akıllı çorabi bir yetişkinin bakımı yerine kullanmayın.

**Garanti**

Owlet ürünleriyle gurur duyar. Garantilerimizi web sitesinde bulabilirsiniz: [www.owletcare.com.tr](http://www.owletcare.com.tr)

**Şartlar ve koşullar**

Owlet ürünlerinin kullanımı bu adreste bulunan hüküm ve koşullara tabidir: [www.owletcare.com.tr](http://www.owletcare.com.tr). Owlet ürününü kullanarak bu şartları kabul etmiş olursunuz.

Bölgeniz için iletişim bilgileri:

Certus Mercatus Dış Ticaret A.Ş.

Tel: 0216 504 15 44, E-mail: [owletcare.tr@certus-mercatus.com](mailto:owletcare.tr@certus-mercatus.com)

**Güvenlik**

Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu kılavuzda ve Owlet Baby Care uygulamasında birçok önemli güvenlik talimatı bulacaksınız. Her zaman tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.



**SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN:**

**HERHANGİ BİR BİLDİRİM SESİNDE HEMEN YANIT VERİN.**

**SENSÖRÜN SIVI İLE TEMASINDAN KAÇININ.**



**UYARILAR: BOZULMA RİSKİNİ İÇEREBİLECEĞİNDEN, BAZ İSTASYONUNU DAİMA YATAKTAN EN AZ 1 METRE UZAK TUTUN.**

**OWLET SMART SOCK SADECE YARDIMCIDIR.** Yetişkin Gözetimi Yerine Geçmez.

**ERKEN DOĞAN ÇOCUKLAR, OKSİJENLE DESTEKLENEN ÇOCUKLAR VEYA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN OWLET SMART SOCK KULLANMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.**



Bu ekipmanda, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. YALNIZCA verilen güç adaptörünün kullanın. Bunun yapılmaması, sınırlı garantimizi geçersiz kılabilir. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

**Taşıma ve nakliye hakkında**

Taşıma ve nakliye durumları için orijinal ambalajın saklanması ve taşınmanın ambalajı olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

**IC: 21386-OBL3A (baz istasyonu)**

**IC: 21386-OSS3A (sensör)**

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur ve yenilik, bilim ve ekonomik kalkınma için istisnasız olarak lisanssız Kanada RSS'sine uygundur. Ekipmanın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek enterferanslar da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferans kabul eder.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Owlet Baby Care, Owlet Smart Sock akıllı çorabın 2014/53 / AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki web sitesinde mevcuttur: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2,402-2,480 MHz (çıkış gücü 63 mW)  
Bluetooth tabanı

2,412-2,462 MHz (çıkış gücü 75 mW)  
Baz istasyonu Wi-Fi ağı

2,402-2,480 MHz (çıkış gücü 6,3 mW)  
Bluetooth sensörü



Bu simge, bataryanın ayrıştırılmaması genel kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Son kullanıcı olarak, kullanın ömrünün tamamlayan cihazınızın bataryasını aşağıdaki yöntemlerle çevreye duyarlı şekilde atmak sizin sorumluluğunuzdur:

- (1) ürünü satın aldığınız distribütöre/bayiye iade ederek ya da
  - (2) belirlenmiş bir toplama noktasına bırakarak ya da
  - (3) yerel yönetime iletişime geçerek.
- Kullanım ömrünün sonuna ulaşan bataryaların atılması sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde bir geri dönüştürülme yapılmasını sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen yerel geri dönüşüm merkezi ya da ürünün ilk satın aldığınız bayiye iletişime kurun.

GİRİŞ: 100-240 V~0,2 A 50-60 Hz  
ÇIKIŞ: 5 V, 1 A



800433

UL 62368-1 a CAN/ CSA-C22.2 No  
62368-1 gereksinimlerini karşılar.

ABD Patentleri No.9,693,730 a 10,449,837.  
Bekleyen diğer patentler.



Ürünün garantisi 2 yıl, kullanım ömrü 5 yıldır.

Enerji tasarrufu için, cihaz uzun süre kullanılmadığı  
zaman baz istasyonu fişten çekilmelidir.

### OWLET Müşteri Hizmetleri

Owlet ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz  
varsa ithalatçı ve üretici bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

#### İthalatçı:

Certus Mercatus Dış Tic. A.Ş.  
Küçükbakkalköy Mah., Dudullu Cd. 23-25, R2  
Blok D:177  
34758  
Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0216 504 15 44  
www.owletcare.com.tr  
owletcare.tr@certus-mercatus.com

#### Üretici:

Owlet  
3300 Ashton Blvd, Suite 300  
Lehi, US 84043  
Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732

## **GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI**

- 1 – Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2 – Garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat (tahrifat) yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında yada tahrip (tahrif) edildiğinin tespitiinde garanti geçersiz kılınır.
- 3 – Cihazın montajının yada tamirinin firmamızın yetkili servisleri dışında yapıldığının yada cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 4 – Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
  - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
  - Tüketicieye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
  - Çeşitli sıvı teması durumları.
  - Ürün ev kullanımı için imal edilmiştir. Farklı kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürünün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.
- 5- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

## **TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,
  - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselselen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçilmiş haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı tüketici kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçilmiş haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicieye iade edilir.
- (6) Seçilmiş hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçilmiş haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

# GARANTİ BELGESİ

## İthalatçı firmanın:

Ünvanı: Certus Mercatus Dış. Tic. A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25


Brandium Residence R2 Blok D:177 İstanbul/Ataşehir

Tel – Faks: +90 216 900 14 99 +90 216 504 15 44

Eposta: info.tr@certus-mercatus.com

Yetkili kişi: Miroslav Kaspar

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:

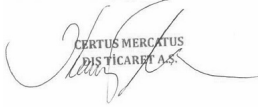  
CERTUS MERCATUS  
DİŞ TİCARET A.Ş.

## Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel – Faks:

Eposta:

Yetkili kişi:

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:

Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:

Fatura tarihi:

Teslim tarihi ve yeri:

Malın:

Cinsi: Akıllı çorap

Markası: Owlet

Modeli: Smart Sock 3, Smart Sock Plus

Seri numarası:

Garanti süresi: 2 Yıl

Azami tamir süresi: 20 gün

**Güncel servis bilgileri için 0216 313 14 14 numaralı telefonun aranmasını rica ederiz.**

<b>Firma Adı</b>	<b>Firma Adresi</b>	<b>Hizmet Yeri / İL</b>
<b>HTS TEKNİK HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş</b>	<b>MECLİS MAH. SEMİH SANCAR CAD. NO:11/A SANCAKTEPE / İSTANBUL</b>	<b>İSTANBUL</b>
Gemci Klima-Ahmet Gemci	Adnan Menderes Bulvarı Beyza Apt. Altı No:35 / Onikişubat Kahramanmaraş	KAHRAMANMARAŞ

