

Dream Sock™

Kullanım Kılavuzu

Owlet Baby Care Müşteri Desteęi
Ücretsiz Telefon: +1 (844) 334-5330
E-posta: contact@owletcare.com
Sohbet: owletcare.com/chat

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr. Suite 203
Lehi, UT 84043 ABD
+1 (844) 334-5330
www.owletcare.com

Yayın Tarihi: 17.09.2024

1. Genel Bilgiler	7
1.1 Üretici Bilgileri	8
1.2 Basılı Kılavuzu Talep Etme	9
2. Güvenlik Bilgileri	10
2.1 Güvenlik Sembolleri	10
2.2 Uyarılar	11
2.3 Dikkat Uyarıları	13
3. Dream Sock'ı Kullanmadan Önce	16
3.1 İlk Kullanımdan Önce	16
3.2 Dream Sock'ı Kimler Kullanmalı?	17
3.3 Dream Sock'ı Kimler Kullanmamalı?	17
3.4 Dream Sock'ı nerede kullanabilirsiniz?	17
3.5 Ağ Gereksinimleri	18
4. Dream Sock'a Genel Bakış	18
4.1 Dream Sock Nedir?	18
4.2 Kutunun Açılması	19
4.3 Baz İstasyonuna Genel Bakış	21
4.3.1 Baz İstasyonu Yedek Pili	23
4.4 Sensöre Genel Bakış	23
4.5 Sock'a Genel Bakış	25
4.6 USB Güç Kablosu ve USB Fişine Genel Bakış	26
5. Dream Sock Kurulumu	26
5.1 Baz İstasyonuna Yer Bulma	26

5.2 Owlet Dream App Kurulumu.....	28
5.3 Owlet Sağlık Bildirimleri.....	31
5.4 Owlet Dream App'i ve Dream Sock'ı Birden Çok Profille Kullanma	33
6. Dream Sock Nasıl Kullanılır?	33
6.1 Sock Bedeni, Uyumu ve Yerleşimi	33
6.1.1 Cilt Tahrişi.....	39
6.2 Baz İstasyonunun Durumu ve Kontrol Edilmesi	41
6.3 Ölçüm ve Bildirimleri Alma	42
6.3.1 Bildirim Rengi Referans Tablosu	42
6.3.2 Bildirim Tanımları.....	44
6.3.3 Bildirimleri Erteleme.....	45
6.4 Dream Sock'ı kapatma	45
6.4.1 Aşırı hareket	45
6.4.2 Dream Sock'ı kapatma	46
6.5 Sensörü Şarj Etme	46
6.6 Dream Sock'ın kullanımına ne zaman son verilmeli?.....	47
7. Owlet Dream App'i Kullanma.....	47
7.1 Dream Sock ile Uykuyu İzleme	47
7.2 Sağlık Bildirimleri: Owlet Canlı Kalp Atış Hızı ve Oksijen Seviyesi Gösterimleri.....	48
7.2.1 Kalp Atış Hızı	49
7.2.2 Oksijen Seviyeleri	50
7.3 Uyku Durumu Göstergeleri.....	52
7.4 Owlet Dream App'teki Sekmeler	52
7.5 Geçmiş ve Seans Ayrıntılarını Anlama.....	53

7.5.1 Oksijen ve Kalp Atış Hızı Geçmişini Kullanma	55
7.6 Sensör pil seviyesi.....	57
8. Güvenli Bir Uyku Ortamına Yönelik İpuçları.....	60
8. Temizlik.....	61
8.1 Sock'ın ve Sensörün Temizlenmesi	61
8.2 Sock'ı veya Sensörü Ne Zaman Değiştirmelisiniz?	64
8.3 Baz İstasyonunun Temizlenmesi.....	65
9. Bakım	65
9.1 Sensör Pilinin Bakımı	65
9.2 Baz İstasyonu Pilinin Bakımı	65
9.3 Bildirim Sinyalinin Oluşturulmasının Test Edilmesi	66
9.4 Sensörün Kapatılması ve Açılması	66
9.5 Sensörün Eşleşmesini Kaldırma	67
9.6 Sensörünüzü Eşleştirme	67
10. Saklama ve Bertaraf.....	68
10.1 Saklama	68
10.2 Kişisel Verileri Temizleme	69
10.3 Bertaraf.....	71
11. Sorun Giderme	71
12. Elektromanyetik Uyumluluk.....	74
12.1 Elektromanyetik Uyumluluk	74
12.2 Emisyonlar.....	74
12.3 Bağışıklık.....	75
13. Garanti Bilgileri	76

13.1 Sınırlı Garanti	76
13.2 Memnuniyet garantisi	77
14. Servis ve Destek	77
14.1 Doktorunuzla Ne Zaman İletişime Geçmelisiniz?	77
14.2 Müşteri Desteği	77
15. Teknik Bilgiler	78
15.1 Tepe Dalga Boyları ve Maksimum Optik Güç Çıkışı	78
15.2 Veri İşleme Gecikmesi.....	78
15.3 Veri Güncellemesi	79
15.4 Alarm Durumu Gecikmesi (Olaydan alarm durumuna kadar geçen süre).....	79
15.5 Alarm Sinyali Oluşturma Gecikmesi (Alarm durumundan alarm sinyaline kadar geçen süre)	80
15.6 SpO2 ve Kalp Atış Hızı Görüntüleme Aralıkları ve Performansı	80
15.7 Ekipman Sınıflandırması	81
15.8 Güç.....	82
16. Çalışma Teorisi	82
16.1 Pulse Oksimetre Teorisi	82
16.2 Kalibrasyon Gerekmez	83
16.3 Fonksiyonel Oksijen Doygunluğu	84
16.4 Fonksiyonel Test Cihazlarının Kullanımı	84
16.5 Klinik SpO2 Doğruluk Çalışma Raporu Özeti.....	84
17. Siber Güvenlik Bilgileri.....	87
17.1 Güvenli Erişimin Sağlanması	87
17.2 Hizmetin Kullanılamaması	87
17.3 Siber güvenlik olaylarının tespit edilmesi	88

17.4 Cihazınızı güncel tutma.....	88
17.4.1 Owlet Dream App Güncellemeleri	88
17.4.2 Ürün Yazılımı Güncellemeleri	88
17.4.3 Güvenlik güncellemeleri.....	89
18. Biyouyumluluk	89
19. Klinik Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri.....	90
19.1 Beklenen Klinik Performans ve Faydalar	90
19.2 Güvenlik Bilgileri.....	91
20. Semboller Sözlüğü.....	93

1. Genel Bilgiler

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuzda Dream Sock'ın nasıl kurulacağı ve kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu kılavuzda Owlet Dream Sock'a ilişkin önemli güvenlik bilgileri yer almaktadır ve bu bilgilerin tamamı okunmalıdır. Diğer geçerli güvenlik uyarıları, dikkat edilecek noktalar ve notlar bu kılavuzda gerekli yerlerde bulunmaktadır.

Dream Sock'ı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

Cihazın doğru kullanılmasını sağlamak için bu kılavuzda yer alan talimatları dikkatli bir şekilde uygulayın. Sorularınız varsa Owlet müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Dream Sock'ın Kullanım Amacı

Dream Sock, oksijen doygunluğunu (SpO2) ve kalp atış hızını (PR) ölçerek sağlıklı bebeklerin evde rutin olarak izlenmesi için tasarlanmıştır. Dream Sock yazılımı, fotopletismografi verilerini analiz ederek bebeğin PR ve/veya SpO2 değerinin önceden ayarlanmış aralığın dışına çıktığı durumları tespit eder ve bakım verenlere bebeği değerlendirmesi için bir bildirim verir.

Bildirimlerin ve ilişkili verilerin amacı, bakım verenlerin bebeğin tıbbi bakımıyla ilgili daha fazla yardıma başvurma kararını desteklemektir. Bu özellik, geleneksel tanı ve/veya tedavi yöntemlerinin yerine geçmesi için tasarlanmamıştır.

Dream Sock'ın Kullanım Endikasyonları

Dream Sock, 0-18 aylık ve ağırlığı 2,5-13,6 kg arasında olan sağlıklı bebekler/çocuklar için ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha önce kronik kardiyovasküler ve/veya solunum yolu rahatsızlığı tanısı konmuş bebeklerde kullanıma uygun değildir.

Dream Sock, ölçülen SpO2 seviyeleri %80'in altına düştüğünde hipoksinin tespit edilmesi ve bildirilmesinde ve PR seviyeleri 220 atış/dakikanın (BPM) üzerinde ölçüldüğünde taşikardi veya 50 BPM'nin altında ölçüldüğünde bradikardinin tespit edilmesi ve bildirilmesinde endikedir.

©Owlet Baby Care, Inc. 2024

Owlet® ve Dream Sock®, Owlet Baby Care, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde tescilli ticari markalarıdır.

Android, Android logosu ve Google Play markası Google LLC'nin mülkiyetindedir.

Apple, iPhone ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ticari markaları/hizmet markalarıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

1.1 Üretici Bilgileri



Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr. Suite 203
Lehi, UT 84043 ABD
www.OwletCare.com

UKRP

OBELIS UK LTD Sanford Gate,
East Point Business Park,
OX4 6LB - Oxford, Birleşik Krallık



MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street,
First Floor London, W1W 7LT
Birleşik Krallık

**UK
CA
0086**


CE
2797



OBELIS S.A Bd. Général Wahis,
53 1030 Brüksel, Belçika



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 22 - Suite 123
2595 AM Lahey
Hollanda

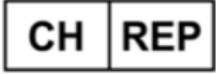

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
İsviçre



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
İsviçre.

1.2 Basılı Kılavuzu Talep Etme

Bu kılavuzun basılı bir kopyasını istiyorsanız lütfen Owlet Baby Care Müşteri Desteği birimine e-posta göndererek Dream Sock kılavuzunun basılı bir kopyasının size gönderilmesini talep edin. Talep edilmesi halinde Owlet, 7 takvim günü içerisinde basılı bir kopya sağlayacaktır.

Owlet Baby Care Müşteri Desteği birimine şu adresten e-posta gönderebilirsiniz: contact@owletcare.com

2. Güvenlik Bilgileri

Bu bölümde önemli bilgiler yer almaktadır. Bu bölümün tamamını okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa teknik destek veya müşteri desteği birimiyle iletişime geçin. İletişim bilgileri için [Bölüm 14](#)'e bakın.

Cihazın kullanımı sırasında ciddi bir sağlık ve güvenlik olayı meydana gelmesi durumunda lütfen derhal müşteri desteği birimiyle ve coğrafi bölgenizdeki yetkili makamla iletişime geçin.

2.1 Güvenlik Sembolleri

Sembollerin tam listesi için [Bölüm 19](#)'a bakın.



WARNING!

Kaçınılmadığı takdirde bebeğin veya Bakım verenin ölümüne ya da ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilecek potansiyel olarak tehlikeli durum uyarısı.



CAUTION.

Kaçınılmadığı takdirde bebeğin veya Bakım verenin hafif ya da orta derecede yaralanmasına veya ekipmana ya da diğer mallara zarar gelmesine neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli durum uyarısı.



NOTE:

Ürün veya belirli bir konu hakkında önemli bilgi verir.

2.2 Uyarılar



UYARI: DREAM SOCK'İ KULLANIM AMACINA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE KULLANIN.



UYARI! Cihazı ve aksesuarlarını daima çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Sensör ve kablolar gibi küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturabilir. Kabloya dolanarak boğulma tehlikesini önlemek amacıyla Baz İstasyonunu bebek yatağından en az 1 metre uzağa yerleştirin.



UYARI! Mobil cihaz uygulamasının birincil bildirim kaynağı olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Birincil bildirim kaynağı Baz İstasyonudur. Baz İstasyonunu her zaman duyabileceğiniz bir mesafede tutun. Baz İstasyonunun ortam gürültüleriyle (ör. gürültülü makineler veya televizyonlar) engellenmeden duyulabildiğinden emin olun. Baz İstasyonunun üzerinin örtülmediğinden emin olun, aksi takdirde alarm sesleri bastırılabilir.



UYARI! ÜRÜNLERİMİZİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK VE ÇOCUĞUNUZUN BAKIMI İÇİN: BİLDİRİM VERİLDİĞİNDE, BİLDİRİME KONU OLAN DURUM ÇÖZÜLSE BİLE DERHÂL YANIT VERİN.



UYARI! Yüksek öncelikli alarmlar sırasında bebeğinizi mutlaka kontrol ederek ortamı değerlendirin ve gerekli işlemleri yapın.



UYARI! DREAM SOCK, YETİŞKİN GÖZETİMİNİN, İYİ EBEVEYNLİK UYGULAMALARININ VEYA GÜVENLİ UYKU UYGULAMALARININ YERİNE GEÇMEZ.



UYARI! Dream Sock, sađlık sorunları olan bebeklerde kullanıma uygun deđildir. Sađlık sorunları olan bebeklerde, Dream Sock'ın ocuđunuz iin uygun olup olmadıđını belirlemek amacıyla ltfen sađlık uzmanınıza danıřın.



UYARI! Dream Sock'ın 18 aydan byk ya da 2,5 kg'dan hafif veya 13,6 kg'dan ađır olan bebeklerde kullanılması uygun deđildir.



UYARI! Bu belgede aıklanan řekilde Dream Sock ile birlikte kullanılmak zere belirtilenler dıřındaki aksesuar, g çevirici ve kabloların kullanılması yanlış lmlere, dřk performansla veya yaralanmaya neden olabilir.



UYARI! Dream Sock sistemi yalnızca tek bebeđin/ocuđun kullanımına uygundur.



UYARI! Banyodan nce Sock'ı ve Sensr ıkarın.



UYARI! Dream Sock'ı cihazla birlikte verilmeyen bařka cihazlara bađlamayın.



UYARI! Dream Sock sisteminin hasarlı paralarını kullanmayı bırakın.



UYARI! Sistemi dođrudan gneř iřıđında, garajda, tavan arasında saklamayın veya sıcak bir arata tařımayın; aksi takdirde Dream Sock sistemi zarar grebilir.



UYARI! Dream Sock, izopropil alkol (IPA) ve diđer temizlik maddeleri dhil olmak zere yanıcı maddelerin bulunduđu ortamlarda kullanılmamalıdır.



UYARI! Kalp Atış Hızı ve Oksijen aralıkları önceden ayarlanmış sabit değerlerdir, değiştirilemez.

2.3 Dikkat Uyarıları



DİKKAT. Dream Sock hareket hâlindeki araçlarda kullanılmak üzere **TASARLANMAMIŞTIR.**



DİKKAT. Performansı etkileyebilecek parazitleri en aza indirmek için kullanım sırasında Sensörü doğrudan güneş ışığından uzak tutun.



DİKKAT. Evde farklı Dream Sock sistemleri kullanan birden fazla bebek varsa karışıklığı önlemek için Sock, Sensör ve Baz İstasyonuna her bir bebeğin adını yazın.



DİKKAT. Dream Sock sisteminin hiçbir bileşenini veya aksesuarları bebeğinizin üzerine düşebilecekleri bir yere **YERLEŞTİRMEYİN.** Yaralanma meydana gelebilir.



DİKKAT. Güvenlik için Owlet Dream App'i her zaman güncel tutun ve mobil cihazınızı parolayla korumaya dikkat edin.



DİKKAT. Sock'ın uyumunu düzenli olarak kontrol edin. Bebeklerin gerçek ayak ölçüleri kılavuz olarak verilen ölçülerden farklı olabilir ve bebekler hızla büyürler. Bebeğiniz en büyük beden Sock'ı bile kullanamayacak kadar büyüdüğünde Dream Sock sistemini kullanmayı bırakın.



DİKKAT. Bebeğiniz yaş ve kilo gerekliliklerini karşılasa bile tüm Sock bedenleri ya çok küçük ya da çok büyükse Dream Sock cihazını kullanmayı bırakın.



DİKKAT. Her 8 saatlik kullanımdan veya Sensörü şarj ettikten sonra Sock'ı diğer ayağa geçirin. Çocuğunuzun ayağını sık sık kontrol ederek ciltte tahriş belirtileri olup olmadığına bakın.



DİKKAT. Ayak deformiteleri Dream Sock performansını etkileyebilir. Ayak deformiteleri nitelik ve şiddet bakımından çok farklılık gösterdiğinden, ayak deformitesi olan bebeklerde kullanmadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.



DİKKAT. Bağlarken bantları **ESNETMEYİN**. Bantların esnetilmesi aşırı sıkıkmaya neden olur ve cildin tahriş olması riskini artırır.



DİKKAT. Sensörü bebeğinizin ayağına Dream Sock kumaş çorap dışında başka bir şey kullanarak **BAĞLAMAYIN**. Bebeğin ayağında yaralanma meydana gelebilir.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü uygulamadan önce ayaklara losyon, krem veya pudra **SÜRMEYİN**. Cilt tahrişini önlemek için uygulama bölgesinin temiz ve kuru olması gerekir.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü ıslak cilde **UYGULAMAYIN**. Aşırı nem ciltte tahriş riskini artırabilir.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü bebeğinize takmadan önce ikisinin de kuru olduğundan ve üzerlerinde kir, saç veya başka yabancı maddeler bulunmadığından emin olun.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü çok sıkı bir şekilde **UYGULAMAYIN**. Uzun süre aşırı basınca maruz kalmak bası yaralanmasına neden olabilir.



DİKKAT. Sensörlü Sock'ın her zaman bebeğin ayağına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Sock'ın kötü yerleştirilmesi cilt tahrişine neden olabilir.



DİKKAT. Cırt cırtlı bağlayıcıların aşındırıcı kısımlarının bebeğin cildine temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde ciltte aşınma meydana gelebilir.



DİKKAT. Cilt tahrişi belirtileri veya çok fazla bildirim alınması, Sock bedeninin ya da yerleşiminin yanlış olduğuna dair bir gösterge olabilir.



DİKKAT. Sensör pencereleri ayaktan uzaklaşıyorsa Sock çok gevşek olabilir. Sock'ı biraz daha sıkmayı deneyin veya daha küçük beden Sock kullanın. Hava boşlukları ölçümlerin aralıklı olmasına neden olabilir.



DİKKAT. Sock'ın ayağa uymaması veya bakımının yapılmaması ciltte yaralanmaya yol açabilir.



DİKKAT. Mobil uygulamada hesabınızdan Çıkış yaparsanız cihazınıza anlık bildirim veya alarm gönderilmez.



DİKKAT. Amonyak, çamaşır suyu veya alkol gibi yakıcı ya da aşındırıcı temizlik maddeleri **KULLANMAYIN**. Sert kimyasal maddeler Sock'a veya Sensöre zarar verebilir.



DİKKAT. Sensörü kesinlikle suya **BATIRMAYIN** veya çamaşır makinesinde **YIKAMAYIN**. Sensör suya dayanıklıdır ve yalnızca silerek temizlenmelidir.



DİKKAT. Muhafazaya herhangi bir sıvı kaçmasını önlemek için temizleme çözeltilerini olabildiğince az miktarda kullanın.



DİKKAT. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, Dream Sock Baz İstasyonunu ve Sensörü tamamen sıfırlar. Cihaz tekrar kurulana kadar ölçüm veya bildirim alamazsınız.



DİKKAT. Cihazın üzerine **OTURMAYIN** veya **BASMAYIN**, aksi takdirde hasar meydana gelebilir.



DİKKAT. Baz İstasyonunu radyo dalgaları yayan cihazların yakınına yerleştirmeyin.



DİKKAT. Dream Sock'a bakım veya onarım işlemi **YAPMAYIN**, cihazı **AÇMAYIN** veya üzerinde değişiklik **YAPMAYIN**.



DİKKAT. Hatalı çalışmaya yol açabileceği için bu ekipmanın diğer ekipmanlarla yan yana veya üst üste kullanılmasından kaçınılmalıdır. Böyle bir kullanım şekli gerekliyse normal çalışıklarını doğrulamak için bu ekipmanın ve diğer ekipmanların gözlemlenmesi gerekir.



DİKKAT. Dream Sock'ı temiz, toz ve kumaş tiftiğinden arındırılmış şekilde ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Cihazın toza, kumaş tiftiğine, evcil hayvanlara veya haşereye maruz kalması cihaza zarar verebilir.



DİKKAT. Dream Sock'ı kullanmadığınız zamanlarda mutlaka düzgün bir şekilde saklayın. Evcil hayvanlar, haşere (böcekler) veya çocuklar cihaza veya aksesuarlara zarar verebilir.

3. Dream Sock'ı Kullanmadan Önce

3.1 İlk Kullanımdan Önce

Dream Sock'ı **ilk kez kullanmadan önce** aşağıdakileri yapın:

- Bu kullanım kılavuzunun tamamını (bu belgeyi) okuyun.
- Uyarıları ve önlemleri anlayın.

- Owlet Dream mobil uygulamasını kurun.
- Sensörü tam olarak şarj edin.

3.2 Dream Sock'ı Kimler Kullanmalı?

Dream Sock aşağıdakilerde endikedir:

- Dream Sock, sağlıklı bebeklerin evde rutin izlemi için uygundur.
- 0-18 ay arası, 2,5-13,6 kg ağırlığındaki çocuklar

Dream Sock, ev ortamında bakım verenlerin kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Cihazın çalıştırılması için gerekli tüm bilgiler kullanım talimatlarında yer almaktadır.

3.3 Dream Sock'ı Kimler Kullanmamalı?

Dream Sock aşağıdakilerde kontrendikedir:

- Devam eden sağlık sorunları olan bebekler ve çocuklar. Sağlık sorunları olan bebekler/çocuklar ile ilgili olarak, bakım verenler Dream Sock'ın bebek/çocuk için uygun olup olmadığını belirlemek üzere bir sağlık uzmanına danışmalıdır.
- Ağırlığı 2,5 kg'ın altında olan bebekler için uygun değildir.
- Ağırlığı 13,6 kg'ın üzerinde olan çocuklar için uygun değildir.
- 18 aydan büyük çocuklar için uygun değildir.
- Bakım verenin denetiminin yerini tutmaz.
- Güvenli uyku uygulamalarının yerini tutmaz.
- Yetersiz perfüzyonu olan bebekler/çocuklar
- Kronik kardiyovasküler ve/veya solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle doktor tavsiyesiyle izlenmesi gereken bebekler/çocuklar

3.4 Dream Sock'ı nerede kullanabilirsiniz?

Dream Sock evde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.



DİKKAT. Dream Sock hareket hâlindeki araçlarda kullanılmak üzere TASARLANMAMIŞTIR.



DİKKAT. Performansı etkileyebilecek parazitleri en aza indirmek için kullanım sırasında Sensörü doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

3.5 Ağ Gereksinimleri

Dream Sock ve Owlet Dream App'i kullanmak için Wi-Fi ağı gerekir. Bu ağ bağlantısı, donanımın mobil cihaz uygulaması ve bulut sunucularla iletişim kurmasını sağlar. Uyku Durumları, Sağlık Bildirimleri ve pil durumu gibi bilgiler ağ üzerinden paylaşılır. Baz İstasyonu güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanamazsa mobil cihaz uygulaması düzgün çalışmaz. WPA2 veya benzer bir şifreleme yöntemi kullanan 2,4 GHz IEEE 802.11 (b/g/n) Wi-Fi ağı gerekir. 5 GHz'de çalışan çoğu ev tipi yönlendirici 2,4 GHz'de de çalışır. Cihazlarınızı bağlarken 2,4 GHz bağlantıyı seçin.

Dream Sock, 8 adede kadar Wi-Fi ağını hatırlayabilmesi sayesinde farklı konumlar arasında (ör. ev, büyükannenin evi, bebek bakıcısı) kolayca taşınabilir.

Kurulumu yapılmış bir cihaza yeni bir Wi-Fi ağı eklemek için Owlet Dream App, Bölüm 5'teki kurulum talimatlarına bakın.
Hesap > Owlet Cihazlarım (Cihaz Seç) > Wi-Fi Ağını Değiştir



NOT: Dream Sock, tarayıcı üzerinden kimlik doğrulaması gerektiren ağlarda kullanılamaz. Bu tür ağlar arasında otel ve havalimanlarında bulunanlar gibi herkese açık ağlar yer alır.

Sensör ve Baz İstasyonu, BLE (Bluetooth® Low Energy) 4.2 üzerinden iletişim kurar. Bu iletişim otomatik olarak gerçekleşir ve ek bir donanım gerekmez.


4. Dream Sock'a Genel Bakış

4.1 Dream Sock Nedir?



UYARI: DREAM SOCK'I KULLANIM AMACINA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE KULLANIN.

Dream Sock Sensörü çocuğunuzun oksijen doygunluğunu (SpO2) ve kalp atış hızını ölçer. Sock, Baz İstasyonuna bağlanır ve bilgiler mobil uygulama aracılığıyla Baz İstasyonundan telefona gönderilir. Uygulama aynı zamanda ipuçları ve gelişimle ilgili bilgiler de sunar. Baz İstasyonu, Sock'tan gönderilen verilere dayanarak gerektiğinde bildirimler gösterir.

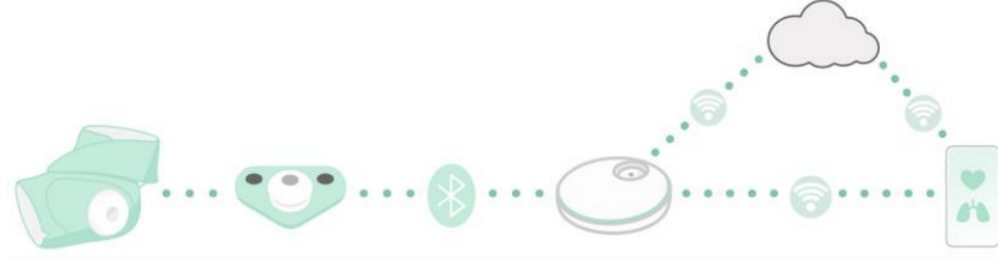

Uygulama nasıl çalışır?

Wi-Fi ağına bağlanma: Baz İstasyonu, Wi-Fi aracılığıyla Owlet bulut sunucusuna bilgi gönderir ve bu verileri cep telefonu uygulamasında görüntüler. Bu özellik, her yerde cep telefonu uygulaması üzerinden gerçek zamanlı ölçümler ve bildirimler alınmasını sağlar. Baz İstasyonu, Sock'ın Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını gösterir.

BLE:

Sensör ve Baz İstasyonu, BLE (Bluetooth® Low Energy) 4.2 üzerinden iletişim kurar. Bu iletişim otomatik olarak gerçekleşir ve ek bir donanım gerekmez.

4.2 Kutunun Açılması

Dream Sock kutusunda aşağıdakiler bulunur:



Dream Sock'ın kullanım ömrü 12 ay olarak belirlenmiştir.

Dream Sock için aşağıdaki yedek parçalar veya sökölüp değiştirilebilen parçalar mevcuttur.

REF Dream Sock Bileşeni için Model Referansı	Bileşen Açıklaması	Bileşen Kullanım Ömrü
20.0177	V3 Kumaş Sock, 1 Beden, Sol - Nane Yeşili	3 ay
20.0178	V3 Kumaş Sock, 1 Beden, Sağ - Nane Yeşili	3 ay
20.0179	V3 Kumaş Sock, 2 Beden, Sol - Nane Yeşili	3 ay
20.0180	V3 Kumaş Sock, 2 Beden, Sağ - Nane Yeşili	3 ay
20.0185	V3 Kumaş Sock, 1 Beden, Sol - Gül Kuruşu	3 ay
20.0186	V3 Kumaş Sock, 1 Beden, Sağ - Gül Kuruşu	3 ay
20.0187	V3 Kumaş Sock, 2 Beden, Sol - Gül Kuruşu	3 ay


20.0188	V3 Kumaş Sock, 2 Beden, Sağ - Gül Kurusu	3 ay
20.0181	V3 Kumaş Sock, 1 Beden, Sol - Mavi	3 ay
20.0182	V3 Kumaş Sock, 1 Beden, Sağ - Mavi	3 ay
20.0183	V3 Kumaş Sock, 2 Beden, Sol - Mavi	3 ay
20.0184	V3 Kumaş Sock, 2 Beden, Sağ - Mavi	3 ay
OSS 3.0-M1	Sensör	12 ay
OBL 3.0-M1	Baz İstasyonu	12 ay
11.0436	USB Güç Kablosu (Üretici: Metalin)	12 ay
SMI5-5-K-I38-C5 (Baz) SMI-EU-3-C2 (AB tipi) SMI-UK-3-C1 (Birleşik Krallık tipi)	USB Fişi (Üretici: CUI)	12 ay

Sipariş bilgileri için Owlet Baby Care, Inc. müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

4.3 Baz İstasyonuna Genel Bakış

Baz İstasyonu, Dream Sock sisteminin merkezî bir bileşenidir. Sensör ile iletişim kurarak veri alır. Baz İstasyonu bebeğin verilerini kaydeder, izler ve ne zaman bildirim gönderileceğini belirler. Baz İstasyonu ayrıca bebeğin bilgilerini Owlet sunucularına ve Owlet Dream App'e iletir, böylece Bakım Verenler bilgileri mobil cihazlarında görebilir.

Baz İstasyonu Özellikleri

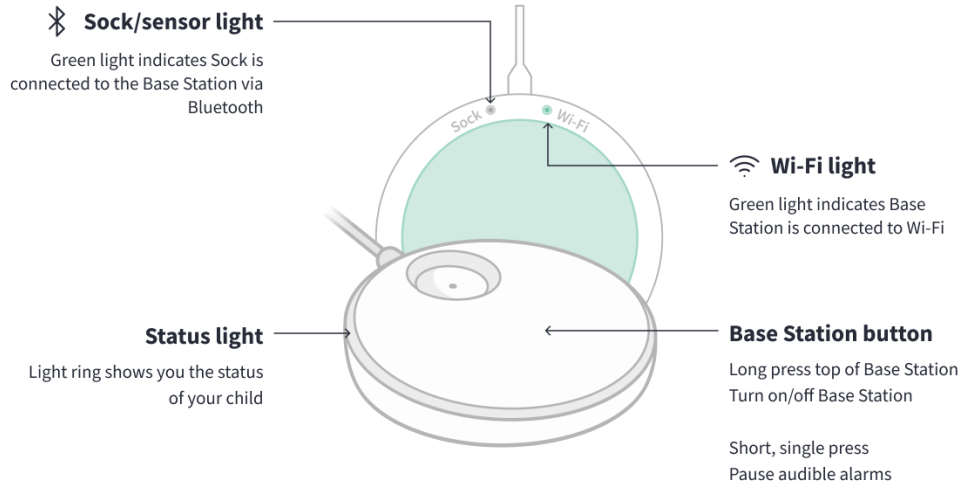

Sock/Sensör Işıđı

Baz İstasyonunun Sensör ile düzgün bir şekilde iletişim kurduđunu gösterir. İzleme başlatıldığında Sock/Sensör ışıđının yandıđından mutlaka emin olun. Baz İstasyonu henüz Sensörle eşleştirilmemişse Baz İstasyonundaki Sensör ışıđı yanmaz.

Wi-Fi Işıđı

Baz İstasyonunun Wi-Fi ađına bađlı olduđunu gösterir.

Baz İstasyonu Düđmesi:

(Baz İstasyonunun üst kısmına uzun basma)

Baz İstasyonunu açma/kapatma

(Bir kez kısa basma)

Sesli bildirimleri sessize alma/sürdürme

Baz İstasyonu Bildirim Göstergeleri

Baz İstasyonu bebeđinizin durumu hakkında bilgi vermek için görsel ve sesli göstergelerle bildirim gönderir. (Bildirimler hakkında ayrıntılı bilgi için [Bölüm 6.3.2](#)'ye bakın)



UYARI! Mobil cihaz uygulamasının birincil bildirim kaynağı olarak kullanılması amaçlanmamıştır. **Birincil bildirim kaynağı Baz İstasyonudur.** Baz İstasyonunu her zaman duyabileceğiniz bir mesafede tutun. Baz İstasyonunun ortam gürültüleriyle (ör. gürültülü makineler veya televizyonlar) engellenmeden duyulabildiğinden emin olun. Baz İstasyonunun üzerinin örtülmediğinden emin olun, aksi takdirde alarm sesleri bastırılabilir.

Baz İstasyonunun beklenen kullanım ömrü 12 aydır.

4.3.1 Baz İstasyonu Yedek Pili

Dream Sock Baz İstasyonunda yerleşik bir yedek pil bulunur. Bu yedek pil, izleme sırasında ana gücün kesildiğini orta öncelikli bir alarmla Bakım Verene bildirmek için tasarlanmıştır. İzlemeyi sürdürmek için Baz İstasyonunu tekrar güce bağlayın. Güç gelmezse sistem 2 dakika sonra kapanır.

- Bildirim ayarlarınız güç kesintisi durumunda sıfırlanmaz ve sistem tekrar güç almaya başladığında ayarlarınıza göre bildirimler tekrar gönderilmeye başlar.
- Baz İstasyonu prize takıldığında yedek pil otomatik olarak şarj olur.
- Baz İstasyonu güç kesintisi sırasında kapalıysa veya Sensör şarj oluyorsa güç kesintisiyle ilgili bildirim GÖNDERMEZ.
- Baz İstasyonu yedek pilinin normal kullanım süresi 12 aydır.
- Baz İstasyonu yedek piline bakım/servis yapılamaz.

4.4 Sensöre Genel Bakış

Sensör; kalp atış hızını, oksijen doygunluğunu ve hareketi ölçen ışık yayıcılara ve bir dedektöre sahiptir. Bu veriler Bluetooth aracılığıyla Baz İstasyonuna gönderilir.

Sensör, düzgün çalışabilmesi için özel bir Owlet Sock kullanılarak ayakta belirli bir konuma yerleştirilir ve bu konumda tutulur ([bkz. Bölüm 6.1](#)).



NOT: Eşleştirme işlemi, Baz İstasyonu ile yeni bir Sensörü ilişkilendirir. Sensör değiştirilirse yeni Sensör ve Baz İstasyonunu kullanarak eşleştirme işlemi tekrarlamanız gerekir. Yardım için Owlet Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin.

Sensör Özellikleri

Sensör, üzerinde Owlet logosu bulunan kubbe şeklinde bir gövdeye sahiptir. Sensöre bağlı olan esnek kumaş sensörün üzerinde ışık yayıcılar ve dedektör bulunur. Bu esnek kumaş bölüm, bebeğin ayağını sarmalayıp yayıcıları dedektörün karşısına yerleştirir.

Ölçüm Işık Yayıcı

Sensörün doğru okumalar almasına olanak tanımak için ayağın içinden geçecek şekilde LED ışık verir.

Ölçüm Işık Dedektörü


Ölçümleri toplar.

Sensör Kubbesi/Manyetik Şarj

Şarj için Baz İstasyonuna bağlanır.

Sock Çentiği

Sensörün Sock'a hizalanmasına yardımcı olur.

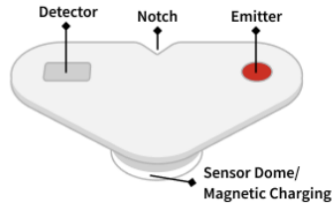

Sensör Pili

Dream Sock Sensörü, değiştirilemeyen şarj edilebilir bir pille çalışır. Sensörün pil ömrü (yeniye) 16 saate kadardır. Sadece 20 dakikada 8 saat dayanacak şarj için pratik hızlı şarj özelliği bulunur ve pil, yalnızca 90 dakikada 16 saat dayanacak şekilde tamamen şarj edilebilir. Dream Sock sistemi kullanılırken Sensörün en az günde bir kez şarj edilmesi önerilir ([bkz. Bölüm 6.5](#)).


- Sensör pilinin normal kullanım ömrü 12 aydır.
- Sensör piline bakım/servis yapılamaz.

Sensörün Kapatılması

[Bkz. Bölüm 9.4](#)

4.5 Sock'a Genel Bakış

Yumuşak ve yıkanabilir Sock, Sensörü bebeğin ayağında tam olarak doğru yerde tutmak için kullanılır. Sock'ın üzerinde Sensörün takılabileceği bir yer bulunur. Sock'taki delik Sensör kubbesinin üzerine kadar uzanır. Sock'ta bir de çentik bulunur. Bu çentiğin Sensördeki çentikle hizalanması gerekir. Sock çentiği aynı zamanda Sock'ın ayağın serçe parmağına düzgün bir şekilde hizalanması için de kullanılır. Sock'ların üzerinde bulunan cırt cırtlı bantlar, Sock'ı bebeğin ayağına sabitlemek için kullanılır.

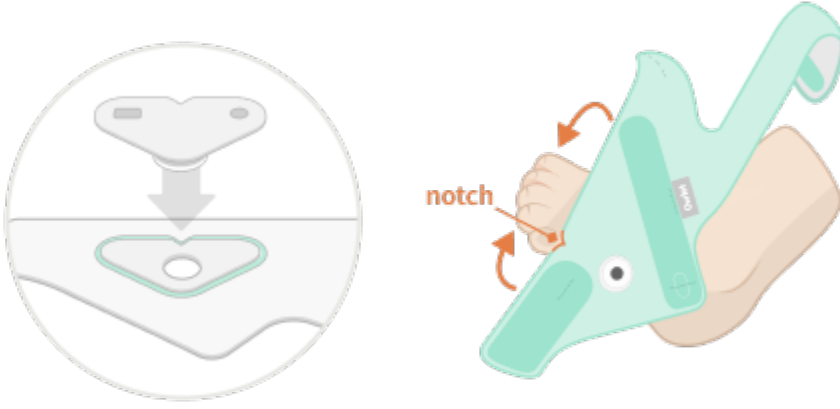

Sock'ın yerleştirilmesi ve bebeğin ayağına uyumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Bölüm 6.1](#)'e bakın.


- Kumaş Sock sargının beklenen kullanım ömrü 3 aydır.



DİKKAT. Sensörlü Sock'ın her zaman bebeğin ayağına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Sock'ın iyi yerleştirilmemesi performansı etkileyebilir.

4.6 USB Güç Kablosu ve USB Fişine Genel Bakış

Dream Sock, bir USB güç kablosu ve USB fişi ile birlikte gelir. USB kablosunun bir ucu Baz İstasyonunun arkasına, diğer ucu ise USB Fişine takılır. Daha sonra USB Fişi elektrik prizine takılır. Bu ekipman, Baz İstasyonu yedek pili için kullanılan şarj aparatı da dâhil olmak üzere Baz İstasyonunun güç kaynağıdır.

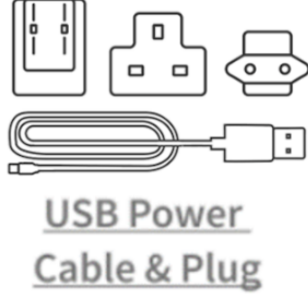

UYARI! Bu belgede açıklanan şekilde Dream Sock ile birlikte kullanılmak üzere belirtilenler dışındaki aksesuar, güç çevirici ve kabloların kullanılması yanlış ölçümlere, düşük performansa veya yaralanmaya neden olabilir.



NOT: Kullanmadan önce Sensör, Baz İstasyonu, mobil cihaz ve tüm aksesuarların uyumluluğunu kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

5. Dream Sock Kurulumu

Dream Sock'ı kullanmadan önce oda sıcaklığında 90 dakika bekletin.

5.1 Baz İstasyonuna Yer Bulma



UYARI! Mobil cihaz uygulamasının birincil bildirim kaynağı olarak kullanılması amaçlanmamıştır. **Birincil bildirim kaynağı Baz İstasyonudur.** Baz İstasyonunu her zaman duyabileceğiniz bir mesafede tutun. Baz İstasyonunun ortam gürültüleriyle (ör. gürültülü makineler veya televizyonlar) engellenmeden duyulabildiğinden emin olun. Baz İstasyonunun üzerinin örtülmediğinden emin olun, aksi takdirde alarm sesleri bastırılabilir.

Baz İstasyonunun konumu, düzgün performans ve güvenlik açısından önemlidir.

Evinizin durumuna bağlı olarak en iyi yer bebeğinizin odası **OLMAYABİLİR**. Gün içinde uyarıları her zaman duyabilmeniz için Baz İstasyonunun **yerini değiştirmeniz** gerekebilir. Baz İstasyonunu şu koşulları sağlayan yerlerde tutun:

1) Baz İstasyonunu her zaman DUYABİLECEĞİNİZ ve GÖREBİLECEĞİNİZ yerler

Baz İstasyonu, sesli ve görsel tüm bildirimlerin birincil kaynağıdır. Bakım Verenin arka plan gürültüleri arasında bildirimleri görebileceği ve duyabileceği bir yere yerleştirilmelidir.

2) Baz İstasyonunun geceleri sizi UYANDIRABİLECEĞİ yerler

Baz İstasyonu, bildirim verildiğinde Bakım Verenleri uyandırabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Baz İstasyonunun ışıkları karanlık odalarda otomatik olarak kısılır.

3) Baz İstasyonunun evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanabileceği yerler

Baz İstasyonu, evinizdeki Wi-Fi ağının kapsama alanında olmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra, Baz İstasyonunun alt kısmındaki Wi-Fi ışığını veya Owlet Dream App'i kullanarak bağlantının kurulduğunu doğrulayın. Bağlantı kararlı değilse kararlı hâle gelene kadar Baz İstasyonunu hareket ettirin.

4) Baz İstasyonunun Sensörle iletişim kurabileceği yerler (30 metre içinde)

Çoğu durumda, Sensör ve Baz İstasyonunun iletişim kurabilmesi için aynı evde birbirlerinden 30 metre uzaklıkta olmaları yeterlidir. Ancak evin büyüklüğü ve yerleşim planı sinyal gücünü etkileyebilir, buna bağlı olarak Baz İstasyonunun Sensöre daha yakın bir yere yerleştirilmesi gerekebilir.

5) Baz İstasyonunun bebek yatağından uzak olacağı yerler

Kabloya dolanarak boğulma tehlikesini önlemek için Baz İstasyonunu ve kabloyu bebek yatağından en az 1 metre uzakta ve bebeğin erişemeyeceği bir yerde tutun.

6) Elektrik kablosunun kolayca çıkarılamayacağı yerler

Baz İstasyonunu, elektrik kablosunun Baz İstasyonundan kolayca çıkarılamayacağı bir yerde tutun.



DİKKAT. Dream Sock Sistemini bebeğinizin üzerine düşebileceği herhangi bir pozisyonda **YERLEŞTİRMEYİN**. Yaralanma meydana gelebilir.

Bütün bu gereklilikleri karşılayabilecek tek bir yer bulamıyorsanız gün içinde Baz İstasyonunun yerinin değiştirilmesi gerekebilir.

5.2 Owlet Dream App Kurulumu

Owlet Dream Mobil Cihaz Uygulaması (Uygulama), evinizin kablosuz ağını kullanarak Baz İstasyonu ile iletişim kurar. Ölçümleri, durum mesajlarını ve bildirim bilgilerini görüntüleyen Uygulama, Dream Sock Sisteminin önemli bir parçasıdır.



Owlet Dream App'i İndirme

Yeni Dream Sock'ınızın kurulumunu tamamlamak için Owlet Dream App'i kullanın. İndirdikten sonra Uygulamadaki kurulum adımlarını uygulayın. Uygulama şu adımlarda yönlendirme sağlar:

- Hesap oluşturma
- Hesap onayı
- Cihaz kurulumu
- Wi-Fi ağına bağlanma
- Baz İstasyonunu Kaydetme
- Sock'ı eşleştirme
- Çocuk profili oluşturma
- Zorunlu eğitim

Owlet Dream App aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

- Gerçek zamanlı yaşamsal bulgu ölçümlerini ve bebeğin durumunu görme

- Bildirim alma
- Bebeğinizin uyku geçmişini görme ve değiştirme
- Bebeğinizin uyku süresini ve durumunu izleme

Gereksinimler: Dream Sock'ı kullanmak için Owlet Dream App'in indirildiği, iOS 14.0 ve daha yeni sürümleri ya da Android 7.0 ve daha yeni sürümleri yüklü bir mobil cihaza erişim gerekir; minimum işletim sistemi sürümleri geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için uygulama mağazalarına göz atın.

!

• **NOT:** Dream Sock'ın kurulumu, kullanımı veya bakımı konusunda yardım almak ya da beklenmeyen performans ve işletim sorunlarını bildirmek için Owlet Baby Care müşteri desteği birimiyle iletişime geçin.

!

• **NOT:** Sensör küçük beden Sock'lardan birine yerleştirilmiş olarak gelir. İlk donanım ve Uygulama kurulumu bu yapılandırma kullanılarak tamamlanabilir. Asıl kullanımdan önce, doğru Sock bedeninin seçildiğinden emin olunmalıdır.

Owlet Dream App'i İndirme

Devam etmeden önce Owlet Dream App'i indirip kurun. Uygulama kurulum boyunca sizi adım adım yönlendirecektir. Owlet Dream App'i indirdikten sonra mobil cihazınızın ayarlarına giderek Owlet Dream App anlık bildirimlerini hemen etkinleştirmelisiniz.

Owlet Dream App'te canlı ölçümlerin alınması, Uygulamaya uzaktan erişim ve bazı Uygulama özellikleri için 2,4 GHz kablosuz internet bağlantısı gereklidir.

Wi-Fi ağına bağlanma: Baz İstasyonu, Wi-Fi aracılığıyla Owlet bulut sunucusuna bilgi gönderir ve bu verileri Uygulamada görüntüler. Bu özellik, her yerde Uygulama üzerinden gerçek zamanlı ölçümler ve bildirimler alınmasını sağlar. Baz İstasyonu, Sock'ın Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını gösterir.

!

• **NOT:** Aynı Wi-Fi ağını kullanan diğer ekipmanlar aşırı bant genişliği tüketebilir veya mobil cihaz ile bağlantıyı başka şekillerde engelleyebilir. Ayrıca donanım değişimi/güncellemesi/yükseltmesi, ağ yapılandırması veya ayar değişiklikleri gibi ağızda yapılan değişiklikler bağlantınızın kesilmesine neden olabilir. Owlet Dream App'i kullanırken Doğrudan bağlantının kurulduğundan emin olmalısınız.

Dream Sock'ı kurmak için:

1. Adım: Owlet Dream App'i indirin

iOS ve Android sistemlerinde kullanılabilir.

2. Adım: Hesap oluřturun (uygulama ekranları)

Hesap oluřturmak iin uygulamanın iinde verilen talimatları uygulayın. Owlet Dream App'te bebekle ilgili bilgilere eriřimi paylařmak mı istiyorsunuz? Her Bakım Verenin eriřebileceėi tek bir hesap oluřturmanızı oneririz.

3. Adım: Baz İstasyonunu bir g kaynaėına takın ve Sensr, Baz İstasyonundaki řarj baėlantı noktasına yerleřtirin

Dream Sock'ı Wi-Fi aėına baėlamak, Dream Sock'ı kaydetmek, eřleřtirmek ve gerektiėinde Dream Sock'ta gncelleme yapmak iin uygulamanın iinde verilen talimatları uygulayın.

4. Adım: Uygulamadaki gvenlik uyarılarını okuyun ve kabul edin

İřleme devam etmek iin kutuyu iřaretleyerek bu gvenlik uyarılarını kabul etmeniz gerekir.

5. Adım: ocuk profili oluřturun

Uygulama, ocuėunuz iin bir profil oluřturma ve bu profili bir Owlet cihazına atama iřlemlerinde size yol gsterecektir.




DİKKAT. Dream Sock'ın amacına uygun řekilde alıřabilmesi ve gvenliėiniz iin Owlet Dream App'i her zaman gncel tutun ve mobil cihazınızın parolayla korunduėundan emin olun. Siber Gvenlik hakkında daha fazla bilgi iin [Blm 17](#)'ye bakın.

5.3 Owlet Sağlık Bildirimleri



Owlet Sağlık Bildirimleri, Bakım Verenlerin izleme oturumu sırasında Kalp Atış Hızı ve Oksijen değerleri (“Sağlık Ölçümleri”) gibi canlı sağlık ölçümlerini görüntülemenin yanı sıra Oksijen veya Kalp Atış Hızı önceden ayarlanmış aralıkların dışına çıkarsa yüksek öncelikli bildirim almalarına olanak tanır. Bu önceden ayarlanmış aralıklar değiştirilemez, sabit değerlerdir. Kalp Atış Hızı Bildirimi, ölçülen kalp atış hızının 50 BPM’nin (dakikadaki atış sayısı) altına düşmesi veya 220 BPM’nin üzerine çıkması durumunda gönderilir. Ölçülen oksijen seviyesi %80’in altına düştüğünde ise Oksijen Bildirimi gönderilir. **Yeni cihazlarda Sağlık Bildirimleri varsayılan olarak devre dışıdır ve manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir.**

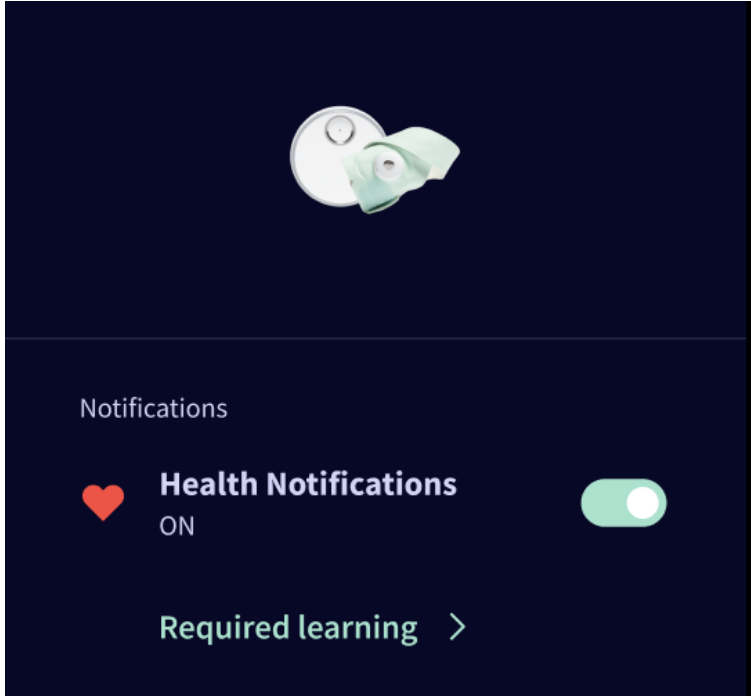

Sağlık Bildirimleri, Owlet Dream App'te Sock ayarlarından etkinleştirilebilir. Uygulama bu ayarın devre dışı bırakıldığını tespit ederse ya Uygulama başlatıldığında bir mesaj veya uyarı başlığı görüntülenir ya da izleme sırasında bir uyarı başlığı görünür. Sock ayarlarına girip açma/kapatma düğmesine dokunduğunuzda Sağlık Bildirimlerini etkinleştirme işlemi başlatılır. Ardından Sağlık Bildirimleri ve bunların her birine nasıl yanıt verileceği hakkında eğitici bilgiler içeren zorunlu bir eğitim vardır. Zorunlu eğitimi tamamlamadan önce, Bakım Verenin bu Sağlık Bildirimlerini test etmesi gerekir.

Zorunlu eğitim tamamlandıktan sonra Sağlık Bildirimleri etkinleştirilir. Bu bildirimler manuel olarak devre dışı bırakılmadığı sürece etkin kalır. Zorunlu eğitimi dilediğiniz zaman Sock ayarlarına giderek gözden geçirebilirsiniz.

Sağlık Bildirimleri geçmiş sekmesinde 10 dakikalık ortalama kalp atış hızı ve oksijen seviyelerini gösteren geçmiş çizelgeleri ve grafikleri de içerir. Bu sekmede Uyku Göstergeleri ve Sağlık Ölçümlerine ait geçmiş çizelgeler ve grafikler gösterilir.

5.4 Owlet Dream App'i ve Dream Sock'ı Birden Çok Profille Kullanma

Owlet Dream App, birden fazla Dream Sock'ı izlemenize olanak tanımak için birden çok çocuk profilini ve Dream Sock sistemini destekler. Bildirim alındığında karışıklık olmaması için Sock'larınızı ve onlara atanan Baz İstasyonlarını her bir çocuğa göre ayrı tuttuğunuzdan emin olun.



DİKKAT. Evde farklı Dream Sock cihazları kullanan birden fazla bebek varsa karışıklığı önlemek için Sock'ın, Sensörün ve Baz İstasyonunun üzerine ilgili bebeğin adını yazın.

6. Dream Sock Nasıl Kullanılır?

6.1 Sock Bedeni, Uyumu ve Yerleşimi

Sock'ın uyumu, Sock'ın ayağa ne kadar rahat bir şekilde oturduğunu ifade eder. Sock yerleşimi, Sock'ın ayağa göre yönelimini ve hizalanmasını ifade eder.

1. Adım: Sensörü Baz İstasyonunun üst kısmından çıkarın

Sensörü şarj bağlantı noktasından çıkardığınızda, Baz İstasyonunda yanıp sönen yeşil ışıklar görünür. Bu ışıklar Sensörün çocuğunuzdan ölçüm almaya çalıştığını gösterir. Bu noktada, doğru Sock bedenini seçmeniz ve Sensör ile Sock'ı çocuğunuzun ayağına takmanız gerekir.



2. Adım: Başlangıç Bedenini Seçin

Her Dream Sock, sol ve sađ ayak için 2'ser beden olmak üzere 4 Sock'tan oluşur. Ağırlığa göre başlangıç Sock bedenini seçmek için aşağıdaki kılavuzu kullanın. Başlangıç Sock'ı ayađa tam uymuyorsa gereken uyumu sağlamak için farklı bedenleri deneyin.



DİKKAT. Sock'ın uyumunu düzenli olarak kontrol edin. Bebeğinizin gerçek ayak ölçüsü yukarıdaki kılavuzda gösterilenden farklı olabilir ve bebekler hızlı büyürler. Bebeğinizin ağırlığı 13,6 kg'a ulaştığında veya en büyük Sock bedeni bile bebeğinize küçük gelmeye başladığında Dream Sock sistemini kullanmayı bırakın.



DİKKAT. Bebeğiniz yaş ve kilo gerekliliklerini karşılasa bile tüm Sock bedenleri ya çok küçük ya da çok büyükse Dream Sock cihazını kullanmayı bırakın.



DİKKAT. Her 8 saatlik kullanımdan veya Sensörü şarj ettikten sonra Sock'ı diğer ayağa geçirin. Çocuğunuzun ayağını sık sık kontrol ederek ciltte tahriş belirtileri olup olmadığına bakın.




DİKKAT. Ayak deformiteleri Dream Sock performansını etkileyebilir. Ayak deformiteleri nitelik ve şiddet bakımından çok farklılık gösterdiğinden, ayak deformitesi olan bebeklerde kullanmadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.

3. Adım: Sensörü takın (henüz takılmamışsa)

Sensörü Sock'a takmak için Sensörün üzerindeki çentiği Sock'ın üzerindeki çentikle hizalayın. Sock'taki deliği esneterek Sensörün üzerine getirin.

Sock'ı ve Sensörü kullanmadan önce hasar, aşırı su veya nem olup olmadığını görmek için daima kontrol edin; Sock'ın ve sensör pencereleri dâhil Sensörün temiz ve açık olduğundan emin olun.

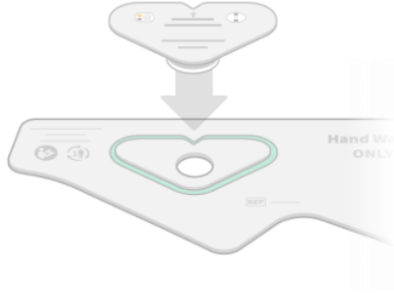

NOT: Kullanmadan önce Sensörün Sock'a tam olarak takıldığından emin olun. Sock'ta herhangi bir hasar olduğunu fark ederseniz Sock'ı kullanmayı bırakın.

4. Adım: Sock'ı yerleştirin

Sock'ı, ayağın **dış** tarafındaki çentik serçe parmağın **arkasına** gelecek şekilde ilgili ayağa (sol/sağ) yerleştirin. Sock ayak parmaklarına **DEĞMEMELİDİR**.



Bağlayıcıyı, ayak parmağı bandından (1) başlayarak ayak parmaklarının üzerinde kalacak şekilde ayağın çevresine sabitleyin, ardından bilek bandını bileğin arka kısmından dolayarak ayağın üst kısmına sabitleyin (2). Bağlarken **ESNETMEMEYE** dikkat edin. Bantları esnetmeden doğal bir şekilde bağlayın. Sock cildin üzerine düz bir şekilde yerleşmeli, Sock ile ayak arasında boşluk bırakılmamalıdır.



DİKKAT. Bağlarken bantları ESNETMEYİN. Bantların esnetilmesi aşırı sıkmaya neden olur ve cildin tahriş olması riskini artırır.



DİKKAT. Sensörü bebeğinizin ayağına Dream Sock dışında başka bir şey kullanarak BAĞLAMAYIN. Bebeğin ayağında yaralanma meydana gelebilir.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü uygulamadan önce ayaklara losyon, krem veya pudra SÜRMEYİN. Cilt tahrişini önlemek için uygulama bölgesinin temiz ve kuru olması gerekir.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü ıslak cilde UYGULAMAYIN. Aşırı nem ciltte tahriş riskini artırabilir.




DİKKAT. Sock'ı ve Sensör kumaşını bebeğinize takmadan önce ikisinin de kuru olduğundan ve üzerlerinde kir, saç veya başka yabancı maddeler bulunmadığından emin olun.

5. Adım: Sock uyumunu ve yerleşimini doğrulayın


Sock'ı Ayakla Eşleştirin

Sol ayak için sol Sock'ı, sağ ayak için sağ Sock'ı kullandığınızdan emin olun. Her Sock “R” (sağ) veya “L” (sol) şeklinde işaretlenmiştir.

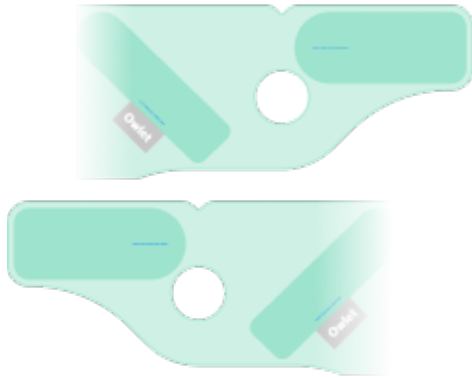

Hassas Bölgeleri Koruyun

- Bantların aşındırıcı kısmının cilde temas etmemesine dikkat edin.
- Sock ayak parmaklarını geçmeyecek şekilde takılmalıdır.

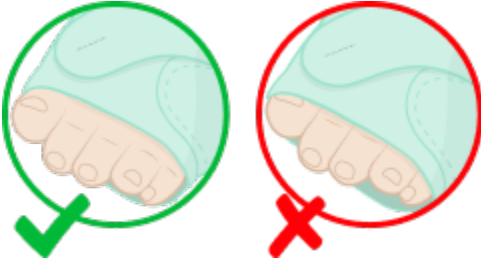


Sock Bedenini Kontrol Edin

Sock çok küçük

Bantlardan biri bağlayıcı kısmına doğal olarak ulaşamıyorsa daha büyük bir Sock bedeni kullanmayı deneyin. Bantları esneterek Sock'ı çok sıkı olacak şekilde sarmayın, aksi takdirde çocuğunuz rahatsız olabilir.

Sock çok büyük

Bantlardan biri bağlayıcıyı geçiyorsa daha küçük bir Sock bedeni kullanmayı deneyin. Sock ve bantlar ayağa tam oturmalıdır.

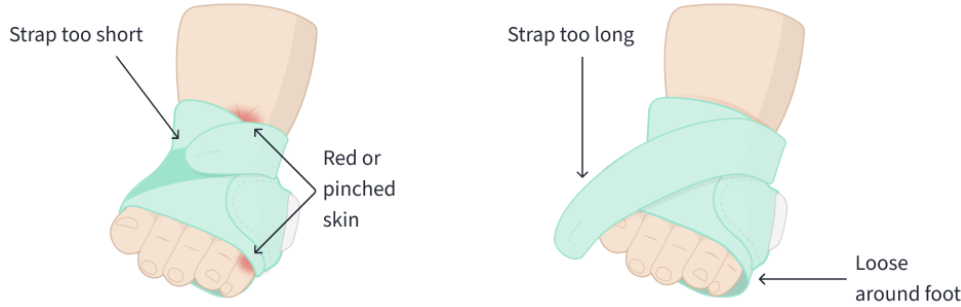

Bantları Kontrol Edin

Bantların doğru ayarlandığından emin olun. Aşırı **SIKMAYIN**.

- Bantlar cilde düz bir şekilde temas etmeli ancak cilde baskı yapmamalıdır.
- Bağlarken bantları ESNETMEYİN. Bantların aşırı esnetilmesi aşırı sıkıya yol açar.



DİKKAT. Sock'ı ve Sensörü çok sıkı bir şekilde **UYGULAMAYIN**. Uzun süre aşırı basınca maruz kalmak bası yaralanmasına neden olabilir.



DİKKAT. Sensörlü Sock'ın her zaman bebeğin ayağına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Sensörün yanlış yerleştirilmesi cilt tahrişine neden olabilir.



DİKKAT. Bantların aşındırıcı kısımlarının bebeğin cildine temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde ciltte aşınma meydana gelebilir.



DİKKAT. Cilt tahrişi belirtileri veya çok fazla bildirim alınması, Sock bedeninin yanlış olduğuna dair bir gösterge olabilir.



DİKKAT. Sensör pencereleri ayaktan uzaklaşıyorsa Sock çok gevşek olabilir. Sock'ı biraz daha sıkmayı deneyin veya daha küçük beden Sock kullanın. Hava boşlukları ölçümlerin aralıklı olmasına neden olabilir.



NOT: Uygun beden yaşı, kiloya ve ayak şekline göre değişir.

6. Adım: Baz İstasyonunu kontrol edin

Sock bebeğin ayağına giydirildikten sonra Baz İstasyonunu kontrol edin. Işığın yeşil renkte hafif yanıp sönmesi çocuğunuzun ölçümlerinin alındığını ve Sock ile Baz İstasyonunun gerekli şekilde iletişim kurduğunu gösterir.

6.1.1 Cilt Tahrişi

Sock'ın yanlış kullanılması rahatsızlığa neden olarak bebeğinizin ayağında cilt tahrişine, bası yaralarına veya kabarcıklara yol açabilir.



DİKKAT. Sock'ın ayağa uymaması veya bakımının yapılmaması ciltte yaralanmaya yol açabilir.



DİKKAT. Ayağın Sensöre yakın bölümlerinde kızarıklık izleri oluşursa kullanmayı derhâl bırakın. Kullanmaya devam edilmesi daha fazla yaralanmaya ve yanlış ölçümlere yol açabilir. Sorularınız varsa sağlık uzmanınıza başvurun.



DİKKAT. Sensör pozisyonunu ve bebeğinizin cildinin durumunu en az 8 saatte bir kontrol edin ve gerekirse Sensörü yeniden yerleştirin. Her kullanımdan sonra cihazı diğer ayağa takın. Bebeğinizin/çocuğunuzun cildi hassassa 4 saatte bir bebeğin/çocuğun ayaklarını kontrol edin ve cihazı diğer ayağa takın. Sock'ın ve Sensörün uzun süre aşırı basınca neden olacak şekilde yanlış uygulanması bası yaralanmasına veya cilt tahrişine neden olabilir.

Cilt Tahrişini Önleme

- Bebeğiniz için her zaman *doğru bedende* Sock kullanın. [Bölüm 6.1](#)'e bakın.
- Sock'ın altında losyon veya pudra kullanmaktan **kaçının**. Cildi temiz ve kuru tutun.
- Sock'ın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve ayarlandığından emin olun. [Bölüm 6.1](#)'e bakın.
- Sock'ın kullanıldığı ilk hafta boyunca ve Sock bedenini değiştirdikten sonra cildi 4 saatte bir kontrol edin.
- Yaklaşık 2 haftada bir veya kızarıklık olduğunu fark ederseniz daha sık aralıklarla Sock'ı sol ayak yerine sağ ayağa ya da sağ ayak yerine sol ayağa takın.
- Sock'ı ve Sensörü 2 haftada bir veya kirlendiğinde elde yıkayın. Kullanmadan önce iyice kurutun.
- Sock'ı uygulamadan önce her seferinde çocuğunuzun ayaklarında tahriş olup olmadığını kontrol edin. Cilt tahrişi olan ayağa **UYGULAMAYIN**,




NOT: Ciltte Sock ile temasa bağlı oluşan ve 8 saat içinde kaybolan izlerin görülmesi normaldir.

Cilt tahriş olursa ne yapılmalı?

- Etkilenen ayakta Sock'ı kullanmayı bırakın ve tahriş tamamen geçene kadar Sock'ı yalnızca etkilenmeyen ayağa uygulayın.
- Kızarıklık izlerinin oluşmasını önlemek için bire bir yardım almak üzere Owlet Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin.
- Etkilenmeyen ayakta Sock'ın altında kalan cildi 4 saatte bir kontrol ederek tahrişin tekrar oluşmadığından emin olun.
- Her iki ayakta da tahriş görülürse kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınıza danışın. Dream Sock'ın tahriş olmuş cilde tekrar uygulanması ciltteki hasarın artmasına neden olabilir.

6.2 Baz İstasyonunun Durumu ve Kontrol Edilmesi

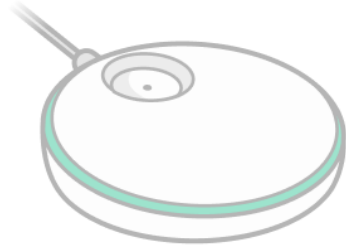


Slow Pulsing Green light

Sock is getting readings



Solid white light

Sock charging on the Base Station is fully charged

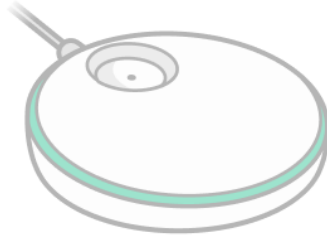

Quick Bouncing Green light

Sock is getting initial readings or child is moving



Pulsing white light

Sock is charging



Blinking Orange Light

Sock charging on the Base Station is paired to a different Base Station



Blinking white light

Sock charging on Base Station is not paired to Base station

6.3 Ölçüm ve Bildirimleri Alma

Baz İstasyonu, çocuğunuzun ölçümleri normal aralığın dışına çıktığında, ölçüm alınamadığında veya çocuğunuz rahatsız olduğunda size ışıklı ve sesli uyarılar verecek şekilde tasarlanmıştır. Baz İstasyonu bildirim önceliği türleri üçe ayrılır: Yüksek Öncelikli (kırmızı), Orta Öncelikli (sarı) ve Düşük Öncelikli (mavi).

! **NOT:** Yüksek Öncelikli bildirimler, Owlet Dream App'te ayrıca etkinleştirilmesi gereken Kalp Atış Hızı ve Oksijen Sağlık Bildirimleridir.

6.3.1 Bildirim Rengi Referans Tablosu

! **NOT:** Aynı anda iki veya daha fazla alarm oluştuğunda, en yüksek önceliğe sahip alarma hem Baz İstasyonunda hem de Uygulamada her zaman öncelik verilir. Aynı anda iki yüksek öncelikli alarm oluşursa iki alarm da gösterilir. Eş zamanlı olarak verilen orta veya düşük öncelikli alarmlar için durum mesajlarının önceliği aşağıda listelenen sıraya göre belirlenir.

Base Station Indicator	Status	Meaning (Notification Condition)	What you should do
 Flashing Red High Priority	Low Heart Rate	Heart Rate below 50 BPM	Immediately check on your child and see if they are okay. Things to check on are your child's breathing, skin color (are they blue or pale), activity, and alertness. If you have concerns that your child is not okay please seek medical attention.
	High Heart Rate	Heart Rate above 220 BPM	
	Low Oxygen	Oxygen below 80%	
 Flashing Yellow Medium Priority	Difficulty getting readings	Sensor may be placed improperly and not able to provide valid data for the last 90 seconds with no motion, OR there has been no data for 240 seconds and there is excessive motion.	Check the Sensor placement and ensure the child is not wiggling or being moved excessively (i.e. swing or being held). It may take 10 – 20 seconds for this alarm to clear once Sensor is repositioned AND the child stops moving. Turn off monitoring until movement stops.
	Power Loss	Base Station has lost line power and is on battery backup.	Check connections and restore power or discontinue use
	Connection Issue	Sensor has been disconnected from the Base Station for 60 seconds because it is out of range of the Base Station, has lost power or has an internal problem.	Move the Base Station closer to the sensor, or make sure there is nothing blocking the signal between the two. Check the sock battery level in the app.
 Solid Blue Low Priority	Low Sensor Battery	Sensor has 50 minutes or less left of battery life	Place the Sensor on the charger soon.
 Flashing Lavender Notification	Sleep Assist	Your child is moving excessively or has been moving for an extended period of time.	Check on your child, they may need your help falling back to sleep.

Baz İstasyonu, üniteden 1 metre uzaklıkta ölçülen en fazla 85 dBA ses basıncı seviyesine sahip sesli alarm sinyalleri oluşturur. Yüksek (kırmızı) öncelikli alarmların ses basıncı seviyesi en az 60 dBA ve en fazla 85 dBA'dır. Orta (sarı) ve Düşük öncelikli alarmların ses basıncı seviyesi en az 43 dBA ve en fazla 85 dBA'dır.

6.3.2 Bildirim Tanımları

6.3.2.1 Yüksek Öncelikli Sağlık Bildirimleri (Fizyolojik Alarm)

Sağlık Bildirimlerinin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için [Bölüm 5.3](#)'e bakın. Bu Sağlık Bildirimleri isteğe bağlıdır ve Uygulamada etkinleştirilmesi gerekir. Bildirimler manuel olarak devre dışı bırakılmadığı sürece etkin kalır.

Yüksek Öncelikli Bildirim sırasında Baz İstasyonu kırmızı renkte hızla yanıp söner ve yüksek bir bildirim sesi çalar. Ayrıca Owlet Dream App'ten anlık bildirim alırsınız. Kalp Atış Hızı bildirimleri, ölçülen kalp atış hızının 50 BPM'nin altına düşmesi veya 220 BPM'nin üzerine çıkması durumunda verilir. Ölçülen oksijen seviyesi %80'in altına düştüğünde ise Oksijen bildirimi verilir.

6.3.2.2 Orta Öncelikli Bildirimler (Teknik Alarmlar)

Orta Öncelikli Bildirim sırasında Baz İstasyonu sarı renkte hızla yanıp söner ve orta düzey bir bildirim sesi çalar. Ayrıca Owlet Dream App'ten anlık bildirim alırsınız. Sarı bildirim, Sock ile ilgili bir yerleştirme sorunu olduğunu veya Sock'ın çocuğunuzun ayağından çıktığını ve en az 60 saniye boyunca iyi ölçüm alınamadığını belirtir. Sarı bildirim aynı zamanda Sock'ın Baz İstasyonunun kapsama alanı dışında olduğunu veya sinyalin en az 60 saniye boyunca engellendiğini gösterebilir. Bu bildirimi nasıl ele alacağınız konusunda size yol gösterecek en iyi kaynak Uygulama olacaktır.

İnsan vücudu baz istasyonu ile Sock arasındaki bağlantıyı engelleyen bir bariyer olarak algılanabileceğinden, çocuğunuzu sırtınız Baz İstasyonuna dönük olacak şekilde tutmamaya çalışın. Sarı bildirimler tekrarlanıyorsa tekrarlanan bildirimleri önlemek için Sock ile Baz İstasyonunu birbirine yaklaştırın.

Baz İstasyonu, başlatıldıktan sonra 120 saniye içinde mobil uygulama ile bağlantı kuramazsa açıldığında orta öncelikli bir teknik alarm sesi çalar.

Orta öncelikli bir teknik alarm mevcut olduğunda, teknik alarm çözülene kadar hiçbir yüksek öncelikli alarm etkinleştirilmez. Orta Öncelikli Baz İstasyonu Güç Kesintisi alarmı olduğunda Baz İstasyonu, yedek güç tükenene kadar veya tekrar güç almaya başlamadığı takdirde kapanmadan önce en fazla 10 dakika boyunca izleme yapmaya ve alarm vermeye devam edecektir.

6.3.2.3 Düşük Öncelikli Bildirimler (Teknik Alarmlar)

Pil Bildirimi

Düşük Öncelikli Bildirim sırasında, Baz İstasyonunun ışığı mavi renkte sürekli yanar ve düşük bir bildirim sesi çalar. Ayrıca Owlet Dream App'ten anlık bildirim alırsınız. Mavi bildirim, Sock pilinin 50 dakikalık (%10 şarj) ömrünün kaldığını ve kısa süre içinde şarj

edilmesi gerektiğini belirtir. Bu alarm mevcut olduğunda Baz İstasyonu, diğer teknik ve yüksek öncelikli alarmları her zamanki gibi vermeye devam eder.

Hızlı Yanıp Sönen Eflatun Bildirim

Aşırı hareket algılandığında, bebeğinizin iyi uyumuyor ve tekrar uykuya dalmak için yardıma ihtiyaç duyuyor olabileceğini belirtmek için Baz İstasyonunun ışığı eflatun renkte hızla yanıp söner. Baz İstasyonunun ışığı eflatun renkte hızla yanıp söndüğünde, bebeğinizin bulunduğu ortamı değerlendirmek ve bebeğin tekrar uykuya dalmak için yardıma ihtiyacı olup olmadığını belirlemek üzere bebeğinizi kontrol etmelisiniz.

6.3.3 Bildirimleri Erteleme

Herhangi bir türde etkin bildirim olduğunda, Baz İstasyonuna veya Owlet Dream App'e kısaca basarak sesi 60 saniyeliğine erteleyebilirsiniz.

Erteleme yalnızca Baz İstasyonu ve Uygulama seslerini duraklatır. Baz İstasyonunda ışık halkası görünmeye devam eder ve Uygulamada ayrıntıları görebilirsiniz. Bildirim, söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar geçerliliğini korur. Erteleme sırasında alarmı başlatan olay sonlanırsa bildirim de durdurulur.

Bildirimler ertelenmiş durumdayken yeni bir olay gerçekleşirse bildirim sesi yeniden çalmaya başlar.

Owlet Dream App'te ertelenen bildirimler/alarmlar Baz İstasyonunda da sessize alınır.

Baz İstasyonunu ve izlemeyi nasıl kapatabilirim?

Baz İstasyonuna basın ve yeşil ışık sönüp “bip” sesi duyana kadar basılı tutun.

6.4 Dream Sock'ı kapatma

6.4.1 Aşırı hareket

Bebeğiniz tekrarlayan hareket bildirimlerine neden olacak kadar aktif olduğunda Baz İstasyonu ile izleme kapatılmalıdır. Bebeğinizin tekmelemesi, emeklemesi veya kıpırdanması gibi hareketler, hareket bildirimlerine neden olabilir. Bebeğinizi taşımanız, sallamanız,

beslemeniz veya bebeğin gazını çıkarmanız da hareket bildirimlerini tetikleyebilir. Sensör şarj edilmek üzere Baz İstasyonuna yerleştirildiğinde, izleme otomatik olarak kapatılabilir.



Bebeğin/çocuğun aşırı hareketli olması Sensör performansını ve ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.

6.4.2 Dream Sock'ı kapatma

Baz İstasyonunu manuel olarak kapatmak ve izlemeyi sonlandırmak için:



ÜRÜNLERİMİZİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK VE ÇOCUĞUNUZUN BAKIMI İÇİN: BİLDİRİM VERİLDİĞİNDE DERHÂL YANIT VERİN.

1. Tüm etkin bildirimleri duraklatın.
2. Bir uyarı sesi duyulana kadar Baz İstasyonuna 3 saniye boyunca uzun basıp bırakın.



NOT: Baz İstasyonunun ışığı söner ve izleme işleminin sona erdiğini belirtmek için alçalan bir zil sesi duyulur.

3. Sock'ı ve Sensörü bebeğin ayağından çıkarın.
4. Kirlenip kirlenmediğine bakmak için Sock'ı ve Sensörü görsel olarak inceleyin ve gerekirse temizleyin (bkz. Bölüm 10).
5. Sensörü şarj etmek için Baz İstasyonuna yerleştirin.

6.5 Sensörü Şarj Etme

Sensörü Baz İstasyonuna yerleştirerek şarj edin. Sensör tam olarak şarj olduğunda Baz İstasyonunun ışığı beyaz renkte yanıp söner. Dream Sock'ta sadece 20 dakikada 8 saat dayanacak şarj için pratik hızlı şarj özelliği bulunur ve pil, yalnızca 90 dakikada 16 saat dayanacak şekilde tamamen şarj edilebilir. İzleme yapmadığınız veya Sensörü saklamak üzere kaldırmadığınız her durumda Sensörü Baz İstasyonuna yerleştirerek şarj etmenizi öneririz.



NOT: Sensör Sock'ın içindeyken şarj edilebilir.



NOT: Owlet Dream App, Sensör Baz İstasyonuna yerleştirilmiş durumdayken yalnızca Sensörün şarj olduğunu veya şarjın tam dolu olduğunu gösterir.



6.6 Dream Sock'ın kullanımına ne zaman son verilmeli?

Aşağıdaki durumlarda Dream Sock'ı kullanmayı bırakın:

- Bebeğin her iki ayağında da cilt tahrişi varsa.
- Bebek 13,6 kg'dan daha ağırsa.
- Sock artık tam oturmuyorsa.
- Bebek hareket ediyorsa veya hareket etmesini sağlayan bir cihazın içindeyse (salıncak ya da araç gibi).

Aşağıdaki durumlarda Dream Sock için Owlet Baz İstasyonunu kullanmayı bırakın:

- Baz İstasyonu hasar görmüşse ve/veya kenarları keskin bir hâl almışsa.

7. Owlet Dream App'i Kullanma

7.1 Dream Sock ile Uykuyu İzleme

Owlet Dream App Ana Ekranı; bebeğin uyku durumu, farklı uyku durumları ve Baz İstasyonunun durumu hakkında önemli bilgileri gösterir.

En önemli bilgiler telefon Uygulamasında Ana Ekranın üst kısmında görüntülenir. Uygulama ekranında, Dream Sock ile ölçülen uyanma sayısı ve hareket derecesi gösterilir. Çocuğunuzun ne kadar hareket ettiğini anlamanıza yardımcı olacak bir gösterge bulunmaktadır. Aşağıda çocuğunuzun uyku durumu hakkında bilmeniz gereken tek şey gösterilir. Uygulamada görüntülenen tüm durumlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için uyku durumunun sağında bulunan soru işareti düğmesine basabilirsiniz.

7.2 Sağlık Bildirimleri: Owlet Canlı Kalp Atış Hızı ve Oksijen Seviyesi Gösterimleri

Canlı kalp atış hızını ve oksijen seviyelerini görüntülemek için Sağlık Bildirimlerinin etkinleştirilmesi gerekir. Ölçümler bebeğinizin kalp atış hızı ve Oksijen Doygunluğu hakkında gerçek zamanlı bilgiler gösterir.

Sağlık Bildirimleri, cihazın takıldığı bebeğin kanındaki oksijen miktarının kritik seviyelere ulaşması ve acil müdahaleye gerek olması durumunda Bakım Verenlere bildirim verir. Dream Sock, müdahale gerektiren aşırı düşük veya yüksek kalp atış hızları konusunda da Bakım Verenlere bilgi verir. Bunlar, Yüksek Öncelikli Bildirimlerdir.

Owlet Dream App oksijen ve kalp atış hızı ölçümlerini de gösterir. Böylece Bakım Verenler Sock ve Sensör takılıken ve izleme açıkken çocuklarının durumunu kontrol edebilirler. Bu bölüm, Sağlık Bildirimleri etkinken Bakım Vereninin Owlet Dream App'te gördüğü kalp atış hızı ve oksijen bilgilerini anlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Owlet Dream App'te, soru işareti şeklindeki yardım simgesine dokunularak hızlı başvuru kaynakları olan araç ipuçlarına ulaşılabilir.



Ana sayfa araç ipucunda, çocuklar için yaşa göre normal canlı sağlık ölçümlerini gösteren bir hızlı başvuru tablosu yer alır.



7.2.1 Kalp Atış Hızı

Bebeklerin kalp atış hızı yetişkinlere göre çok daha hızlıdır. Aşağıdaki tabloda genellikle bebekler uyanık ve rahat durumdayken görülen kalp atış hızı aralıkları verilmektedir. Kalp atış hızı, dakikadaki atış sayısı (BPM) olarak gösterilir.

*Sağlıklı Bebeklerde Yaşa Göre Kalp Atış Hızları**

Yaş	Normal Kalp Atış Hızı Aralığı - Bebek Uyanıkken
0 ila 3 ay	123-164
3 ila <6 ay	120-159
6 ila <9 ay	114-152
9 ila <12 ay	109-145
12 ila <18 ay	103-140

18 ila 24 ay	98-135
--------------	--------

**Veri kaynağı: Fleming S, Thompson M, Stevens R ve ark. Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: A systematic review of observational studies. Lancet 2011; 377:1011*

Bu aralıklar uyanık ve rahat durumdaki bebekler için normal aralıklardır ancak kalp atış hızları etkinliğe bağlı olarak değişebilir.

Örneğin:

- Derin uykuda oldukları sırada bebeklerin kalp atış hızının belirtilen aralıklardan yavaş olması çok yaygın görülen bir durumdur.
- Ağladıkları veya ateşli oldukları sırada bebeklerin kalp atış hızının belirtilen aralıklardan hızlı olması da çok yaygın görülen bir durumdur.

Cihazınızı kurup Owlet Dream App'i bağladıktan sonra, rutin etkinlikler sırasında bebeğinizin kalp atış hızının normalde ne düzeyde olduğunu öğrenmeniz iyi olacaktır. Böylece ileride çok farklı bir durum olursa fark edebilirsiniz.

Örneğin, bebeğinizin kalp atış hızı uyku hâlindeyken normalde dakikada 120 atış olabilir. Dakikada 180 atış seviyesinde kalp atış hızı gördüğünüzde sistem sizi uyarmaz ancak yine de herhangi bir rahatsızlık veya hastalık belirtisi olup olmadığını görmek için bebeğinizi kontrol etmeniz de fayda olabilir.

Kontrol etmeniz gereken durumlar arasında aşağıdakiler bulunabilir:

- Bebeğin dudaklarının rengi (her zamanki gibi pembe mi yoksa mavi mi?)
- Solunum (hızlı veya zor mu?)
- Uyanıklık seviyesi (bebeğiniz sesinize veya dokunuşunuza tepki veriyor mu?)
- Sıcaklık (bebeğinize dokunduğunuzda vücudu sıcak mı yoksa soğuk mu?)

Bebeğinizin nefes almasını engelleyebilecek hiçbir nesnenin bulunmadığından emin olmak için bebeğinizin uyku pozisyonunu ve uyuduğu ortamı da kontrol etmelisiniz.

Sesli bildirim verilmemiş olsa bile çocuğunuzun sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa çocuğunuzun sağlık uzmanıyla iletişime geçmeniz önerilir.

7.2.2 Oksijen Seviyeleri

Oksijen seviyesi, bebeğin kanında bulunan oksijen yüzdesi olarak ifade edilir. Owlet Dream App'te oksijen seviyeleri %SpO2 (fonksiyonel oksijen doygunluğu) olarak gösterilir. Dream Sock, arteriyel hemoglobin fonksiyonel oksijen doygunluğunu (SpO2) gösterecek şekilde kalibre edilmiştir.

Sağlıklı bebeklerde oksijen seviyeleri yetişkinlerle benzerdir. Gerçekleştirdiği etkinlikten bağımsız olarak, bebeklerde oksijen seviyeleri genellikle %90'ın üzerinde görülür. Oksijen seviyeleri bebeğin başlangıç değerine göre hafif (%5'lik bir aralık içinde) değişiklik gösterebilir. Yüksek rakımda bebeklerin oksijen seviyeleri deniz seviyesindekilere göre biraz daha düşük olabilir ancak yine de %90'ın üzerinde seyreder.

Cihazınızı kurup uygulamayı bağladıktan sonra bebeğinizin normal oksijen seviyelerini öğrenmeniz iyi olacaktır. Owlet cihazı oksijen doygunluğu seviyesi %80'e veya altına düştüğünde bir Sağlık Bildirimi gönderir.

Ancak bazı durumlarda bebeğin oksijen seviyesi %90'ın altında olduğu hâlde bildirim sınırı olan %80'e düşmemiş olabilir.

Bu durumun en yaygın nedeni, bebeğin solunumu etkileyen bir virüs alarak hastalanmış olmasıdır. Oksijen seviyesinin %80 ile %90 arasında olduğunun gözlenmesi ve bu durumun bir seferde birkaç saniyeden uzun sürmesi hâlinde, bebeğin burun tıkanıklığı, hızlı veya zor nefes alma ve hırıltı dâhil olmak üzere solunum güçlüğü belirtileri gösterip göstermediğini anlamak için kontrol edilmesi gerekir.

Kontrol etmeniz gereken durumlar arasında aşağıdakiler bulunabilir:

- Bebeğin dudaklarının rengi (her zamanki gibi pembe mi yoksa mavi mi?)
- Solunum (hızlı veya zor mu?)
- Uyanıklık seviyesi (bebeğiniz sesinize veya dokunuşunuza tepki veriyor mu?)
- Sıcaklık (bebeğinize dokunduğunuzda vücudu sıcak mı yoksa soğuk mu?)

Bebeğinizin nefes almasını engelleyebilecek hiçbir nesnenin bulunmadığından emin olmak için bebeğinizin uyku pozisyonunu ve uyuduğu ortamı da kontrol etmelisiniz.

Bildirim almamış olsanız bile çocuğunuzun sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa çocuğunuzun sağlık uzmanıyla iletişime geçmeniz önerilir. Düşük veya çok düşük oksijen doygunluğu eğilimleri konusunda endişeleriniz varsa sağlık uzmanınızla iletişime geçin.

7.3 Uyku Durumu Göstergeleri

Ana ekranda gösterilen uyku durumu, uyku seansı boyunca çocuğunuzun durumu hakkında size bilgi vermek için dakikada bir güncellenir. Uyku seansı grafiğinde, gerçek zamanlı uyku durumu göstergeleri 10 dakika süreyle izlendikten sonra alınan veriler gösterilir. Bu veriler aşağıda gösterilmektedir.

Uyku Durumu Göstergeleri

Uyku durumu göstergeleri, Sock'tan ölçülen uyanma sayısını ve hareketlilik derecesini gösterir.

- **Uyanma Sayısı**
 - Mevcut uyku seansı boyunca uyanma sayısı.
- **Hareketlilik**
 - Bebeğin mevcut durumu, “hareketsiz” veya “hareketli” şeklinde gösterilir. Hareket ölçümlerin kalitesini etkileyebilir.

Aşırı hareket algılanırsa Baz İstasyonunun ışığı eflatun renkte hızla yanıp söner (Eflatun Renkli Bildirimler hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.3.2.4'e bakın).

7.4 Owlet Dream App'teki Sekmeler

Bu Bölüm her zaman Owlet Dream App'in en alt kısmında gösterilir ve uygulamanın diğer ekranlarına geçmenizi sağlar.



Ana Ekran

Bu ekran, bebek ve cihazla ilgili ayrıntıların yer aldığı ana ekrandır.

Rutin Geçmişi

Owlet Dream App'teki Geçmiş sekmesi, bebeğinizin geçmiş uyku seanslarında alınan ölçümleri görüntüler. Son 30 güne ait uyku geçmişine ulaşılabilir.

Kılavuz

Tüm kılavuzlara ve eğitimlere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Hesap

Hesap ayrıntılarını ve çocuk profillerini yönetmenizi sağlar. Destek sohbetlerine erişmenize olanak tanır. Ayrıca Sohbet ve Telefon aracılığıyla destek seçeneklerine erişim imkânı sunar.

Hesap sekmesinde aşağıdaki bölümler yer alır:

- Hesabım
 - Profilim: Kişisel Bilgiler (Çıkış Yap seçeneğini içerir)




DİKKAT. Mobil uygulamada hesabınızdan Çıkış yaparsanız cihazınıza anlık bildirim veya alarm gönderilmez.

- Yardım ve Destek: Müşteri desteği ve Sorun Giderme
- Çocuk Profilleri
 - Mevcut çocuk profillerinin listesini gösterir, düzenleme veya ekleme seçenekleri sunar.
 - Hesabınıza yeni bir bebek eklemek için bu bölümü kullanabilirsiniz.
- Owlet Cihazlarım
 - Mevcut cihazların listesini gösterir ve cihaz ekleme seçeneği sunar.
 - Hesabınıza yeni bir cihaz eklemek için bu bölümü kullanabilirsiniz.

7.5 Geçmiş ve Seans Ayrıntılarını Anlama

Geçmiş sekmesinde, daha önce kaydedilmiş uyku seanslarından birine dokunduğunuzda, ilgili seansın uyku ayrıntıları sayfasına yönlendirilirsiniz. Uyku seansı, uyku etkinliğinin başlangıcından sonuna kadar olan süre olarak tanımlanır. Son 30 gün içinde ilgili seansta kaydedilen çeşitli metrikler için uyku durumu göstergelerinden alınan verileri görebilirsiniz. Bu özellik, bebeğinizin uyku düzenlerine ve uyku durumunu ve süresini gösteren farklı uyku durumu göstergelerine dair genel bir görünüm sunar.

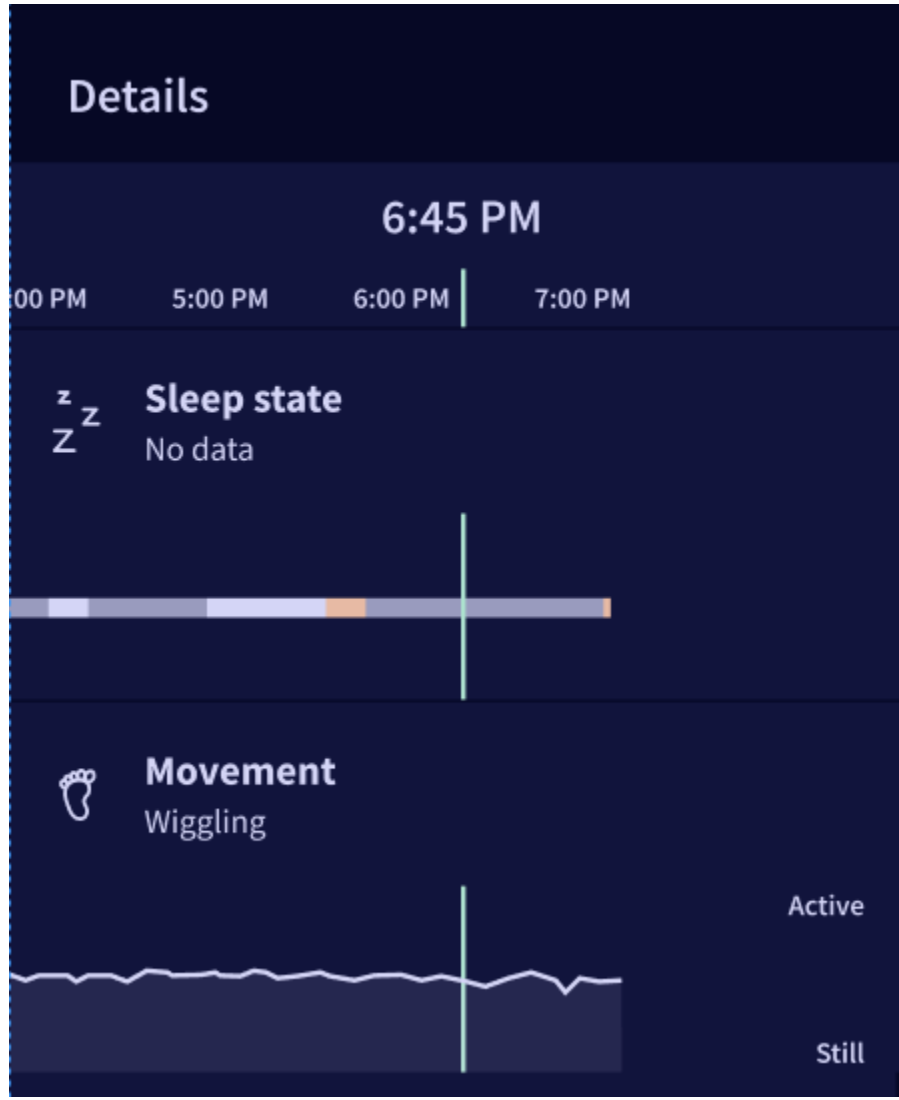

Geçmiş sekmesinde belirli bir uyku seansını göremiyor musunuz?

- **Seanslar anında ekrana yansıtılmaz:** Bir uyku seansının Geçmiş bölümünde görüntülenmesi 10 dakika sürer. Seans görüntülenebilir hâle geldikten sonra 10 dakikada bir güncellenir.
- **Çocuk uyumuyordur:** Sock, uyku seansı oluşturabilmek için çocuğun uyuduğunu algılamalıdır. Çocuğunuz uyanıksa seans Geçmiş bölümünde görünmez.

7.5.1 Oksijen ve Kalp Atış Hızı Geçmişini Kullanma

Sağlık Bildirimlerinin etkinleştirilmesi, Bakım Verenlerin geçmiş uyku seansı verilerini ve kalp atış hızı ve oksijen grafiklerini görüntülemesine olanak tanır. Bu özelliğin [Bölüm 5.3](#)'te verilen talimatlar uygulanarak etkinleştirilmesi gerekir. Geçmişe ilişkin grafikler, uyku seansı boyunca ölçülen kalp atış hızı ve oksijen seviyesine dair eksiksiz bir görünüm sunar. Grafikler 10 dakikalık kalp atış hızı ve oksijen ortalamalarını görüntülemenizi sağlar.




NOT: Bu grafik, cihaz tarafından oluşturulan alarmların (fizyolojik ve teknik) geçmiş kaydını **İÇERMEZ**.

Owlet Dream App'te, soru işareti şeklindeki yardım simgesine dokunularak hızlı başvuru kaynakları olan araç ipuçlarına ulaşılabilir.



Geçmiş sayfasındaki araç ipuçlarında, çocuklar için yaşa göre normal olan geçmiş oksijen ve kalp atış hızı değerlerini gösteren bir hızlı başvuru tablosu yer alır.

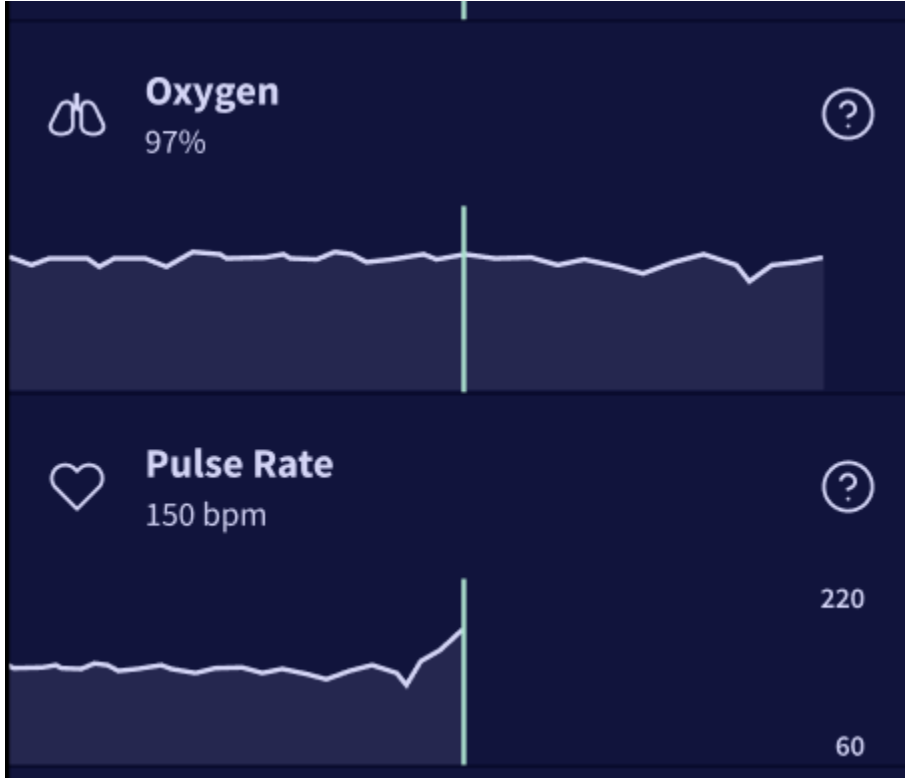

7.5.1.1 Oksijen Eğilimleri

Sağlık Bildirimi yazılım özellikleri etkinleştirildiğinde, oksijen ölçümlerinin eğilimini gösteren bir grafik kullanılabilir hâle gelir. Bu grafik, bir uyku seansı boyunca ölçülen oksijen seviyesi düzenine dair genel bir görünüm sağlar. Sock'ın giydirildiği bir bebeğin oksijen seviyesinin %90'ın üzerinde olması beklenir. Ancak oksijen seviyesinin uzun süre boyunca düşük olması, eğilim çizgisinde düşüş şeklinde gösterilebilir. Grafikte, uyku seansı boyunca ölçülen oksijen seviyelerinin ortalaması da gösterilir.

Çocuğunuzun oksijen düzeninde bir değişiklik gözlemlerseniz çocuğunuzda herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığını ve çocuğunuzun uyku ortamında herhangi bir güvenlik sorunu bulunup bulunmadığını da kontrol etmeniz önerilir. Ayrıca Sock'tan alınan canlı oksijen ölçümüne bakarak çocuğunuzun normal oksijen seviyelerinden farklı olup olmadığını da tespit edebilirsiniz. Çocuğunuzun sağlığı konusunda endişeleriniz varsa tavsiye almak için sağlık uzmanınızla iletişime geçin. Düşük veya çok düşük oksijen doyumluğu eğilimleri konusunda endişeleriniz varsa sağlık uzmanınızla iletişime geçin.


7.5.1.2 Kalp Atış Hızı Eğilimleri

Sağlık Bildirimi yazılım özellikleri etkinleştirildiğinde, kalp atış hızı seviyelerini izleyen grafikte, kalp atış hızı ölçümlerinin eğilimi gösterilir. Bu grafik, bir uyku seansı boyunca ölçülen kalp atış hızı düzenine dair genel bir görünüm sağlar. Sock'ın giydirildiği bir bebeğin kalp atış hızının, uyku sırasında uyanık olduğu saatlere kıyasla daha düşük olması beklenen bir durumdur (uyanık durumdaki normal kalp atış hızı hakkında bilgi için [Bölüm 7.2.1](#)'e bakın). Özellikle çocuğunuz geceleri uyanmaya devam ediyorsa kalp atış hızında değişkenlik görmeniz normaldir. Grafikte, uyku seansının tamamına ait ortalama kalp atış hızını da görebilirsiniz.

Çocuğunuzun ortalama kalp atış hızında büyük bir değişiklik gözlemlerseniz bu durum çocuğunuzun rahatsız olduğuna, daha çok kez uyandığına veya hastalanmakta olduğuna işaret ediyor olabilir. Çocuğunuzda herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığını ve çocuğunuzun uyku ortamında herhangi bir güvenlik sorunu bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz önerilir. Çocuğunuzun sağlığı konusunda endişeleriniz varsa tavsiye almak için sağlık uzmanınızla iletişime geçin.


7.6 Sensör pil seviyesi

Sensörün pil seviyesini Owlet Dream App'ten kontrol edebilirsiniz.

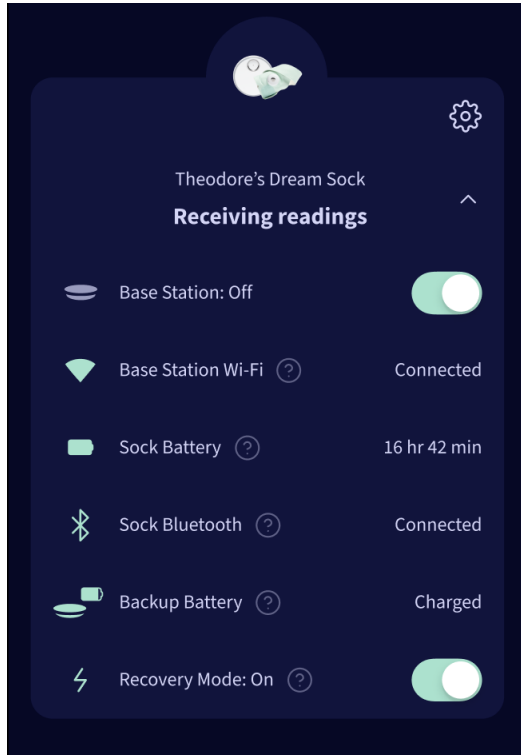

Baz İstasyonunun ışığının beyaz renkte yanıp sönmesi Sensörün şarj edilmekte olduğunu, ışığın beyaz renkte sürekli yanması Sensörün tamamen şarj olduğunu belirtir.


“Sock Pili Zayıf” Bildirimi

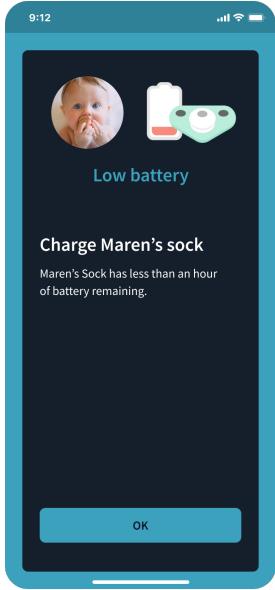

Sensör pilinin 50 dakikadan az çalışma süresi kaldıysa (%10 şarj) DreamApp'te mavi bir bildirim gösterilir. Baz İstasyonu bir ses çalar ve ışığı mavi renkte yanar.


Pil durumunu istediğiniz zaman Sensör durum ekranından da görüntüleyebilirsiniz.

Sensör Pil Seviyesi Durumu

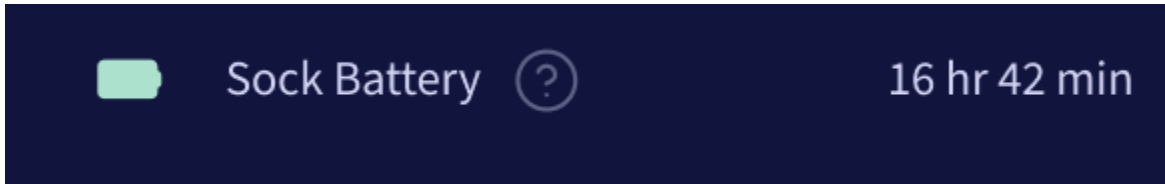

Sensör Pili kalan çalışma süresini gösterir. Sensör, Baz İstasyonuna yerleştirilmiş durumdaysa şarj durumunu gösterir.

Baz İstasyonu Yedek Pil Durumu

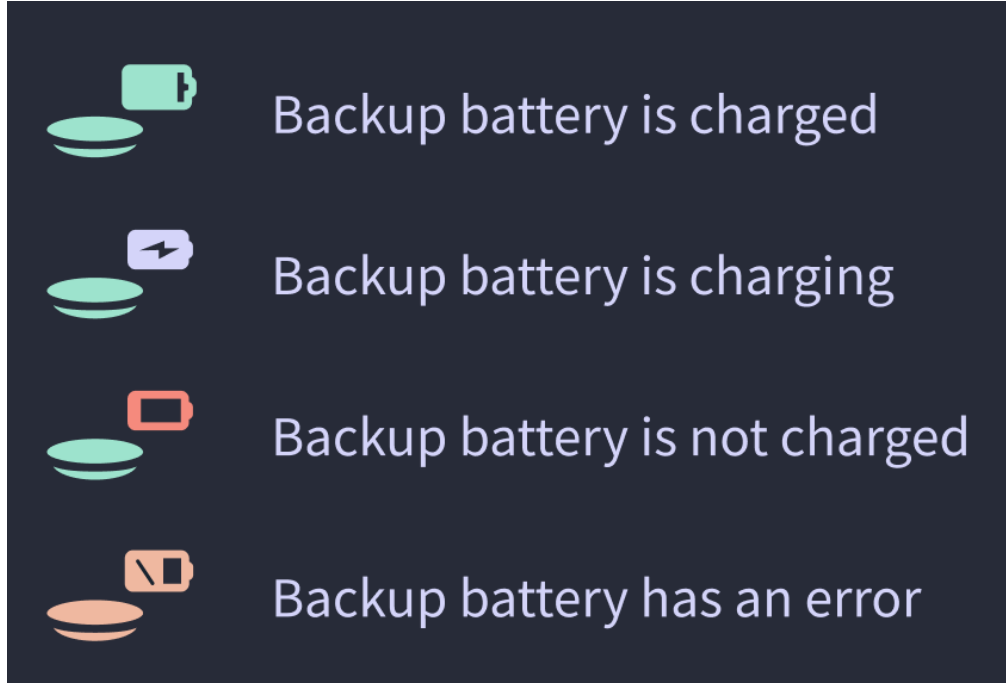

Yedek Pil, Baz İstasyonu yedek pilinin mevcut pil durumunu gösterir. Şarj edilmiş durumda olduğunda, yedek pil güç kesintisi yaşandığında Baz İstasyonunun size anında ışıklı ve sesli bildirim göndermesine ve çocuğunuz izlemeye devam etmesine olanak tanır. Cihaz yedek pil ile çalışırken Wi-Fi bağlantısı kullanılamaz. Baz İstasyonunuz prize takıldığında yedek pil otomatik olarak şarj olur. Yukarıda tüm yedek pil durumlarının listesi verilmektedir.

8. Güvenli Bir Uyku Ortamına Yönelik İpuçları

Bebeğinizin sağlığı, Owlet olarak bir numaralı önceliğimizdir. Bebeğinizin sağlıklı ve güvende kalmasını sağlayacak bazı ipuçlarını aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

- Bebeğinizi uyuması için her zaman tek başına ve sırt üstü yatırın. Bebeğinizi uyuması için yan veya yüz üstü yatırmak güvenli değildir.
- Mevcut güvenlik standartlarına uygun bir bebek yatağı kullanın. Bebek yatağına tam oturan ve yalnızca sıkı bir yatak çarşafı ile örtülmüş sert bir şilte kullanın.
- Bebeğinizin uyku alanına yumuşak, tüylü veya serbest hâlde hiçbir şey koymayın.

Bu tür eşyalara örnek olarak yastıklar, battaniyeler, yorganlar, kenar yastıkları, doldurulmuş oyuncak hayvanlar, oyuncaklar veya diğer yumuşak eşyalar gösterilebilir.

- Bebeğinizi güvende ve sıcak tutmak için klasik battaniyeler yerine giyilebilir battaniye veya benzeri bir uyku tulumu kullanın.
- Bebeğinizi kendi yatağınızda uyutmak yerine odanıza yerleştirdiğiniz bebek yatağında yatırın. Bebeğinizin uyku alanını kendi yatağınızdan ayrı ama yatağınıza yakın tutun. Böylece bebeğinizi güvende tutabilir ve onu daha kolay besleyebilirsiniz. Dream Sock, bebeğinizi kendi yatağınızda uyuttuğunuzda düzgün çalışmaz. Vücudunuz Dream Sock'ın kablosuz sinyalinde parazite neden olur.
- Kendi yatağınızda, kanepede veya koltukta bebeğinizle birlikte uyuyakalmaktan kaçının.
- Bebeğinizin yetişkin veya çocuk yatağı, kanep, koltuk, su yatağı, yastık, minder,

yorgan, koyun postu ve benzeri bir yumuşak yüzeyde uyumasına asla izin vermeyin.

- Bebeğinizi desteklemek, sırt üstünde kalmasını sağlamak veya yuvarlanmasını engellemek için normal yastık, eğimli yastık veya pozisyon verme yardımcılarını kullanmayın.
- Bebeğinizin çok fazla ısınmamasına dikkat edin. Bebeğinize ince pijamalar giydirin ve oda sıcaklığını ince giyinmiş bir yetişkinin rahat edeceği düzeyde tutun.
- Gündüz ve gece uykusu için yatırırken bebeğinize emzik verebilirsiniz.
- Bebeğinizin bakımıyla ilgilenen herkesi güvenli uykuya ilişkin bu kurallar hakkında bilgilendirin!
- **Kabloya dolanarak boğulma tehlikesini** önlemek için Baz İstasyonunu ve kabloyu bebek yatağından **uzakta** ve bebeğin erişemeyeceği bir yerde tutun.

8. Temizlik

8.1 Sock'ın ve Sensörün Temizlenmesi

Kumaş Sock ve Sensöre iyi bakmanız, cihazın daha uzun ömürlü ve bebeğiniz için daha konforlu olmasını sağlar. **En az iki haftada bir Sock'ı temizlemenizi ve Sensördeki kirleri gidermenizi**, gözle görülür şekilde kirlendiklerinde ise temizleme sıklığını artırmanızı öneririz. Böylece bebeğinizin cildinin tahriş olmasını önleyebilirsiniz. Sock'ı ve Sensörü düzgün bir şekilde kapatmak, Dream Sock'ı temizleyip kurutmak ve Sensördeki kirleri gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

1. Yumuşak bir çamaşır deterjanı (Bebeğinizin çamaşırlarını yıkarken kullandığınız yumuşak çamaşır deterjanını kullanın).
2. Temiz ve yumuşak kıllı bir diş fırçası.
3. Temiz, kuru bir havlu.
4. Tahliye tapası olan bir lavabo (leğen veya kase de kullanabilirsiniz).

Cilt tahrişine ne neden olur?

Aşağıdaki üç nedene bağlı olarak sensörün altındaki bölgede cilt tahrişi oluşabilir:

1. Sensörün temizlenmemesi nedeniyle kir, yağ ve bakteri birikmesi.
2. Bebeğinizin hassas cildini kurutan, tahriş eden veya bebeğinizin cildi için çok sert olan bir deterjan kullanmak.
3. Temizlikten sonra Sensördeki deterjanın tamamen giderilmemesi.

Temizlemeden önce Sensörü kapatın



DİKKAT! Temizlemeden önce Sensörü KAPATIN.

Temizlik sırasında hasar görmesini önlemek için aşağıdaki adımları uygulayarak Sensörü kapatın:

1. Baz İstasyonunu prizden çıkarın
2. Bebeğinizin ayağına giydirilmiş durumdaysa Sock ve Sensörü bebeğinizin ayağından çıkarın.
3. Baz İstasyonunu tekrar prize takarken Baz İstasyonu düğmesini basılı tutun ve ilk uyarı sesini duyana kadar Baz İstasyonu düğmesine basmaya devam edin.
4. Baz İstasyonundan gelen ilk uyarı sesini duyduğunuz anda düğmeye basmayı hemen bırakın. Ardından Baz İstasyonu yanıt olarak 4 kez uyarı sesi çalar ve ışık halkası turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.
5. Baz İstasyonu düğmesine bir kez basın.
Önemli: Sensörü düzgün bir şekilde kapatmak için ışık halkası turuncu renkte yanıp sönerken Baz istasyonu düğmesine basmanız gerekir.
6. Baz İstasyonu tek bir uyarı sesi çalar, Baz İstasyonunun altındaki Sock ışığı yanmaz ve Sensörün üzerindeki ışık söner.
7. Baz İstasyonunun tamamen kapanmasını bekleyin. Bundan sonra temizliğe başlayabilirsiniz.
8. Sensör kapanmıyorsa Sensörü baz istasyonuna yerleştirin ve bu adımları tekrarlayın.

Sensörü kapatmak için alternatif olarak aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz:

1. Sensörü Kapat (Owlet Dream App'te Hesap > Cihaz Seç > Sensörü Kapat), bkz. [Bölüm 9.4](#).

Sock'ı ve Sensörü Temizleme

Sock ve Sensör saatlerce bebeğinizin cildine yakın temas ettiğinden, deterjanın bebeğinizin cildinde tahrişe yol açma olasılığı vardır. Kullanacağınız deterjanı seçmek, temizlik sürecinin çok önemli bir adımıdır. Bebeğinizin cildi bebek kıyafetlerini yıkamak için kullandığınız çamaşır deterjanına alışık olduğundan, cihazı temizlerken de bu deterjanı kullanmanızı öneririz.



DİKKAT! El sabunu, antibakteriyel sabun veya bulaşık deterjanı kullanmaktan kaçının. Bu malzemeler uzun vadede bebeğinizin cildinde aşırı kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. En başarılı yaklaşım, her zaman kullandığınız çamaşır deterjanını suyla karıştırarak köpüklü bir çözelti oluşturmaktır. Bu yaklaşım, deterjanın sensöre yapışmasını önlemeye yardımcı olur.

1. Temizleme çözeltinizi hazırlayın:

- Su ve çamaşır deterjanını karıştırarak seyreltilmiş, deterjanlı bir çözelti hazırlayın.
- Lavabonuzun giderini kapatın ve içine soğuk ile ılık arası su doldurun (leğen veya kase de kullanabilirsiniz).
- Az miktarda çamaşır deterjanını suya ekleyip çözeltiyi ellerinizle karıştırın.

2. Sensörünüzü temizleyin:



DİKKAT! Sensörü kesinlikle suya BATIRMAYIN veya çamaşır makinesinde YIKAMAYIN. Sensör suya dayanıklıdır ve yalnızca silerek temizlenmelidir.

- Kapalı olduğundan emin olmak için Sensörün ışığını kontrol edin. Işık açıksa kapatmak için yukarıdaki adımları uyguladığınızdan emin olun. Sensörü yalnızca kapalı durumdayken temizlemeniz önemlidir.
- Sensörü Sock'tan ayırın.
- Sensörü deterjanlı çözeltiye **BATIRMAYIN**. Sadece Sock suya batırılabilir.
- Diş fırçasının kollarını deterjanlı çözeltiye batırın, fazla suyu gidermek için diş fırçasına hafifçe vurun ve Sensörü diş fırçasını kullanarak dairesel hareketlerle fırçalayıp nazikçe ovun.
- Diş fırçasını akan suyla durulayın ve hafifçe vurarak fazla suyu giderin.
- Yine diş fırçasını kullanarak nazik ve dairesel hareketlerle Sensörü fırçalayıp kalıntılardan arındırın.
- Deterjanlı çözeltiyi Sensörden temizlerken sıkça ara verip diş fırçasını tamamen durulayın ve her seferinde hafifçe vurarak fazla suyu giderin.
- Bu "durulama" işlemini, Sensörün üzerindeki tüm kir ve yağ giderilene kadar gerektikçe tekrarlayın. Sensörün üzerinde deterjanlı çözelti veya kalıntı kalmamalıdır.

3. Sensörü kurulayın:



DİKKAT! Sensörü kesinlikle suya BATIRMAYIN veya çamaşır makinesinde YIKAMAYIN. Sensör suya dayanıklıdır ve yalnızca ovularak temizlenmelidir.

- a. İlk nemi almak için kuru bir havluyla hafifçe bastırarak Sensörü silin.
- b. Sensörü havlunun üzerine yerleştirin ve havayla tamamen kurumaya bırakın. Sensörü kurutma makinesinde **KURUTMAYIN**.
- c. Aşırı aşınma veya hasar olup olmadığını anlamak için Sensörü görsel olarak **inceleyin**.

4. Sock'ı temizleyin:

- a. Sock'ı çamaşır makinesinde hassas yıkama programında yıkayın.
- b. Sock'ı bir havlunun üzerine düz şekilde sererek veya asarak tamamen kurumaya bırakın. Sock'ı kurutma makinesinde **KURUTMAYIN**.
- c. Aşırı aşınma veya hasar olup olmadığını anlamak için Sock'ı görsel olarak **inceleyin**. Sock'ları gerektikçe değiştirin.



DİKKAT! Sock'ı veya Sensörü otoklavlamayın veya sıvılara batırmayın, amonyak, çamaşır suyu ya da alkol gibi yakıcı veya aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Sert kimyasal maddeler Sock'a veya Sensöre zarar verebilir.

8.2 Sock'ı veya Sensörü Ne Zaman Değiştirmelisiniz?

Sock ve/veya Sensör aşağıdaki durumlarda değiştirilmelidir:

- Sock esnemişse, kumaş ayrılıyorsa veya üzerinde delikler ya da pürüzler varsa.
- Kumaş veya Sensör pencereleri yırtılmış, eğrilmiş veya başka şekilde hasar görmüşse.
- Bağlayıcı aşınmışsa ve artık düzgün bir şekilde tutturulamıyorsa.
- Çok kez temizlendiği hâlde gözle görülür lekeler/kirler çıkarılamıyorsa.
- Sock veya Sensör insan atığı gibi bulaşıcı maddelerle temas etmişse.

Sock'ın deęiřtirilmesi hakkında bilgi edinmek iin [Bölüm 14](#)'e bakın.

8.3 Baz İstasyonunun Temizlenmesi

Ařaęıdaki durumlarda Baz İstasyonunun temizlenmesi gerekir:

- Görünür řekilde kirlendięinde
 - En az 30 günde bir
1. İzlemeyi kapatın ve Baz İstasyonunu prizden çıkarın.
 2. Yumuřak bir bezi yumuřak bir temizlik özeltisiyle nemlendirin.
 3. Baz İstasyonunu nemli bezle silin.
 4. Baz İstasyonunu kurulaýın veya havayla kurumaya bırakın.



DİKKAT! Baz İstasyonu muhafazasına sıvı kamasını önlemek iin temizlik özeltilerini dikkatli bir řekilde kullanın.

9. Bakım

Dream Sock'ta bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bileřen bulunmamaktadır ve kalibrasyona gerek yoktur. Rutin bakım ařaęıdakileri kapsar:

- Cihazın hasar ve temizlik aısından incelenmesi. Cihaz hasarlı görünüyorsa cihazı **KULLANMAYIN**.
- Cihazın [Bölüm 8](#)'de verilen temizlik talimatlarına uygun řekilde temizlenmesi.

9.1 Sensör Pilinin Bakımı

Sensör pili deęiřtirilemez ve bakıma tabi tutulamaz. Sensör pilinin performansı kullanım süresine ve miktarına baęlı olarak azalabilir. Tam řarj edilmiř bir Sensör en az 8 saat süreyle alıřmıyorsa deęiřtirilmelidir. Uzun süreli saklama iin [Bölüm 10](#)'a bakın.

9.2 Baz İstasyonu Pilinin Bakımı

Baz İstasyonu pili deęiřtirilemez ve bakıma tabi tutulamaz. Uzun süreli saklama iin [Bölüm 10](#)'a bakın.

Baz İstasyonu pilinin sağlamlığı ilk kullanımda ve her üç ayda bir test edilmelidir. Baz İstasyonu ilk kez kullanılmadan önce prize takılmalı ve Baz İstasyonu pili şarj edilmelidir.

Baz İstasyonu Pilinin Test Edilmesi

1. Sensörü en az 10 dakika şarj edin.
2. Sensörü Baz İstasyonundan çıkarın, ardından izleme başlatın.
3. Baz İstasyonunu prizden çıkarın. Gücün kesildiğini doğrulayın. Bildirimler etkinleşir ve Baz İstasyonu kapanmadan önce en az 2 dakika daha bildirimler gösterilmeye devam eder. Aksi takdirde Baz İstasyonunu değiştirmek için Owlet Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin. İletişim bilgileri için bu kılavuzdaki [Bölüm 14](#)'e bakın.

!

• **NOT:** Bu test sırasında Sensör bebeğe bağlı olabilir veya olmayabilir.

!

• **NOT:** Bu test sırasında sistem orta öncelikli alarm çalar.

9.3 Bildirim Sinyalinin Oluşturulmasının Test Edilmesi

Bakım Verenler, ürünün kullanılmadan saklandığı dönemin sonunda veya en az 6 ayda bir Dream Sock sisteminin doğru bildirimler ürettiğini doğrulamalıdır. Her bir bildirim önceliğinin özizlemesini yapın ve Baz İstasyonu ile Owlet Dream App'in beklenen şekilde bildirim gönderdiğini doğrulayın. Bildirimler amaçlanan şekilde gönderilmiyorsa cihazı kullanmayı bırakın ve Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin.

Düşük veya orta öncelikli bildirimleri test etmek için kılavuz sekmesine gidin ve “bildirimleri anlama” makalesine dokunun. Her bildirim için özizleme yapılacaktır.

Sağlık Bildirimleri ile ilişkili yüksek öncelikli bildirimleri test etmek için Sock ayarlarında bulunan zorunlu eğitimi kullanabilirsiniz.

9.4 Sensörün Kapatılması ve Açılması

Owlet, şarj etmek ve güvenli bir şekilde saklamak için Sensörü kullanmadığınız zamanlarda Baz İstasyonuna yerleştirmenizi önermektedir. Sensör sadece temizlemek ve kısa veya uzun süreli olarak saklamak için kapatılmalıdır.

Sensörü kapatma

1. Ana Ekranda ayarlar dişli simgesine  basın veya Hesap seçeneğine basıp Owlet Cihazını seçin.
2. “Sensörü Kapat”a basın.

Sensördeki kırmızı ışık söner ve izleme sonlandırılır.

Sensörü açma

Sensör şarj cihazından çıkarıldığında açılır. Açmak için Sensörü en az 3 saniye boyunca Baz İstasyonunun şarj bağlantı noktasına yerleştirin, ardından çıkarın.

9.5 Sensörün Eşleşmesini Kaldırma

Sensörün eşleşmesini kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Baz İstasyonunun fişini çekin ve bebeğinize giydirilmiş durumdaysa Sock’ı çıkarın.
2. Baz İstasyonunu tekrar prize takarken Baz İstasyonu düğmesini basılı tutun. Dream Sock Baz İstasyonunun 4 uyarı sesi çıkardığını duyana kadar düğmeye basmaya devam edin. Işık halkası turuncu renkte yanıp sönmeye başlar. Uyarı sesi duyulduktan sonra düğmeye basmayı bırakın.
3. Dream Sock Baz İstasyonu düğmesine iki (2) kez hızlıca basın. Baz İstasyonu ışık halkası turuncu renkte yanıp sönüyor olmalı, aksi takdirde Dream Sock Sensörü düzgün bir şekilde kapanmaz.

Kapatma işlemi başarılı olursa Baz İstasyonunun altındaki Sock ışığı yanmaz ve Sensör KAPANMAZ. Baz İstasyonu kısa bir süre beyaz renkte yanıp söner, ardından maviye döner ve bağlantı kesme bildirimi duyulur.

9.6 Sensörünüzü Eşleştirme

Sensörünüzü eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Sensörü Baz İstasyonunun şarj bağlantı noktasına yerleştirin.
2. Dream Sock eşleştirildiğinde Baz İstasyonu ışığı beyaz yanıp sönmek yerine sürekli beyaz yanmaya başlar.
3. Mavi bir bildirim gösteriliyorsa Sensör başarıyla eşleştirilmemiştir. Eşleştirme talimatlarını tekrar uygulayın. Lütfen şarj bağlantı noktasının temiz olduğundan ve Dream Sock'ın şarj bağlantı noktasına iyi temas ettiğinden emin olun.

Başarılı olursa Baz İstasyonunun alt kısmında bulunan “Sock” ışığı yanar. Eşleştirilmiş Sensör Baz İstasyonundan çıkarıldığında Dream Sock Baz İstasyonu ışığı yeşil renkte yanıp söner.

10. Saklama ve Bertaraf

10.1 Saklama






Dream Sock sistemi uzun süre saklanacağı zaman, Dream Sock'ın düzgün çalışmaya devam etmesini sağlamak için dikkatli olunmalıdır. Dream Sock'ı saklamak için aşağıdaki adımları uygulayın. Daha fazla bilgi için Bölüm 16'ya bakın.

Saklama Talimatları

1. Sensörü tamamen şarj edin ve Baz İstasyonu yedek pilinin şarj edildiğinden emin olun.
2. Tüm verileri temizleyin (isteğe bağlı, bkz. [Bölüm 10.2](#)).
3. Sensörü KAPATIN (bkz. [Bölüm 9.4](#)).
4. Baz İstasyonunu duvar prizinden çıkarın.
5. Sock'ı, Sensörü ve Baz İstasyonunu temizleyin ve hepsinin tamamen kurumasını bekleyin (bkz. [Bölüm 8](#)).
6. Güç kaynağını ve kabloları toplayın.
7. Orijinal ambalajına veya uygun bir saklama kutusuna koyun.
8. Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.



NOT: Cihazın ömrünü korumak için uzun süreli saklama sırasında Sensörü ve Baz İstasyonunu her 6 ayda bir tam şarj edin.

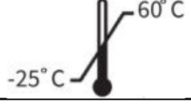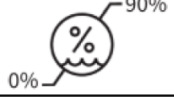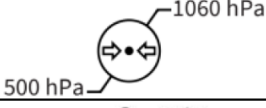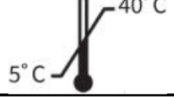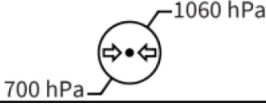Symbol	Specification	Value
	Storage and Transport Temperature Limits	-25°C to +60 °C
	Storage and Transport Humidity Limits	0% to 90 %, non-condensing. Water vapor pressure not to exceed 50hPa.
	Storage Atmospheric pressure Limits	500 hPa to 1060 hPa
	Operating Temperature Limits	+5°C to +40°C
	Operating Humidity Limits	15% to 90 %, non-condensing. Water vapor pressure not to exceed 50hPa.
	Operating Atmospheric pressure Limits	700 hPa to 1060 hPa. This pressure range corresponds to a suitable operating altitude up to 3000 meters.

10.2 Kişisel Verileri Temizleme

Bebeğinizin verilerini silebilir veya Dream Sock cihazını uygulama hesabınızdan kaldırabilirsiniz. Cihazı uygulama hesabınızdan sildiğinizde bebek profili kaldırılmaz ve bebek profilini farklı bir Dream Sock cihazıyla eşleştirebilirsiniz.

Bebek Profilini Silme

1. Owlet Dream App'i açın.
2. Ana Ekrandan şu seçeneği belirleyin: Hesap.
3. Çocuk Profilleri bölümünde silmek istediğiniz profili seçin.
4. Bebek profili ekranını kaydırarak en alt kısma gidin ve şu seçeneği belirleyin: Çocuk Profilini Sil.
5. Profili silmek istediğinizi doğrulayın.



NOT: Bebek profilini silme işlemi geri alınamaz. Bebeğinize ait tüm veriler kaybolur.

Owlet Cihazını Silme

1. Owlet Dream App'i açın.
2. Ana Ekrandan şu seçeneği belirleyin: Hesap.
3. Owlet Cihazlarım bölümünde silmek istediğiniz cihazı seçin.
4. Cihaz bilgisi ekranını kaydırarak en alt kısma gidin ve şu seçeneği belirleyin: Cihazı Kaldır.
5. Cihazı silmek istediğinizi doğrulayın.

Hesap Parolasını Sıfırlama

Hesap parolanızı unuttuysanız parolanızı sıfırlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Owlet Dream App'te "Giriş"e basın (bu yalnızca hesaptan çıkış yapılmış olduğunda mümkündür)
2. "Parolanızı mı unuttunuz?" seçeneğini belirleyin.
3. Hesabınızla ilişkili e-posta adresini girin.
4. E-postayı kontrol edin ve gönderilen bağlantıya gidin.
5. Yeni parolanızı girin ve "sıfırla" düğmesine basın.
6. Uygulamaya geri dönün ve yeni parolanızla giriş yapın.

Hatırlanan Wi-Fi Ağlarını Unutma

1. Sensörü Baz İstasyonundan çıkarın.
2. Güç kablosunu Baz İstasyonundan çıkarın.
3. Güç kablosunu Baz İstasyonuna takarken Baz İstasyonu düğmesini basılı tutun.
4. Baz İstasyonunun ışığı turuncu renkte yanana ve 4 "bip" sesi duyulana kadar Baz İstasyonu düğmesini basılı tutun (10 saniye kadar sürebilir).
5. Daha sonra Baz İstasyonu düğmesine üç (3) kez dokununuz.
6. Baz İstasyonunun alt kısmındaki Wi-Fi ışığının kapalı olduğundan emin olun.
7. Duraklayın ve "bip" sesinin 4 kez çalmasını bekleyin.



NOT: Adımların sırası tanınırsa Baz İstasyonunun alt kısmındaki Wi-Fi ışığı söner.



NOT: "Bip" sesi duymazsanız 5 saniye bekleyin ve 1. adımdan başlayarak tekrar deneyin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, cihazda saklanan tüm bilgilerin silinmesiyle Dream Sock donanımının orijinal ayarlarına tamamen sıfırlanmasıdır.

1. Güç kablosunu Baz İstasyonundan çıkarın.
2. Güç kablosunu takarken Baz İstasyonu düğmesini basılı tutun.
3. Işık turuncu renkte yanana ve 4 “bip” sesi duyulana kadar Baz İstasyonu düğmesini basılı tutun (10 saniye kadar sürebilir).
4. Baz İstasyonu düğmesine 4 kez dokununuz.
5. 4 “bip” sesi duyulduğunda Dream Sock (Baz İstasyonu ve Sensör dâhil) sıfırlanmış demektir.



DİKKAT. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, Dream Sock Baz İstasyonunu ve Sensörü tamamen sıfırlar. Cihaz tekrar kurulana kadar ölçüm veya bildirim alamazsınız.



NOT: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, verilerinizi bulut sunucusundan kaldırmaz.



NOT: “Bip” sesi duymazsanız 5 saniye bekleyin ve 1. adımdan başlayarak tekrar deneyin.

10.3 Bertaraf

Dream Sock’ı bertaraf etmeden önce Sensörü kapatın (bkz. [Bölüm 9.4](#)) ve Kişisel Verileri temizleyin (bkz. [Bölüm 10.2](#)). Sock’ları atın ve ambalaj malzemelerini uygun şekilde geri dönüştürün.



— Elektronik bileşenler içeren parçaları sorumlu bir şekilde bertaraf edin. Çevreyi korumak için yerel atık bertaraf ve geri dönüşüm yasalarına uyun.

11. Sorun Giderme

Kurulum, bağlantı ve işletimle ilgili sorunları çözmek için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu kullanın. Teknik bildirimler dâhil olmak üzere, sorun giderme bildirimleriyle ilgili bilgi için [Bölüm 6.3](#)’e bakın.

Sorun	Olası Nedenler	İşlemler
Kurulum sırasında Owlet Wi-Fi ağı görülmüyor	Baz İstasyonu açık değildir	Baz İstasyonunu prize takın
	Wi-Fi ağına zaten bağlanılmıştır	Baz İstasyonunun altındaki Wi-Fi ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanıyorsa bu adımı atlayabilir ve Uygulamada hesabınızı oluşturmaya devam edebilirsiniz.
Owlet Dream App'te evinizin Wi-Fi ağı görülmüyor	Ev yönlendiriciniz 5,0 GHz'dir (Owlet yalnızca 2,4 GHz'i destekler).	Mobil cihazınızın 2,4 GHz ağına bağlı olduğundan emin olun (çoğu 5,0 GHz yönlendirici 2,4 GHz'i de destekler).
Baz İstasyonu Wi-Fi ağınıza bağlanmıyor	Parola yanlışdır	Wi-Fi ağına parolasını bir kez daha kontrol edin
	Baz İstasyonu Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı dışındadır	Kurulum için Baz İstasyonunu Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın
	Wi-Fi ağı çalışmıyordur	Mobil cihazınızı yeniden başlatmayı ve Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin veya Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın
	Wi-Fi ağında tarayıcı üzerinden kimlik doğrulaması gerekiyordur veya güvenlik duvarı kısıtlamaları vardır	Farklı bir ağına bağlanmayı deneyin
	Ev yönlendiriciniz 5,0 GHz'dir (Owlet yalnızca 2,4 GHz'i destekler)	Mobil cihazınızın 2,4 GHz ağına bağlı olduğundan emin olun (çoğu 5,0 GHz yönlendirici 2,4 GHz'i de destekler)
Owlet Dream App'e giriş yapılamıyor	Parolayı unutmuş olabilirsiniz	Parolanızı sıfırlayın. Bkz. Bölüm 12.2
Sensör, Baz İstasyonuna bağlanmıyor	Sensör, Baz İstasyonunun kapsama alanı dışındadır	Baz İstasyonunu farklı bir yere taşıyın

	Diğer cihazlar Sensörde parazite neden oluyordur	Sensör veya Baz İstasyonunun yakınındaki diğer elektronik cihazların yerini değiştirin ya da Baz İstasyonunu farklı bir yere taşıyın
Baz İstasyonu Owlet Dream App hesabınıza kaydedilemiyor	Baz İstasyonu ve mobil cihazınız aynı Wi-Fi ağına bağlı değildir	Mobil cihazınızın Baz İstasyonu ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu doğrulayın
	Baz İstasyonunun Wi-Fi bağlantısı kesilmiştir	Baz İstasyonunun alt kısmındaki yeşil Wi-Fi ışığını kontrol edin. Bu ışık yanıyor olmalıdır. Yanmıyorsa Baz İstasyonunu Wi-Fi ağına yeniden bağlamayı deneyin.
Sock'ın internet bağlantısı kesildi	Baz İstasyonu Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı dışındadır.	Baz İstasyonu ile Wi-Fi yönlendiricisini birbirine yaklaştırın. (NOT: Wi-Fi kapsama alanı genişletici veya ikinci bir yönlendirici kullanmak işe yaramaz.)
	Evinizin Wi-Fi ağı çalışmıyordur.	Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın.
Uygulama sıfırlandı ve sistemin tekrar kurulması isteniyor	Baz İstasyonu farklı bir kullanıcı hesabına kaydedilmiştir.	Baz İstasyonu aynı anda yalnızca bir hesaba kaydedilebilir. Tüm Bakım Verenler için tek bir hesap kullanın
	Giriş sırasında farklı bir hesap kullanılmıştır.	Owlet Dream App'ten çıkış yapın ve doğru hesapla giriş yapın.

Sorunu çözemiyorsanız veya beklenmedik şekilde çalışma sorunlarını veya olayları bildirmek istiyorsanız Owlet Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin. İletişim bilgileri için bu kılavuzdaki [Bölüm 14](#)'e bakın.

12. Elektromanyetik Uyumluluk

12.1 Elektromanyetik Uyumluluk

Dream Sock, tipik konutlardaki elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı, Dream Sock'ın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. Dream Sock, 2,4 GHz frekans bandında radyo frekans (RF) elektromanyetik enerjiyi kasıtlı olarak ileten ve alan BLE ve Wi-Fi modülleri içermektedir. Dream Sock'ın diğer cihazların çalışmasını engelleyen bir parazite neden olmadığından emin olmak için çevredeki diğer ekipmanların çalışmasını gözlemleyin. Parazit gözlemlenirse Dream Sock baz istasyonunu etkilenen cihazdan uzağa taşıyın.

Sensörün kapsama alanı ortama bağlı olarak değişebilir, mesafeden ve binanın yerleşim planından etkilenebilir. Sensör kapsama alanı dışındaysa Baz İstasyonunu bebeğe yaklaştırın. Sinyal gücü çok düşerse Baz İstasyonu Sensörden veri alamamaya başlar.

12.2 Emisyonlar

Emisyon Testi	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam bilgisi
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	Dream Sock, RF enerjisini yalnızca dâhilî işlevleri için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları düşüktür ve yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir parazite neden olma olasılığı yoktur.
İletilen emisyonlar CISPR 11	Sınıf B	Konutlar ve konut amaçlı kullanılan binalara elektrik sağlayan diğer kamusal düşük voltajlı güç şebekesine doğrudan bağlı tesisler de dâhil olmak üzere tüm tesislerde kullanıma uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC 6100-3-2	Sınıf A	
Voltaj dalgalanmaları/titreşim emisyonları IEC 61000-3-3	Uyumlu	

12.3 Bağışıklık

Aşağıdaki testlerde Dream Sock, spesifikasyonlar dâhilinde çalışmaya devam eder veya bir hata gösterir.

Bağışıklık Testi	IEC 60601-2 test seviyesi	Uyumluluk seviyesi	Elektromanyetik ortam bilgisi
Elektrostatik Deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV temas ±15 kV hava	±8 kV temas ±15 kV hava	Zemin ahşap, beton veya fayans olmalıdır. Zemin sentetik malzemeyle kaplıysa bağıl nem en az %30 olmalıdır.
Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama IEC 61000-4-4	Elektrik hatları için ±2 kV Giriş/çıkış hatları için ±1 kV	Elektrik hatları için ±2 kV Giriş/çıkış hatları için ±1 kV	Şebeke elektriğinin kalitesi tipik bir ev ortamındaki gibi olmalıdır.
Darbe IEC 61000-4-5	±1 kV diferansiyel	±1 kV diferansiyel	Şebeke elektriğinin kalitesi tipik bir ev ortamındaki gibi olmalıdır.
Güç kaynağı giriş hatlarında voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişiklikleri IEC 61000-4-11	%0, 0,5 Periyot %0, 1 Periyot %70, 25 Periyot %0, 5 sn.	%0, 0,5 Periyot %0, 1 Periyot %70, 25 Periyot %0, 5 sn.	Şebeke elektriğinin kalitesi tipik bir ev ortamındaki gibi olmalıdır. Elektrik şebekesi kesintileri sırasında cihaz, pilin sağladığı süreden daha uzun çalıştırılmaya devam edebilecekse sistemin kesintisiz bir güç kaynağına bağlanması tavsiye edilir.
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alanı IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir konut ortamında tipik bir konum için karakteristik

			seviyelerde olmalıdır.
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 6 Vrms (ISM ve Amatör Radyo Bantlarında)	3 Vrms 6 Vrms (ISM ve Amatör Radyo Bantlarında)	Dream Sock, tipik konutların veya ticari ortamların elektromanyetik ortamına uygundur.
Yayılan RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz	

13. Garanti Bilgileri

13.1 Sınırlı Garanti

SINIRLI GARANTİ

Ürünlerimizi amaçlarına uygun şekilde kullanmanız durumunda, yeni ürünler için kurulum tarihinden itibaren 1 yıl, yenilenmiş ürünler için ise 6 ay süreyle ürünlerimizin malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlardan ari olacağını garanti ederiz. Ürünlerimizde genel aşınma ve yıpranmaya veya yanlış kullanım, üründe değişiklik yapma ya da uygunsuz bakım sonucu oluşan zararlara karşı garanti vermeyiz. Kusurlu bir ürün aldığınızı düşünüyorsanız bu sınırlı garantinin şartlarına uygun olarak, kusurlu ürünü veya kusurlu bileşen parçasını/parçalarını onarır ya da değiştiririz. Değiştirilen ürün için orijinal ürünün garanti süresinin kalanı kadar garanti veririz.

Bu sınırlı garanti, yasalarca başka türlü yasaklanmadığı sürece, yalnızca ürünün orijinal alıcısı ve doğrudan bizden veya bir yetkili satıcımızdan satın alınan ürünler için geçerlidir. Ürünlerimiz yasal olarak yalnızca bizim tarafımızdan ve politikalarımıza, prosedürlerimize ve kalite kontrol standartlarımıza uymak zorunda olan yetkili satıcılarımız tarafından satılmaktadır. Yetkisiz web siteleri dâhil, yetkisiz satıcılardan satın alınan ürünlere ilişkin garanti taleplerini reddetme hakkımızı saklı tutarız. Bu sınırlı garanti, ürünün kesintisiz veya hatasız şekilde çalışacağını garanti etmez.

Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin: Bu sınırlı garanti ürünlerimiz için geçerli olan tek garantidir.

Pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluğa dair zımni garantiler dâhil olmak üzere, zımni garantilerin uygulanabilirliği bu sınırlı garantinin süresiyle sınırlıdır. Yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir türdeki diğer tüm garantiler reddedilmektedir. Bazı eyaletler ve ülkeler zımni garantilere ilişkin sınırlamalara izin vermemektedir. Bu nedenle, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Herhangi bir kusur için tek sorumluluğumuz bu sınırlı garantide belirtilen şekilde olacak ve arıza veya dolaylı zararlara ilişkin talepleri hariç tutacaktır. Bazı eyaletler ve ülkeler, arıza veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir.

Bu nedenle, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Hiçbir kişi veya kuruluş bizim adımıza başka bir garanti vermeye yetkili değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar sağlar. Eyaletten eyalete ve ülkeden ülkeye değişen başka haklarınız da olabilir.

Örneğin, bazı yargı alanlarındaki müşteriler, Avustralya Tüketici Yasası veya 99/44 sayılı AT Direktifini uygulayan ulusal yasalar gibi yürürlükteki ulusal mevzuat uyarınca ek haklara sahip olabilir. Bu sınırlı garanti bu tür hakları etkilemez.

<https://owletcare.com/pages/warranty>

13.2 Memnuniyet garantisi

Her Owlet ürünü 30 gecelik İç Rahatlığı Garantisi ile birlikte gelir. Ürününüzden %100 memnun kalmazsanız satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edebilirsiniz. (Sadece owletcare.com sayfasından yapılan alışverişlerde geçerlidir)

14. Servis ve Destek

14.1 Doktorunuzla Ne Zaman İletişime Geçmelisiniz?

Tıbbi konularla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanıyla iletişime geçin.

14.2 Müşteri Desteği

Dream Sock'ın kurulumu, kullanımı veya bakımı konusunda yardım almak ya da beklenmedik şekilde çalışma sorunlarını veya olayları bildirmek için aşağıdaki yolları kullanarak Owlet Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Owlet Baby Care Müşteri Desteği birimine aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz:

Owlet Baby Care, Inc.

2940 West Maple Loop Dr. Suite 203

Lehi, UT 84043 ABD

Ücretsiz Telefon: +1 (844) 334-5330

E-posta: contact@owletcare.com

Sohbet: owletcare.com/chat

www.owletcare.com

Uygulamada Hesap > Yardım ve Destek'e giderek uygulama içi sohbet, e-posta ve telefon üzerinden Müşteri Desteği ekibimizle iletişime geçebilirsiniz ya da <http://support.owletcare.com/> adresine gidebilirsiniz. Daha fazla ipucu için Owlet Dream App'teki Kılavuz Sekmesine bakın.

İşlevlerle ilgili sorularınız varsa Owlet Baby Care Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin.

15. Teknik Bilgiler

15.1 Tepe Dalga Boyları ve Maksimum Optik Güç Çıkışı

Üretim sırasında kızılötesi LED'in tepe dalga boyu 924 nm ile 937 nm arasında olacaktır. Üretim sırasında kırmızı LED'in tepe dalga boyu 649 nm ile 657 nm arasında kalacaktır. Bu bilgiler klinik uzmanlar için faydalı olabilir.

Sensör yayıcılarının maksimum optik güç çıkışı aşağıdaki gibidir:

- Mavi yayıcı: 20 mW
- Yeşil yayıcı: 11 mW
- Kırmızı yayıcı: 13 mW
- Kızılötesi yayıcı: 10 mW
- Tüm yayıcıların toplamı: 54 mW

Dream Sock, tıbbi tanı amacıyla, kızılötesi ışık biçiminde radyasyon yayar. Bu radyasyon iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik niteliktedir.

15.2 Veri İşleme Gecikmesi

Normal çalışma durumunda Sensör için ortalama işlem gecikmesi 5 saniyedir. Cihaz başlatıldığında, sinyal işleme zinciri başlatılana kadar görülen veri işleme gecikmesi 10 ila 15 saniyedir.

15.3 Veri Güncellemesi

Sensör her saniye Baz İstasyonuna veri iletir. Bu veriler arasında Kalp Atış Hızı, Oksijen Doygunluğu, hareket ölçümleri, pil şarjı, sinyal kalitesi ve ölçüm kalitesi bulunur. Sensörün geçerli verileri belirlemekte zorluk çekmesi durumunda, Baz İstasyonuna iletilen verilerin güncellenme süresi 30 saniyeyi aştığında düşük öncelikli bir alarm oluşturulur. NOT: Alarm durumları Baz İstasyonundan Uygulamaya neredeyse hiç gecikme olmadan iletilir (Uygulamanın çalışır durumda olduğu varsayıldığında).

15.4 Alarm Durumu Gecikmesi (Olaydan alarm durumuna kadar geçen süre)

Alarm durumu gecikmeleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Gecikme süresi alarm türüne göre değişir. Belirtilen tüm sürelerle veri işleme gecikmesi, veri güncelleme gecikmesi ve baz istasyonuna iletim süresi dâhildir.

Alarm	Alarm Durumu	Alarm Durumu Gecikmesi
Yüksek Öncelikli	Oksijen, Düşük Oksijen Eşiğinin (%80 SpO2) altına düştü	10 saniye
	Kalp Atış Hızı, Düşük Kalp Atış Hızı Eşiğinin (50 bpm) altına düştü	10 saniye
	Kalp Atış Hızı, Yüksek Kalp Atış Hızı Eşiğini (220 bpm) geçti	10 saniye
Orta Öncelikli	Sensörün Baz İstasyonu bağlantısı 60 saniye boyunca kesildi (bağlantı sorunu) ¹	60+/-3 saniye
	Sensör 90 saniyeden uzun süredir geçerli veri sağlayamıyor ve aşırı hareket yok VEYA Sensör 4 dakikadan uzun süredir geçerli veri sağlayamıyor ve aşırı hareket var (Ölçüm almakta güçlük çekiliyor) ¹	90+/-5 saniye (aşırı hareket yok) 4 dakika+/-5 saniye (aşırı hareket var)
	Sensör bebekten ayrıldı (sensör yerleşimini kontrol edin) ¹	60+/-3 saniye
	Baz İstasyonunun elektrik bağlantısı kesildi	5 saniyeden kısa
Düşük Öncelikli	Sensör pili düşük (Yaklaşık 50 dakika veya daha kısa)	5 saniyeden kısa

¹ Sensör Baz İstasyonundan çıkarıldığında 120 saniyelik bir gecikme yaşanır; bu koşulların oluşması için bu gecikmenin yaşanması gerekir.

15.5 Alarm Sinyali Oluřturma Gecikmesi (Alarm durumundan alarm sinyaline kadar geen sre)

Alarmlar Baz İstasyonu tarafından kontrol edilir ve Baz İstasyonunda sinyal oluřturulmasında veya verilerin mobil cihaza gnderilmesinde llebilir bir gecikme olmaz. Uygulamanın Baz İstasyonuna baėlı olması durumunda, Uygulamadaki sinyalin oluřturulmasında 3 saniyeden az bir gecikme yařanır.

15.6 SpO2 ve Kalp Atıř Hızı Grntleme Aralıkları ve Performansı

Sensr tarafından belirlenen SpO2, hareketli ve hareketsiz kořullarda %70 ila %100 oksijen doygunluėu aralıėında ± 3 Arms dâhilinde doėru olacaktır.

Sensr tarafından belirlenen kalp atıř hızı, hareketsiz kořullarda 30 bpm ile 300 bpm aralıėında ± 3 bpm dâhilinde doėru olacaktır.*

!

NOT: *OSS 3.0 Baz İstasyonu kalp atıř hızını, SPOT SpO2 Simlatrne sahip, kalibre edilmiř Fluke Pro Sim 8 ile karřılařtıran bir alıřmada belirlenmiřtir.

!

NOT: Pulse oksimetre ekipmanı lmleri istatistiksel olarak daėıtıldıėı iin pulse oksimetre ekipmanı lmlerinin yalnızca yaklaşık te ikisinin bir ko-oksime tre tarafından llen deėerin $\pm$ Arms aralıėına dřmesi beklenebilir.

Performansı etkileyebilecek faktrler

- Sock'ın yanlıř řekilde yerleřtirilmesi ve/veya ayaėa uymaması performansı etkileyebilir. Uyum bilgileri iin [Blm 6.1](#)'e bakın.
- Ařır hareket, Sensrn lmleri iletmeyi duraklatmasına neden olur.
- Bebeėin ayaėına srlen pudra, krem veya losyonlar ciltte tahriře ve verilerin alınmasında sorun yařanmasına yol aabilir.

- Radyo frekansı yayan elektrikli ekipmanlar Dream Sock'ın performansını olumsuz şekilde etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için [Bölüm 12](#)'ye bakın.
- Bebeğin ayağının doğrudan güneş ışığına maruz kalması, performansı etkileyebilir. Owlet, Sock'ın doğrudan güneş ışığından korunmasını tavsiye etmektedir.
- Aşırı parlak doğrudan ışık verilerin alınmasında sorun yaşanmasına yol açabilir.

15.7 Ekipman Sınıflandırması

Sembol	Tanım	Spesifikasyon
	Elektrik çarpmasına karşı koruma	Sınıf II (Güç adaptörü)
	Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi	Tip BF Uygulanan Parça (Sensör)
IP22	Baz İstasyonunun Sıvı Giriş Koruması Derecesi	Cihazın aşağıdakilere karşı korunduğunu gösterir: 1) 12,5 mm ve daha büyük katı yabancı cisimler ve 2) Cihaz 15 dereceye kadar eğildiğinde, dikey olarak düşen su damlalarından kaynaklanan su girişi
IP35	Sensörün Sıvı Giriş Koruması Derecesi	Cihazın aşağıdakilere karşı korunduğunu gösterir: 1) 2,5 mm ve daha büyük katı yabancı cisimler ve 2) Her yönden, düşük basınçla

		püskürtülen sudan kaynaklanan su girişi
--	--	---

15.8 Güç

Birim	Haricî Güç Gereksinimleri	Dâhilî Güç	Spesifikasyonlar
Sensör	Normal çalışma: Yok Şarj Olurken: Baz İstasyonu	3,8 V nominal voltajlı ve 60 mAh kapasiteli, şarj edilebilir Lityum-iyon düğme tipi pil.	Çalışma Süresi (yeniyken): 16 saat
			Şarj Süresi: 2 saat
Baz İstasyonu	5 V voltaj ve 1,0 A akım değerine sahip güç adaptörü. Tüm kutuplarda elektrik yalıtımı sağlar.	3,7 V nominal voltajlı ve 30 mAh kapasiteli, şarj edilebilir Lityum-iyon Polimer Pil.	Çalışma Süresi: 10 dakika
			Şarj Süresi: 3 saat

16. Çalışma Teorisi


16.1 Pulse Oksimetre Teorisi

Dream Sock cihazı arteriyel Hemoglobinin fonksiyonel Oksijen Doygunluğunu (SpO₂) ve Kalp Atış Hızını ölçer. Pulse oksimetre ölçümleri, iki fizyolojik prensibe dayanmaktadır:

- Oksihemoglobin (HbO₂, oksijenli kan) ile deoksihemoglobin (Hb, oksijensiz kan) arasındaki optik emilim özelliklerindeki farklılıklar

- Vücuttaki dokulara dağıtıldığı sırada, kalp atış hızına bağlı oluşan arteriyel kan hacmi (ve buna bağlı olarak ışık emilimi) değişiklikleri.

Pulse Oksimetre, ışık yayan diyotlar (LED'ler) aracılığıyla kırmızı ve kızılötesi ışık dalga boylarıyla ardışık aydınlatma yoluyla arteriyel olarak perfüze edilen dokunun doygunluğunu belirler. Aşağıdaki şekli inceleyin. Dokudan geçen ve zamanla değişen sinyal, saniyede birçok kez bir fotodiyot dedektörüyle ölçülür ve kalbin atışına bağlı olarak maksimum ve minimum emilim arasında oluşan fark doygunluğu belirlemek, kalp atış süresi ise Kalp Atış Hızını hesaplamak için kullanılır.

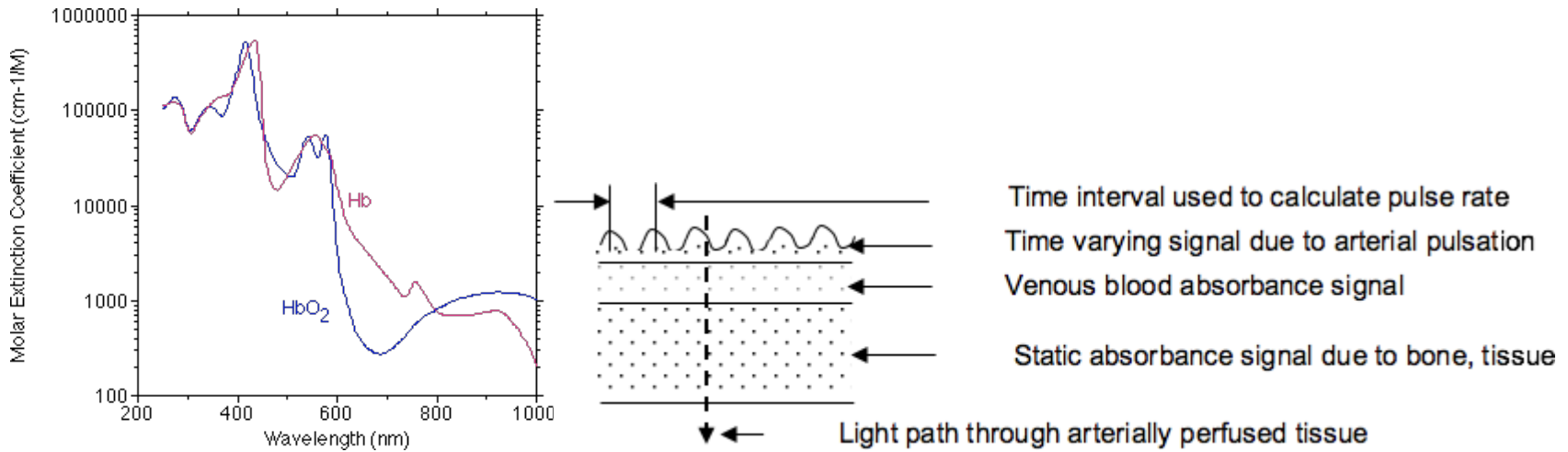

16.2 Kalibrasyon Gerekmez

Yukarıda açıklandığı gibi, Hemoglobinin ışık emme özellikleri dalga boyuna göre değişmektedir. LED ışık kaynaklarında kullanılan belirli dalga boyları ölçüm için gereken kalibrasyon aralığında olacak şekilde belirlendiğinden, Dream Sock cihazında kullanılan Pulse Oksimetre teknolojisi sürekli kalibrasyon gerektirmez.

16.3 Fonksiyonel Oksijen Doygunluğu

Dream Sock, sağlıklı yetişkin test gönüllülerinden alınan arteriyel kan örnekleri kullanılarak, laboratuvar tipi ko-oksimetre ile yapılan referans fraksiyonel Oksijen Doygunluğu ölçümlerine dayanarak, arteriyel Hemoglobinin fonksiyonel Oksijen Doygunluğunu ölçmek üzere kalibre edilmiş ve klinik olarak test edilmiştir.

Fonksiyonel Oksijen Doygunluğu aşağıdaki formülle ifade edilebilir:

$$\% \text{ Functional Saturation} = 100 \times \frac{\% \text{ Fractional Saturation}}{100 - (\% \text{ COHb} + \% \text{ MetHb})}$$

(burada % COHb, % Karboksihemoglobin; % MetHb, % Methemoglobin anlamına gelir)

Fonksiyonel olmayan Hemoglobin düzeyi yüksekse (karboksihemoglobin veya methemoglobin düzeyi yüksekse) fonksiyonel doyunluk ölçümünün doğruluğu azalabilir.

16.4 Fonksiyonel Test Cihazlarının Kullanımı

Pulse oksimetre probunun veya pulse oksimetre monitörünün doğruluğunu değerlendirmek için bir fonksiyonel test cihazı kullanılamaz.

16.5 Klinik SpO2 Doğruluk Çalışma Raporu Özeti

Dream Sock, ISO 80601-2-61:2017 Madde 201.12.1.101.2 yöntemi uyarınca kurumsal olarak onaylanmış bir klinik çalışma protokolü çerçevesinde bilgilendirilmiş olur veren 18 sağlıklı yetişkin gönüllüde SpO2 doğruluğu bakımından klinik olarak değerlendirilmiştir. Gönüllülerin demografik özellikleri 9 erkek ve 9 kadını kapsamaktadır (yaş: 22-37, kilo: 48-88 kg, boy: 150-185 cm, Vücut Kitle İndeksi: 19-28). Gönüllü havuzunda 2 Siyahi/Afrikanlı Amerikalı, 8 Asyalı, 7 Beyaz ve 1 Hispanik/Latin kökenli gönüllü yer almıştır. Ten renkleri Fitzpatrick ölçeğine göre Tip I ile Tip VI arasında değişmektedir. Gönüllülerin bir kolunun 1 cm genlikte, 2 ila 4 Hz seviyesinde ovma ve dokunma hareketlerini ve 1 ila 3 cm genlikte, 1 ila 5 Hz seviyesinde tekrarlanmayan hareketi simüle eden bir makineye yerleştirilmesiyle hareket eklenmiştir. Tüm gönüllüler çalışmayı herhangi bir olay yaşamadan tamamlamıştır.


Ko-oksime tre ile ölçülen arteriyel kan örnekleri (SaO₂), Dream Sock değerlerinin (SpO₂) eş zamanlı olarak elde edilmesi için kullanılan referans yöntemidir. Çalışmaya katılan gönüllüler arasında cilt pigmentasyonu bakımından en az üç koyu pigmentli gönüllü bulunmaktadır.

Bu klinik çalışmadan elde edilen SpO₂ doğruluğu sonuçları aşağıdaki tabloda sayısal olarak, bir sonraki şemada ise grafiksel olarak sunulmaktadır.

SpO ₂ Doğruluk Analizi Aralığı	Hareketsiz Çalışma Sonuçları	Hareketli Çalışma Sonuçları
%70 ila %100	±%2,72 Arms	±%2,63 Arms
%70 ila %80	±%3,05 Arms	±%3,11 Arms
%80 ila %90	±%2,66 Arms	±%2,24 Arms
%90 ila %100	±%2,46 Arms	±%2,54 Arms

Klinik çalışmadan elde edilen sonuçlar, Dream Sock'ın referans alınan standartlara göre SaO₂'nin %70 ila %100'ü aralığında SpO₂ doğruluğu (hareketsiz koşullarda) için belirlenmiş kriterleri karşıladığını göstermektedir.

Non-Motion SpO2

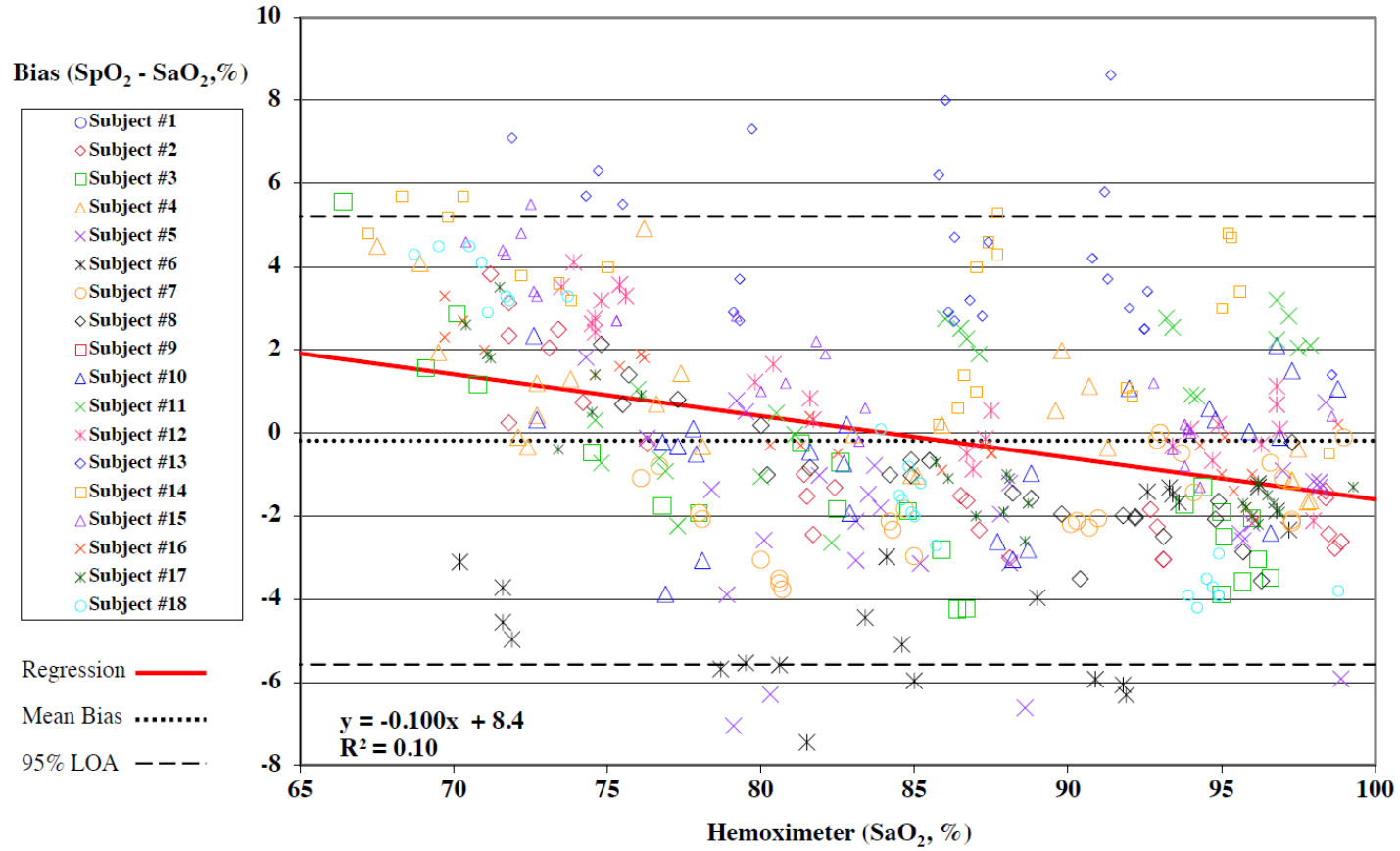

Hareketsiz kořullarda Dream Sock ölçümleri ile Ko-Oksimetre kan gazı ölçümleri arasındaki hatayı gösteren, on sekiz gönüllüden elde edilmiş toplu sonuçlar. Üst ve alt %95'lik uyum sınırları (LOA) gösterilmektedir.

17. Siber Güvenlik Bilgileri

17.1 Güvenli Erişimin Sağlanması

17.1.1 Güçlü parola oluşturma

- Kişisel bilgileri kullanmayın (Ör: E-posta, Kullanıcı Adı, Doğum Günü vb.) Bu tür bilgiler çoğu zaman herkese açıktır ve parolanızın kolayca tahmin edilebilir olmasına yol açabilir.
- Karmaşık bir parola kullanın. En az 8 karakterden oluşan, rakam, sembol, büyük ve küçük harflerin birlikte kullanıldığı bir parola seçin.
- Sözlükte bulunan kelimeleri kullanmaktan kaçının.
- Her hesap için aynı parolayı kullanmaktan kaçının.
- Parolanızı paylaşmayın.
- Rastgele parolalar kullanmak en yüksek güçlülük düzeyini sağlar.

17.1.2 Bağlanmak için herkese açık ücretsiz Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının

17.1.3 Verilerinizi güvende tutun

- Kullandığınız ağı doğrulayın.
- Mümkünse VPN kullanın.
- Bir güvenlik duvarını etkinleştirin.
- Antivirüs yazılımı kullanın.

17.2 Hizmetin Kullanılamaması

Bağımlılıklarımızdan veya hizmetlerimizden kaynaklanan ve kullanıcılar için hizmetin kullanılabilirliğini etkileyen kritik bir hizmet kesintisi olması durumunda, kullanıcılara bilgi verilecektir.

17.3 Siber güvenlik olaylarının tespit edilmesi

Owlet'te siber güvenlik en öncelikli konulardan biridir. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli güvenliğini sağlamak için özel bir ekibe sahibiz. Şüphelenilen sorunları araştırabilmemiz için ürünlerimizde günlük kaydı özelliği etkinleştirilmiştir. Bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin: <https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

17.4 Cihazınızı güncel tutma

Telefonunuz, bilgisayarınız ve bizimki gibi uygulamalarınız dâhil olmak üzere, cihazlarınızı üretici güncellemeleriyle güncel tutmanız önemlidir. Kullanıma sunulan güncellemeleri indirdiğinizden ve mevcut en son sürümü kullandığınızdan emin olun. Cihazımızda bir güvenlik açığı bulunursa yeni sürümlerde güvenlik güncellemeleri yayınlanacaktır. Lütfen Owlet uygulamanızın da güncel olduğundan emin olun.

Olası güvenlik açığına ilişkin endişeler, Owlet'in Güvenlik Açığı Açıklama Politikasında belirtilen şekilde bildirilebilir: <https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

17.4.1 Owlet Dream App Güncellemeleri

Owlet, düzenli olarak Owlet Dream App'in güncellenmiş sürümlerini yayınlar. iOS veya Android cihazınıza Owlet Dream App'in en son sürümünü indirmeniz önemlidir. Owlet Dream App güncellemeleri doğrudan Apple App Store veya Google Play Store üzerinden indirilir. Owlet'in Owlet Dream App'in güncellenmiş bir sürümünü yayınlayıp yayınlamadığını görmek için ilgili mağazayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

17.4.2 Ürün Yazılımı Güncellemeleri

Owlet, düzenli olarak Dream Sock cihazınıza yönelik güncellenmiş ürün yazılımları yayınlar. Owlet yeni bir ürün yazılımı sürümü yayınladığında, Dream Sock cihazınız otomatik olarak yeni ürün yazılımıyla güncellenir.

Dream Sock cihazınızın ürün yazılımı güncellenirken, Owlet Dream App'te normalde "Ölçüm alınıyor", "Ölçümler normal" vb. yazan durum bilgisi alanında "Güncelleme Devam Ediyor" bilgisi gösterilir.

Bu tür bir ürün yazılımı güncellemesi devam ederken, cihaz güncelleme işlemi sırasında Baz İstasyonunun fişini ÇEKMEMELİ veya Sensörü Baz İstasyonundan ÇIKARMAMALISINIZ. Baz İstasyonu prize takılı değilse ve Sensör Baz İstasyonunda şarj olmuyorsa ürün yazılımı güncelleme işlemi duraklar. Ürün yazılımı güncelleme işlemi devam ederken Baz İstasyonunda şarj olan Sensörü çıkarırsanız Dream Sock üniteniz ve Sensörünüz doğru şekilde çalışmayı sürdürür ancak ürün yazılımı güncelleme işlemi durdurulur ve Sensör Baz İstasyonuna tekrar yerleştirilene kadar devam etmez.

Ürün yazılımı güncelleme işlemi tamamlandığında, Owlet Dream App "Güncelleme Devam Ediyor" mesajını göstermeyi bırakır. Ürün yazılımı güncelleme işleminin tamamlanması ortalama 15-20 dakika sürer.

Ürün yazılımı güncelleme işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen Owlet Baby Care Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Owlet Baby Care Müşteri Desteği
Ücretsiz Telefon: +1 (844) 334-5330
E-posta: contact@owletcare.com
Sohbet: <http://owletcare.com/chat>

17.4.3 Güvenlik güncellemeleri

Cihazınızın güvenliğini sağlamak amacıyla, cihazınızın kaydedildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca zorunlu veya rutin güvenlik güncellemeleri cihazınıza yüklenir.

18. Biyoyumluluk

Bebekle/çocukla temas eden malzemeler kapsamlı biyoyumluluk testlerinden geçirilmiştir ve ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10 ve ISO 10993-23'e uygundur. Dream Sock'ın üretiminde doğal lateks kauçuk veya DEHP plastikleştirici malzemeler

kullanılmamıştır. Bebek, çocuk, hamile veya emziren annelerin Dream Sock malzemeleriyle teması sırasında ek bir önlem almaya gerek yoktur. Doğru uygulama önlemleri geçerliliğini korur.

19. Klinik Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri

19.1 Beklenen Klinik Performans ve Faydalar

Dream Sock + Sağlık Bildirimleri ile ilişkili beklenen klinik performans aşağıdaki gibidir:

- Sağlık uzmanının gözetimi altında diğer tanı araçlarının kullanımıyla elde edilen klinik verilerle karşılaştırılarak değerlendirildiğinde, klinik olarak müdahale edilebilir fizyolojik koşullar (hipoksi $< \%80$ SpO₂, taşikardi > 220 BPM ve bradikardi < 50 BPM) için alarm performansı $> \%70$ duyarlılığa ve $> \%50$ pozitif prediktif değere (PPV) sahiptir.

-

Dream Sock + Sağlık Bildirimleri ile ilişkili beklenen klinik faydalar aşağıdaki gibidir:

- Sağlık uzmanının gözetimi altında diğer tanı araçlarının kullanımıyla elde edilen klinik verilerle karşılaştırılarak değerlendirildiği üzere, Dream Sock hipoksi ($< \%80$ SpO₂), taşikardi (> 220 BPM) ve bradikardi (< 50 BPM) oluşumunun ev ortamında doğru şekilde tanınmasını ve tespit edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu faydayla ilişkili sonuç parametresi, geçerli fizyolojik durumların (hipoksi, bradikardi, taşikardi) başarılı bir şekilde tanınması olarak bildirilmesidir.
- Dream Sock, normalde ev ortamında boylamasına izleme yapılamayan bir kullanıcı popülasyonunda yaşamsal bulgu parametrelerine (kalp atış hızı ve oksijen doygunluğu) dair geçmiş eğilimleri gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bu gösterim, bakım verenlerin sağlıkla ilgili daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için kullanılabilecek biyomedikal veriler sağlamaktadır. Bu faydayla ilişkili klinik olarak anlamlı çıktılar, kanıtlamış öngörülebilir ve güvenilir kullanım ve kullanılabilirlik yoluyla elde edilecektir.

19.2 Güvenlik Bilgileri

Dream Sock + Sağlık Bildirimleri, EN ISO 13485:2016 +A11:2021'e uygun şekilde tam bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde tasarlanmış ve üretilmiştir. Dream Sock + Sağlık Bildirimleri aşağıdaki güvenlik ve performans standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir:

Standart No.	Başlık
ISO 80601-2-61:2017	Elektrikli Tıbbi Ekipman - Bölüm 2-61: Pulse Oksimetre Ekipmanının Temel Güvenliği ve Temel Performansı İçin Özel Gereksinimler
EN 60601-1:2006/A1:2013/A2:2021	Elektrikli tıbbi ekipman Bölüm 1: Temel güvenlik ve temel performans için genel gereksinimler
EN 60601-1-2:2015 + Değişiklik 1:2021	Yardımcı standart: Elektromanyetik Uyumluluk - Gereksinimler ve Testler
EN 60601-1-6:2010 + Değişiklik 1:2015	Yardımcı Standart: IEC 62366 dâhil kullanılabilirlik: Kullanılabilirlik tekniklerinin tıbbi cihazlara uygulanması
IEC 60601-1-8:2006 + Değişiklik 1: 2012 + Değişiklik 2: 2020	Yardımcı Standart: Elektrikli tıbbi ekipmanlar ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki alarm sistemlerine ilişkin genel gereksinimler, testler ve talimatlar
IEC 60601-1-11:2015 + Değişiklik 1: 2020	Yardımcı Standart: Evde Sağlık Bakımı Ortamında Kullanılan Elektrikli Tıbbi Ekipmanlar ve Elektrikli Tıbbi Sistemlere İlişkin Gereksinimler
IEC 62366-1:2015 + AMD1:2020	Tıbbi cihazlar - Kullanılabilirlik tekniklerinin tıbbi cihazlara uygulanması
BS EN ISO 14971:2019 + A11:2021	Tıbbi cihazlar - Risk yönetiminin tıbbi cihazlara uygulanması
ISO 20417:2021	Tıbbi cihaz üreticisi tarafından sağlanan bilgiler

Standart No.	Başlık
EN ISO 15223-1:2021	Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihaz etiketlerinde kullanılacak semboller, etiketleme ve sağlanacak bilgiler - Bölüm 1: Genel gereksinimler
IEC 62304:2006 + Değişiklik 1: 2015	Tıbbi Cihaz Yazılımları – Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri
ISO 10993-1:2018	Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Risk Yönetimi Sürecinde Değerlendirme ve Test
ISO 10993-5:2009	Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - Bölüm 5: In Vitro Sitotoksosite Testleri
ISO 10993-10:2021 BS EN 10993-10:2021	Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi - Bölüm 10: Tahriş ve Cilt Hassasiyeti Testleri
ISO 10993-11:2017 BS EN ISO 10993-11:2018	Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 11: Sistemik toksisite testleri
(EN) ISO 10993-23:2021	Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 23: Tahriş testleri

Owlet Baby Care, Inc., bu belge ile Dream Sock'ın 2017/745 sayılı Yönetmelik (AB), Birleşik Krallık Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR, 2002) ve Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı Yasası (PSTI, 2022) ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB ve Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı'nın tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

20. Semboller Sözlüğü

Sembol	Anlamı
	Çalıştırma Talimatları - Çalıştırma talimatlarını, kullanım kılavuzunu veya kullanım talimatlarını (IFU) belirtir.
	Üretici - Tıbbi cihazın üreticisini belirtir.
	Üretim Tarihi - Etiketli bileşenin üretim tarihini belirtir.
	Seri Numarası - Bileşenin cihaz seri numarasını belirtir.
	Model Referansı - Bileşenin model referans numarasını belirtir.
	Parti Referansı - Üreticinin parti veya lot kodunu belirtir.
	Ambalaj hasarlıysa veya açılmışsa kullanmayın.

	Kuru Tutun - Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.
	Sıcaklık Sınırı - Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği sıcaklık sınırlarını belirtir.
	Nem Sınırları - Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği nem aralığını belirtir.
	Atmosferik Basınç Sınırları - Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği atmosferik basınç aralığını belirtir.
	Tip BF Uygulanan Parça - Hastanın elektrik çarpmasına karşı izole edildiğini belirtir.
	Zorunlu eylem: Kullanma talimatlarına uyun.
	Tek Hasta - birden çok kez kullanım
IP22	Cihazın aşağıdakilere karşı korunduğunu gösterir: 1) 12 mm ve daha büyük katı yabancı cisimler ve 2) Cihaz 15 dereceye kadar eğildiğinde, dikey olarak düşen su damlalarından kaynaklanan su girişi

IP35	Cihazın aşağıdakilere karşı korunduğunu gösterir: 1) 2,5 mm ve daha büyük katı yabancı cisimler ve 2) Her yönden, düşük basınçla püskürtülen sudan kaynaklanan su girişi
	Elektronik Cihazların Uygun Şekilde Bertaraf Edilmesine Dikkat Edin - Cihazın ve/veya aksesuarlarının bertarafı veya geri dönüşümü bakımından yerel yasalara uyulması gerektiğini belirtir.
	Sınıf II Ekipman - Elektrik çarpmasına karşı korumanın yalnızca temel yalıtıma dayanmadığı, çift yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım gibi ek güvenlik önlemlerinin de sağlandığı elektrikli ekipmanı belirtir.
	Uyarı! - Kaçınılmadığı takdirde hastanın veya kullanıcının ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilecek, potansiyel olarak tehlikeli durumlara karşı uyarıda bulunur.
	Dikkat - Kaçınılmadığı takdirde kullanıcının veya hastanın hafif ya da orta derecede yaralanmasına yol açabilecek veya ekipmanın ya da diğer malların hasar görmesine neden olabilecek, potansiyel olarak tehlikeli durumlara karşı önlem alınmasına dair uyarıda bulunur.
	Not - Ürün veya belirli bir konu hakkında önemli bilgi verir.
	UDI (Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı) (01) GTIN (11) Son Kullanma Tarihi (21) Seri Numarası

	İyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik radyasyon - Ekipmanda RF vericileri bulunur; bu sembolle işaretlenmiş ekipmanın yakınında parazit oluşabilir.
	Doğru Akım Derecesi
	Cihaz Steril Değildir
	Doğal Kauçuk Lateks ile üretilmemiştir
	Boğulma Uyarısı - Kabloya dolanarak boğulma tehlikesini önlemek için baz istasyonunu her zaman bebeğinizin yatağından en az 1 metre uzakta tutun.
	Geri dönüşüm
	Polietilen tereftalat (diğer adıyla PET), şeffaf, sağlam, hafif ve %100 geri dönüştürülebilir bir plastik türünün adıdır. Diğer plastik türlerinin aksine, PET plastik tek kullanımlık değildir; %100 geri dönüştürülebilir, çok yönlü ve yeniden üretilmeye hazırdır.

%SpO₂	Arteriyel Hemoglobin Fonksiyonel Oksijen Doygunluğu.
UKRP	Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi - Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi, üreticinin yükümlülükleriyle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmek için Birleşik Krallık dışında bulunan üretici adına hareket eder.
UKCA	UKCA İşareti - UKCA işareti, Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya ve Galler) piyasaya sunulan ürünler için kullanılan ürün işaretidir. 0086, BSI için Onaylı Kuruluş numarasını ifade eder.
EC REP	AB Yetkili Temsilcisi. Yetkili temsilci, AB dışındaki üreticiden, üreticinin Yönetmelikler uyarınca taşıdığı yükümlülükler doğrultusunda belirtilen görevlerle ilgili olarak üretici adına hareket etmek üzere yazılı bir yetki almış ve kabul etmiş, Avrupa Birliği içinde yerleşik olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.
CE	CE İşareti - CE İşareti, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) piyasaya sunulan ürünler için kullanılan ürün işaretidir. 2797, BSI için Onaylanmış Kuruluş numarasını ifade eder.
2797	İthalatçı - İthalatçı, AB/Birleşik Krallık/İsviçre'de yerleşik olan ve üçüncü bir ülkeden getirilen bir cihazı AB/Birleşik Krallık/İsviçre pazarına arz eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.
CH REP	İsviçre Temsilcisi - İsviçre Yetkili Temsilcisi, geçerli İsviçre tıbbi cihaz gerekliliklerine uyumu sağlamak için İsviçre dışında bulunan üreticiler adına hareket eder.

MD	Cihaz bir Tıbbi Cihazdır
QTY	Miktar
UDI	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı - Cihaza özgü sayısal veya alfasayısal kod.